

NAVODILA ZA UPORABO

POLOBRAZNA ZAŠČITNA MASKA FFP2 NR



LASTNOSTI:

- 5 - slojna filtrirna struktura,
- posamično pakirane,
- visoko kvalitetne z visoko učinkovitostjo filtracije,
- brez respiratorja,
- učinkovita zaščita pred trdnimi delci, finimi prahovi, smogom in ostalimi škodljivimi delci.

SPECIFIKACIJE:

- Dimenzije: 160mm x 105mm
- Standard: EN149:2001+A1:2009
- Uredba EU 2016/425 o osebni varovalni opremi
- Stopnja zaščite: FFP2 NR

NAVODILA ZA UPORABO:

1. Preden odprete embalažo, se prepričajte, da so vaše roke čiste.
2. Odstranite masko iz zaščitne folije. Preverite, da je maska nepoškodovana.
3. Postavite masko čez nos in usta (z nosnikom obrnjenim navzgor) ter z obema rokama položite elastična trakova za ušesa.
4. S prstoma oblikujte nosnik, da se tesno prileže obliki nosu.
5. Z močnejšim izdihom preverite ali je maska varna in pravilno nameščena.
6. Masko odstranite tako, da se dotaknete samo ušesnih trakov in ne segate v notranjost maske.

OPOZORILA:

Izdelek ni medicinski pripomoček in je namenjen enkratni uporabi. Izdelek uporabljajte v skladu z navodili in ne več kot eno izmeno. Uporabljajte samo v primerno prezračevalnih prostorih, ki vsebujejo dovolj kisika za podporo življenju. Lasje, dlake na obrazu ali brada in nekatere značilnosti obraza lahko zmanjšajo učinkovitost te maske. Materiali, ki so uporabljeni lahko pri določenih osebah povzročijo alergijsko reakcijo. V primeru alergijske reakcije takoj odstranite masko in poiščite zdravniško pomoč. Ne uporabljajte v eksplozivnih atmosferah. Ne uporabljajte, kadar so koncentracije onesnaževalcev nevarne za zdravje ali življenje. Poškodovane maske takoj zavrzite.

Izdelek ustreza zahtevam Uredbe (EU) 2016/425 z dne 9.3.2016 in je v skladu s standardom EN149:2001+A1:2009.

NAVODILA ZA SHRANJEVANJE:

Maske shranjujete v originalni embalaži, v hladnem in suhem prostoru, zaščitene pred soncem.

Rok uporabe je označen na embalaži.

Pomen piktogramov / simbolov:



Glej informacije proizvajalca



Temperaturno območje skladiščenja



Vlažnost ob skladiščenju



Proizvajalec



Polipropilen



Za enkratno uporabo



Maska je omejena samo na enoizmensko uporabo in se ne sme ponovno uporabljati.

Proizvajalec: Moonlex dool, Sremski Front 1a-26, 2000 Štip, R. Severna Makedonija

Uvoznik: Mabiti d.o.o., Nove Fužine 33, 1000 Ljubljana, Slovenija

Ime, naslov in identifikacijska številka priglasičenega organa: CIS INSTITUT d.o.o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana, **NB2890**

Izjava EU o skladnosti dosegljiva na spletni strani: <https://drive.google.com/drive/folders/1o1sBgdMa6pa0lh4kXieff61LdxHyFSdD> ali preko QR kode na embalaži.