




# Prontosan®


## MIT NEUER VERSCHÜSSIGUNG

# NEUER PRAKTISCHER VERSCHLUSS


Prontosan® Wundspüllösung und Prontosan® Wound Gel

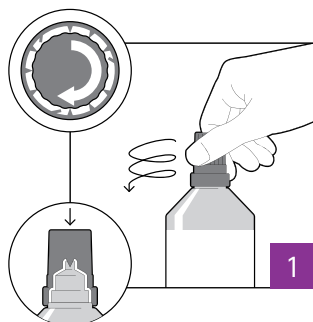


Kappe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, dadurch wird der Öffnungsbereich der Flasche durchstochen

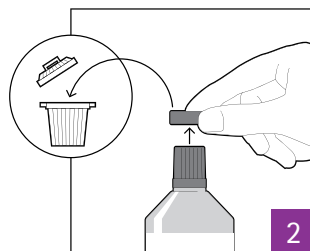

Sicherheitsring von der Kappe entfernen (kann entsorgt werden)

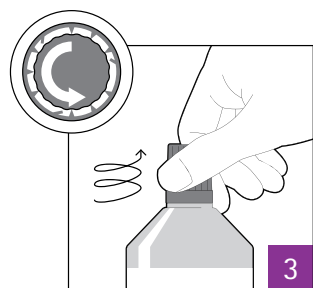

Kappe gegen den Uhrzeigersinn drehen und öffnen

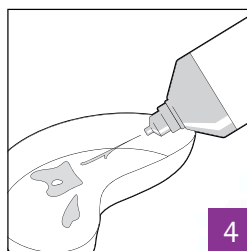

Flasche ist einsatzbereit



FOLGENDE PRODUKTE ERHALTEN EINEN NEUEN VERSCHLUSS

Artikel	VE	Art.-Nr.	PZN	Verfügbar ab
Prontosan® Wundspüllösung 350 ml	10	400403	02850062	März 2018
Prontosan® Wundspüllösung 1000 ml	10	400446	09003678	ca. 2. HJ 2018
Prontosan® Wound Gel 30 ml	10	400505	02855349	ca. 2. HJ 2018

Einfach den QR-Code einscannen und das Video zur Öffnung der Prontosan® Flasche ansehen.



Wir sind für Sie da  
Hotline 0 56 61 71-33 99






[www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)  
[www.bbraun.de/wunde-professionals](http://www.bbraun.de/wunde-professionals)  
[www.bbraun.de/wunde-patienten](http://www.bbraun.de/wunde-patienten)

## VORTEILE

- Patentierter und sicherer Verschluss
- Einfach und schnell zu öffnen
- Sofort ersichtlich, ob die Flasche bereits geöffnet wurde
- Auslaufsicher

# PRODUKTÜBERSICHT

## Prontosan® Gesamtsortiment

Artikel	VE	Art.-Nr.	PZN	
<b>Prontosan® Debridement Pad</b>				<div>NEU</div> 
12 x 8,3 cm, tropfenförmig	3	3908456	12539862	
12 x 8,3 cm, tropfenförmig	10	3908457	12539879	
<b>Prontosan® Wundspüllösung</b>				
Patronenflasche im Riegel 40 ml	24	400487	09513652	
Flasche 350 ml	10	400403	02850062	
Flasche 1000 ml	10	400446	09003678	
<b>Prontosan® Wound Gel</b>				
Patronenflasche 30 ml	10	400505	02855349	
<b>Prontosan® Wound Gel X</b>				
Tube 50 g	10	400517	09706693	
Tube 250 g	10	400508	06464893	
<b>Prontosan® Wound Spray</b>				
Sprühflasche 75 ml	20	400565	09447292	



- Effiziente Wundreinigung mit Prontosan® Wundspüllösung und Prontosan® Wound Gel
- Steril und gebrauchsfertig
- Polihexanid ist lt. Konsensusempfehlung Mittel der 1. Wahl für chronische Wunden <sup>1, 2, 3</sup>
- Die Kombination der Prontosan® Inhaltsstoffe Polihexanid und dem Tensid Betain führt zu einer Verkürzung der Abheildauer <sup>4, 5</sup>
- Die Verträglichkeit aller Askina® Verbandstoffe mit Prontosan® Sortiment ist geprüft
- Nach Anbruch 8 Wochen verwendbar

<sup>1</sup> Kramer, A. et al. Hyg. Med. 2004; 5, 147-157

<sup>2</sup> Dissemont, J. et al. Wund Management 2009; 2, 62-68

<sup>3</sup> Kramer, A. et al. Skin Pharmacol Physiol 2018; 31, 28-58

<sup>4</sup> Bellingeri, A. et al. J Wound Care 2016; 25: 3, 160-168.

<sup>5</sup> Durante, C.M. et al. Minerva Chir. 2014; 69: 5, 283-92.

# Prontosan®

## NUR EINE SAUBERE WUNDE KANN HEILEN

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland  
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | [www.bbraun.de](http://www.bbraun.de)