

schülke



Feuchttuchspendersystem für den Einsatz von schülke Flächendesinfektionsmitteln in allen Bereichen von Krankenhäusern, Altenheimen, Rettungsdiensten und Arztpraxen.

schülke wipes

Unser Plus

- umfassend einsetzbar
- einfache Handhabung
- Standzeit mit angesetzter Lösung bis zu 28 Tage
- flusenfrei auf der Oberfläche
- 40, 70, 100 oder 111 wipes pro Rolle
- Medizinprodukt

Anwendungsgebiete

Feuchttuchspendersystem zum eigenständigen Befüllen von schülke Flächendesinfektionsmitteln. schülke wipes können zur Flächendesinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten sowie Flächen aller Art eingesetzt werden. Folgende Größen sind erhältlich: •schülke wipes 40 (30 x 30 cm)

- schülke wipes 70 (28 x 23 cm)
- schülke wipes 100 (30 x 30 cm)
- schülke wipes 111 (30 x 24 cm)

Anwendungshinweise

Befüllung unter hygienischen Bedingungen

Zunächst die Hände desinfizieren und frische Schutzhandschuhe und Kittel anziehen. Bitte während des Befüllungsvorgangs darauf achten, dass die Handschuhe nicht durch andere Tätigkeiten kontaminiert werden. Öffnen Sie den Deckel des Feuchttuchspenders und setzen Sie die entpackte Vliesrolle ein. Ziehen Sie das innerste Tuch ein kleines Stück aus der Mitte heraus. Anschließend geben Sie 2 Liter bei gebrauchsfertigem Produkt und 3 Liter bei Gebrauchslösung aus einem angesetzten Konzentrat langsam spiralförmig über die Vliesrolle. (schülke wipes 40/ 70 = 1,5 Liter.) Nun ziehen Sie das innerste Tuch der Rolle in die sternförmige Entnahmeöffnung des Deckels ein und werfen es. Setzen Sie den Deckel auf den Spender auf

und verschließen Sie ihn jetzt, bis er einrastet. Verschließen Sie auch die Schutzkappe des Entnahmesystems sorgfältig. Die Tücher sind nach 30 Minuten Wartezeit vollständig durchtränkt. Dokumentieren Sie in der Zwischenzeit, wie auch bei jeder Nachbefüllung, den Präparatenamen, die gewählte Einsatzkonzentration, die Einwirkzeit und das Befülldatum auf dem Etikett, welches jeder Vliestuchrolle beiliegt. Kleben Sie es auf das vorgesehene Feld. Verwenden Sie hierzu nur die von schülke empfohlenen Präparate und Konzentrationen. (Beachten Sie dazu bitte die jeweilige Präparate-Information). Bei sensiblen Medizinprodukten und Oberflächen, die nicht alkoholverträglich sind (z. B. Polster, Displays, Acrylglas, Ultraschallköpfe), empfehlen wir Ihnen die Tränkung der Tücher mit unserem mikrocid® sensitive liquid. Sichtbare Verunreinigungen vor der Desinfektion entfernen. Oberfläche gründlich mit getränktem Vliestuch abwischen. Auf vollständige Benetzung achten und die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten - ausgetrocknete Tücher nicht mehr verwenden. Die vom Hersteller der verwendeten Desinfektionspräparate gemachten Angaben zu Einwirkzeiten, Einsatzkonzentrationen, Wirkspektrum und etwaigen besonderen Anwendungshinweisen für die sichere Verwendung, sind zu beachten. Die wiederaufbereitbaren Systeme sind nicht geeignet für den Einsatz in Risikobereichen. Hier empfehlen wir die schülke wipes safe & easy bag-in-box / schülke wipes safe & easy bagless. Darüber hinaus sollte auch das eingesetzte Desinfektionsmittelpräparat auf seine Eignung hin für Risikobereiche geprüft werden.



Besondere Hinweise

Reinigung und Desinfektion

Bitte achten Sie beim Wischen mit den getränkten Tüchern auf eine vollständige Benetzung der Flächen und nach jeder Tuchentnahme auf ein sorgfältiges Verschließen der Entnahmeöffnung, um einer Austrocknung der Tücher vorzubeugen.

Wiederbefüllung unter hygienischen Bedingungen

Vor der Wiederbefüllung ist der Spender zu reinigen und zu desinfizieren. Eine detaillierte Anleitung finden Sie unter www.schuelke-wipes.de

Bei allen schülke Produkten beträgt die Standzeit 28 Tagen, ausgenommen: terralin® PAA*. Weitere Informationen können Sie unserem Beipackzettel entnehmen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
schülke wipes (6x100 Tücher)	1/Karton	11950
schülke wipes (6x70 Tücher)	1/Karton	3
schülke wipes (6x111 Tücher)	1/Karton	11950
schülke wipes 100/111 Spendereimer	1/Karton	5
schülke wipes mini 40/70 Spendereimer	1/Karton	11950
schülke wipes (10x40 Tücher)	1/Karton	6
schülke wipes 70 Spenderbox	1/Karton	11952
schülke wipes 100/111 Spenderbox	1/Karton	11954
schülke wipes 130 (6 x 130 Tücher)	1/Karton	11951
schülke wipes 70 Spenderbox (5 x1 Stück)	1/Karton	7000021
schülke wipes 100/111 Spenderbox (5x1 Stück)	1/Karton	7000016
schülke wipes 100/111 Spendereimer (5x1 Stück)	1/Karton	7000016
schülke wipes mini 40/70 Spendereimer (5x1 Stück)	1/Karton	7000016
schülke wipes Box Deckel 70/100/111	1/Karton	70001106

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Wandhalterung schülke wipes Box	13443
Wandhalterung schülke wipes Eimer	5
	13443
	0

Verwandte Produkte

- antifeck® FF
- antifeck® N liquid
- buraton® rapid
- mikrocid® AF liquid
- mikrocid® sensitive liquid
- perform® advanced alcohol EP
- perform® classic alcohol EP
- perform® classic concentrate Q-Plus
- terralin® liquid
- terralin® PAA
- terralin® protect

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com. Für individuelle Fragen: Customer Sales Service Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com



Spenderbox

Spendereimer

*terralin® PAA kann nur in Kombination mit den schülke wipes 40 angewendet werden. Die Standzeit beträgt 12 Stunden.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

Air Liquide
HEALTHCARE Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland Tel. +49 40
- 52100 - 0 Fax +49 40 -
52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com