



LactatePro LT-1730

Kurzbedienungsanleitung



1



Desinfektion des Ohrenlappchens/Fingers.
Öffnen und Einsetzen des Teststreifens in
den Teststreifenschlitz des LactatePro Gerätes.

2



Punktion gem. Bedienungsanleitung des Stechers.
Erster Tropfen wegwischen. Halten des Streifenendes
an den Blutstropfen – der Streifen zieht automatisch
die notwendige Blutmenge ein. Ein Signal meldet den Beginn
der Messung. Vorsicht, Blut nicht auf Streifen tropfen.

3



Nach 15 Sekunden erscheint das Resultat.
„lo“ wird angezeigt bei einer Laktatmenge < 0.5 mmol/l
„hi“ wird angezeigt bei einer Laktatmenge > 25.0 mmol/l



Mögliche Fehlerquellen

- Vermischung von Schweiß und Blut
- Berühren des Streifens mit schmutzigen oder feuchten Händen
- Ungenügendes Einstecken des Streifens
- Zu kalte/warme Aussentemperatur