

Body Armor® Night Splint – die dorsale Nachtschiene von DARCO.



Die Body Armor® Night Splint besteht aus einer rigiden Kunststoffschale und einer Großzehen-schleife zur Dehnung der Faszie. Diese Kombination ermöglicht ein Entgegenwirken der folgenden Indikationen:

- > Verkürzung der plantaren Faszie
- > Fersensporn
- > Achillessehnen-Entzündungen und -Schwächen
- > Metatarsalgie
- > Spitzfußstellungen und Fußgelenkskontrakturen

Hilfsmittelnummer 23.03.01.0009

Die Zehenplatte dorsalisiert alle Zehen und erreicht damit eine stärkere Dehnung der plantaren Faszie. (optional erhältlich)



DARCO

Die Body Armor® Night Splint ist eine Nachtschiene, die den Fuß in 90 Grad zum Unterschenkel hält. Diese Position verhindert eine Spitzfußstellung des Fußes und somit auch eine Verkürzung der Achillessehne.



Die Großzehenschleife hebt den Hallux an und macht sich so den Windlass-Mechanismus* zu Nutze. Dadurch wird zusätzlich eine Dehnung der plantaren Faszie erreicht.

Zudem bewirkt sie eine leichte Dehnung

- > der Achillessehne
- > der Tibialis posterior Sehne
- > der tiefen Flexoren und
- > des Muskelapparates des Unterschenkels

Die Body Armor® Night Splint Nachtlagerungsorthese ist auf dem Markt die einzige Orthese, die die natürliche Beugebewegung des Fußes zulässt. Somit wird eine präzise und nachhaltige Streckung der plantaren Faszie erreicht.

* **Windlass-Mechanismus:** Eine Dorsalflexion windet die plantare Faszie um das Metatarsalia I wie bei einer Ankerwinde, dehnt die plantare Faszie und verkürzt die Distanz zwischen Calcaneus und den Metatarsalia und erhöht das longitudinale Fußgewölbe.

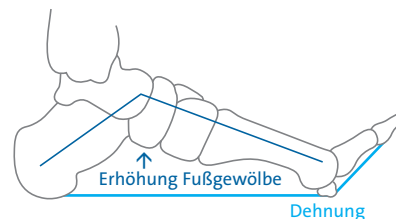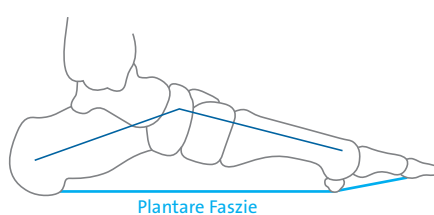

Die verstellbaren Klettbinden garantieren ein schnelles und einfaches Anlegen der Schiene und gewährleisten eine bequeme Passform.



Der Multipositions-Gummiring ermöglicht es dem Anwender, die Zehenschleife in verschiedenen Positionen zu fixieren.



Das niedrige Profil der Schiene verhindert die Spannkraften auf Fußrücken und Tibiakante um bis zu 70%.

Die Body Armor® Night Splint ist universell links wie rechts tragbar und in einer Einheitsgröße erhältlich.

Artikelnr.	Farbe	Größe
------------	-------	-------

Body Armor® Night Splint

BADS	Weiß-Blau	Universal
------	-----------	-----------

Zehenplatte

BADS-P	Grau-Blau	Universal
--------	-----------	-----------



DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22 | info@darco.de | www.darco.de



130314