

ACE X Atemalkoholtester

Kurzanleitung – DE

(für Details lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung)

Bezeichnung der einzelnen Bestandteile



1. Mundstück und Öffnung zum Anbringen der Mundstücke
2. Digitales OLED Display (3-stellig bei ‰ und mg/L bzw. 4-stellig bei % BAC)
3. Startknopf
4. Luftauslass (immer freihalten)
5. Batteriefach-Abdeckung (an der Geräte-Rückseite)
6. Menü-Knopf (für diverse Geräteeinstellungen)

Testdurchführung

1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel (an der Rückseite des Gerätes) nach unten und prüfen Sie, ob sich 2 Batterien im Batteriefach befinden. Beachten Sie beim Einlegen die Polarität (+/-) der Batterien. Schließen Sie das Batteriefach wieder. 2. Stecken Sie ein Mundstück auf die seitliche Öffnung zum Anbringen der Mundstücke (= die Öffnung an der linken Seite der Gerätefront). 3. Drücken Sie 2 Sekunden lang den Startknopf an der Vorderseite des Alkoholtesters (es ist der obere Knopf). Das Gerät piepst 1x und am Display werden kurz das eingestellte Alarm-Limit, Datum und die Zeit angezeigt, außerdem leuchten über dem Display ein grünes und ein rotes Licht gleichzeitig. Dann erscheint „AUFWAERMEN“ am Display und zugleich bewegt sich eine Linie von links nach rechts (das Gerät wärmt sich auf). 4. Am Ende der Aufwärmphase piepst das Gerät 2x und es erscheint „PUSTEN SIE“ am Display. 5. Sobald „PUSTEN SIE“ am Display zu sehen ist, beginnen Sie zirka 3-5 Sekunden lang gleichmäßig in das zuvor angebrachte Mundstück zu pusten. 6. Pusten Sie so lange in das Mundstück, bis Sie einen 2-fachen Klack-Ton und danach einen 2-fachen Piepton hören. Nach dem 2-fachen Piepton ist die Atemprobe beendet und das Gerät beginnt mit der Auswertung des Messergebnisses. Das Messergebnis wird nach wenigen Sekunden für 4 Sekunden am Display angezeigt.

7. Für einen erneuten Test drücken Sie einfach kurz den Startknopf.

Bitte beachten Sie

- § Warten Sie nach dem letzten Schluck Alkohol mindestens 15 Minuten bis zum Atemtest, ansonsten verfälscht Restalkohol in Ihrer Mundhöhle das Ergebnis.
- § Aus hygienischen Gründen und zur Gewährleistung eines zuverlässigen Messergebnisses sollten Sie für jeden Test ein neues Mundstück verwenden.
- § Die voreingestellte Messeinheit für den Gebrauch in der EU ist Promille (g/L), für UK ist es mg/L und für die USA ist die Messeinheit % BAC.
- § Alle mit diesem Alkoholtester ermittelten Messwerte sind stets nur Richtwerte und nicht rechtsverbindlich.