

Kurzbetriebsanleitung

Elektronische KERN Waagen, ausgenommen Kran- und Hängewaagen



Detaillierte Infos siehe Betriebsanleitung in weiteren Sprachen (z.B. Englisch) online unter www.kern-sohn.com/manuals.



Waage ist zur Verwendung als „nichtselbsttätige Waage“ vorgesehen.

Keine Dauerlast auf der Wägeplatte belassen.

Nicht für dynamische Verwiegungen verwenden.

Stöße und Überlastungen unbedingt vermeiden.



Niemals in explosionsgefährdeten Räumen betreiben.

Waage darf nicht konstruktiv verändert werden.



Vor Anschluss des Netzadapters prüfen, ob der aufgedruckte Spannungswert mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.




auf feste, erschütterungsfreie und möglichst horizontale Lage achten.

übermäßigen Temperaturschwankungen, direkte Sonnenbestrahlung, Zugluft und statische Aufladung vermeiden.

vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dämpfen und Staub schützen.

Einschalten

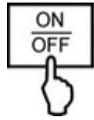


[Empty display box]

8.8.8.8.8



0.00 G

Ausschalten

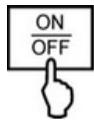


OFF



[Empty display box]


Wägen

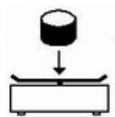


0.00 G

17.37 G

Tarieren

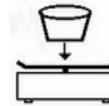

0.00 G

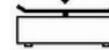

21.01 G




0.00 G



17.37 G



0.00 G

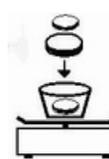

77.03 G



-38.38 G



0.00 G