

Montageanleitung

Drehstuhl 2203




Bestandteile:

- 5 Stück 1Rollen
- Stück 1 Fußkreuz
- 1 Stück Mittelabdeckung 2-tlg.
- 1 Stück Gasfeder
- 1 Stück Rücken mit Rückenstab
- Sitz mit Sitzträger

Rollen mit festem Handdruck in die Öffnung drücken. Darauf achten, das die Rollen fest eingerastet sind.(Bild 1)




Beide Teile der Fußkreuzabdeckung zusammenstecken. (Bild 2)

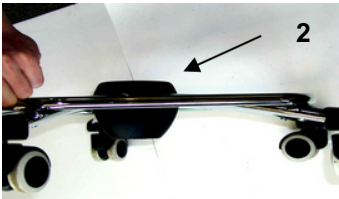

Gasfeder in das Fußkreuz einstecken (Bild 3)



Schraube aus Rückenstab herausdrehen, den Rückenstab durch Sitzträger schieben und anschließend die Schraube wieder eindrehen.(4)
Mit dem rechten Handrad am Sitzträger den Rückenstab fixieren.(5)

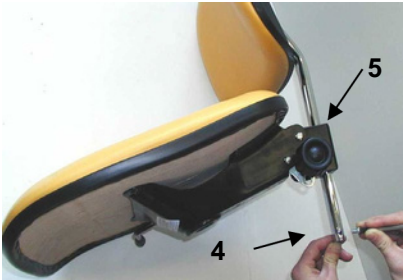

Vormontiertes Oberteil (Sitz und Rücken) auf Gasfeder stecken.(6)

Nach der Montage Stuhl kräftig belasten !!

