



SOFT 0 - 7

Attends Soft sind saugfähige und besonders diskrete Einlagen, die speziell für empfindliche Haut entwickelt wurden. Sie sind bei sehr leichter bis starker Harninkontinenz geeignet.



Anlegehinweise




Entfernen Sie den durchgängigen Abziehstreifen von der Rückseite der Einlage (Soft 0-4).

Entfernen Sie die beiden kurzen Abziehstreifen von der Rückseite der Einlage (Soft 5-7).



Befestigen Sie die Einlage mit der klebenden Seite in Ihrer möglichst enganliegenden Unterwäsche.

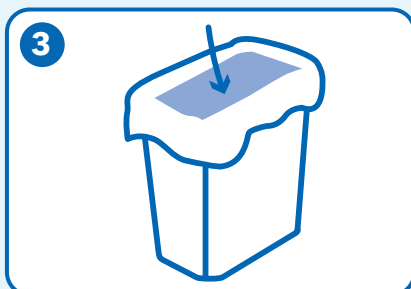

Rollen Sie das Produkt nach Gebrauch zusammen und entsorgen Sie es im Restmüll.

SOFT 0 - 7

Hinweise und Tipps

Produktauswahl

- Wählen Sie die passende Produktgröße und Saugstärke.
- Für eine optimale Produktleistung empfiehlt es sich, die Einlage in möglichst enganliegender Unterwäsche zu tragen.
- Durch die Auswahl des kleinstmöglichen Produktes und einer ausreichenden Saugstärke sparen Sie Abfall und reduzieren die Umweltbelastung im Vergleich zu einer unnötig hohen Saugstärke.

Entsorgung

- Rollen Sie das Produkt zusammen und entsorgen Sie es im Restmüll.
- Wenn vorhanden, können Sie zum Entsorgen das gebrauchte Produkt in eine frische Einzelverpackung einwickeln.
- Entsorgen Sie das Produkt auf keinen Fall über die Toilette.



Hautverträglichkeit bestätigt
von proderm Institut für
Angewandte Dermatologische
Forschung. Getestet im
Auftrag von Attends.