


Attends® Slip Active



Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends Slip Active ist geeignet für mobile aktive Personen mit starker Harn- und/oder Stuhlinkontinenz.

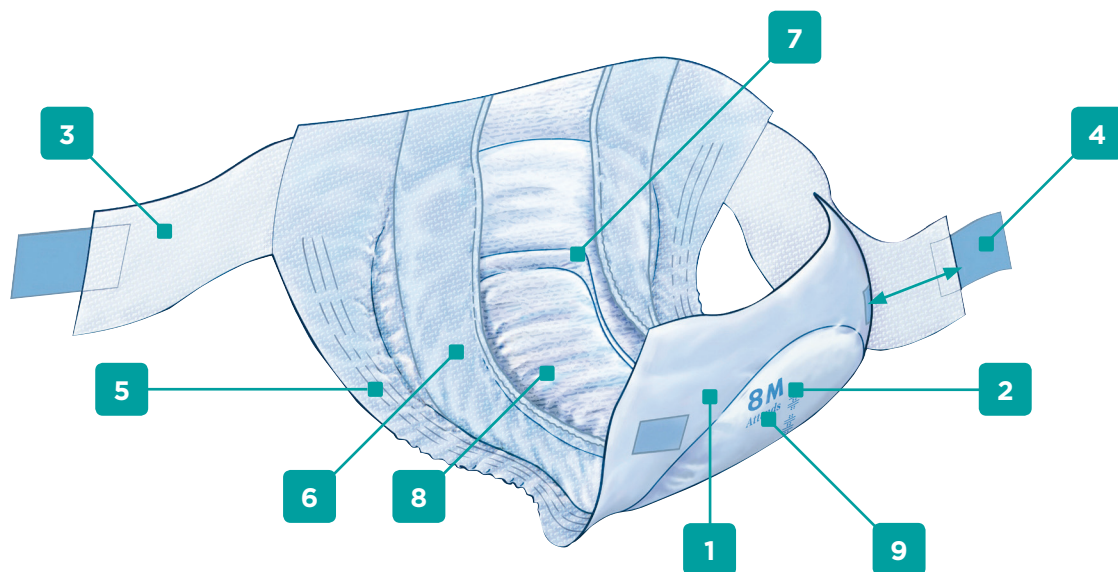

- | | | |
|---|---|--|
| 1 Weiße flüssigkeitundurchlässige Außenseite als Auslaufschutz. | 2 Der Nässeindikator auf der Rückseite zeigt durch Verschimmeln an, wann das Produkt gewechselt werden muss. | 3 Die atmungsaktiven textilartigen Seitenflügel lassen mehr Luft an die Haut. Das trägt zur Hautgesundheit bei. |
| 4 Durch den innovativen 2-Schritt-Verschluss lässt sich der Slip Active leicht und schnell anlegen. Mit Hilfe des Klettverschlusses den Slip vorfixieren, bei Bedarf korrigieren, dann mit den breiten Klebestreifen verschließen. | 5 Mit geformten Beinbündchen für bestmöglichen Sitz und Auslaufschutz. | 6 Auslaufsperrern sorgen für bestmöglichen Auslaufschutz. |
| 7 Anatomisch geformter Saugkern für eine bequeme Passform. | 8 Leistungsstarker Saugkern für verbesserten Auslaufschutz, optimale Hauttrockenheit und Geruchsbindung. | 9 Größe und Saugstärke sind diskret auf der Außenseite aufgedruckt. |

www.attends.de

www.attends.at

www.attends.ch

Absorption / Größe

		Stück / Beutel Stück / Karton Stück / Palette	EAN 7332152 Packung / Karton	PZN Packung/Karton	Hilfsmittelspositionsnummer	Bauch- / Hüftumfang in cm	Außenseite Material	Saugkern Material	Innenseite Material	Atmungsaktiv	Elastische Seitenbündchen	Auslaufsperrern	Wiederverschließbares Fixiersystem	Geruchsbindung (Odour Protection)	Quick-Dry Technologie
8	Attends Slip Active Medium	28 4 x 28 24 x 4 x 28	200728 200735	2525273 2534906	15.25.03.1215	75 - 110	Poly- ethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	Ja - Seitenflügel	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large	28 4 x 28 16 x 4 x 28	201329 201336	2553944 2553950	15.25.03.2233	100 - 145	Poly- ethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	Ja - Seitenflügel	✓	✓	✓	✓	✓
9	Attends Slip Active Medium	28 4 x 28 24 x 4 x 28	201503 201510	2553967 2883973	15.25.03.1216	75 - 110	Poly- ethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	Ja - Seitenflügel	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large	28 4 x 28 16 x 4 x 28	201381 201398	2553996 2554004	15.25.03.2234	100 - 145	Poly- ethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	Ja - Seitenflügel	✓	✓	✓	✓	✓
10	Attends Slip Active Medium	28 4 x 28 24 x 4 x 28	201404 201411	2554010 2554027	15.25.03.1217	75 - 110	Poly- ethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	Ja - Seitenflügel	✓	✓	✓	✓	✓
	Attends Slip Active Large	28 2 x 28 36 x 2 x 28	201428 201435	2585329 2717050	15.25.03.2235	100 - 145	Poly- ethylen	2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	Ja - Seitenflügel	✓	✓	✓	✓	✓



Quick-Dry

Die Quick-Dry Technologie wirkt direkt unterhalb der Vliesoberfläche des Produktes. Sie nimmt die Flüssigkeit schnell auf und leitet sie von der Haut weg in den eigentlichen Saugkern. Dort wird die Flüssigkeit sicher gebunden und eingeschlossen. Das Produkt kann auf diese Weise mehrere Flüssigkeitsschübe zuverlässig aufnehmen. Dies sorgt für Hauttrockenheit und Auslaufschutz auch bei längeren Tragezeiten.



pH-Wert

Das Quick-Dry-System mit Aktivfasern und Superabsorber sorgt für einen guten pH-Wert von 4,5. Somit unterstützt Attends die Hautgesundheit.



Active Zone

Die Active Zone im Schrittbereich sorgt für besonders hohe Saugfähigkeit dort, wo es darauf ankommt. So kann die Oberfläche schnell wieder abtrocknen. Dies sorgt für optimale Hauttrockenheit und vorbildlichen Auslaufschutz.



Geruchsbindung Odour Protection

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch werden unangenehme Gerüche vermieden.



Die Hautfreundlichkeit von Attends Slip Active ist von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, bestätigt worden.