




Anlegehinweise Attends Slip Active


Vorbereitung

1

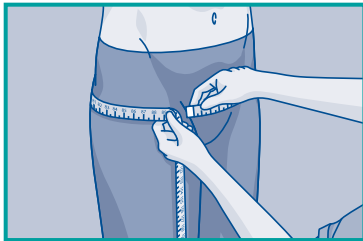


Messen Sie jeweils den Bauch- und den Hüftumfang. Nehmen Sie den höheren Wert und wählen Sie danach die Produktgröße aus.

2

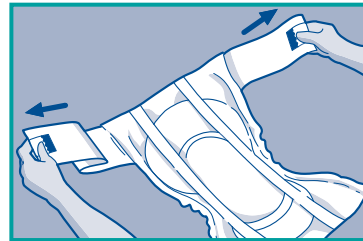

Nehmen Sie den Attends Slip aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass die Seitenflügel vollständig ausgeklappt sind.


3

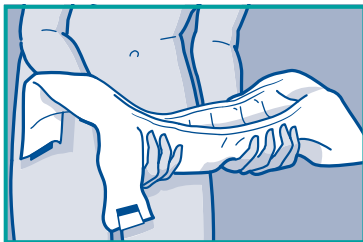

Formen Sie den aufsaugenden Teil des Produktes vorsichtig in Längsrichtung zu einem "Schiffchen", damit sich die Auslaufsperrn im Inneren aufrichten.

Anlegen

4

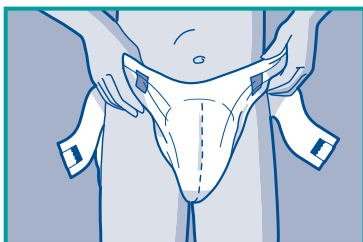


Positionieren Sie den Slip zwischen den Beinen so, dass im Leistenbereich die äußere Folienseite des Slips nicht nach innen gestülpt ist. Achten Sie darauf, dass der blaue Strich in der Mitte des Produktes (Nässeindikator) in Verlängerung der Wirbelsäule verläuft.

5



Führen Sie die beiden Seitenflügel der Körperform entsprechend seitlich schräg nach vorne und vorfixieren Sie sie mit dem Klettverschluss. Mehrmalige Korrekturen sind vor endgültiger Fixierung möglich, bis der Slip perfekt sitzt.

6

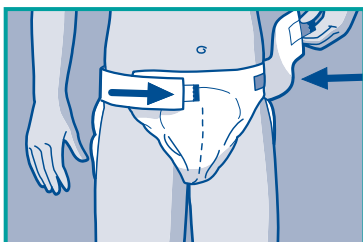


Danach den Slip mit den Klebestreifen vorne fixieren.


Zum nochmaligen Korrigieren des Sitzes nur die weiße, wiederverschließbare Lasche abziehen und auf das blaue Klebeband setzen.

7


Abhängig von der anatomischen Form des Benutzers können die Flügel:

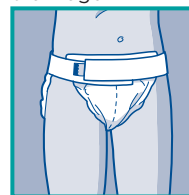

A. überlappen

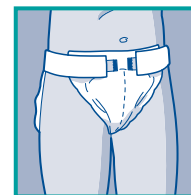

B. nah bei einander sein

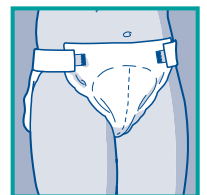

C. nah am Rand des Slips sein

Hinweise und Tipps

Produktauswahl

- Ziehen Sie die Wahl einer anatomischen Einlage mit Fixierhose in Betracht, bevor Sie einen Slip benutzen. Die Hautabdeckung ist geringer.
- Wählen Sie die Slipgröße nach dem Messen des Bauch- und Hüftumfangs - maßgebend ist die größere Größe.
- Wählen Sie die Saugstärke nach der Menge des ausgeschiedenen Urins. Starten Sie, mit der niedrigst möglichen Saugstärke.
- Slips sind auch für Menschen geeignet, die Einlagen herausziehen würden.

Produktwechsel

- Der Nässeindikator (blauer Strich auf der Produktrückseite) zeigt an, wie stark das Produkt ausgelastet ist. Der Strich beginnt anfangs zu verschwimmen, wenn er über die Hälfte komplett verschwunden ist, müssen Sie das Produkt wechseln.
- Saubere und trockene Slips können nach dem Toilettengang nochmals verwendet werden.
- Entfernen Sie den ausgelasteten Slip vom Gesäß her.
- Kleben Sie den Klebestreifen nicht auf die Haut.
- Reinigen Sie die Haut nach Ihren Richtlinien - immer von vorne nach hinten.
- Verwenden Sie keine Creme auf Öl-Basis und kein Puder. Diese Produkte könnten die Saugfähigkeit der Attends Slips beeinflussen.

Anlegen

- Stellen Sie sicher, dass die Folie des flexiblen Beinabschlusses außerhalb des Slips ist - dies hält die wasserdichte Rückseite weg von der Haut.
- Die Klebestreifen befinden sich beim Anlegen am rückwärtigen Produktteil.
- Die Anatomie des Benutzers entscheidet, ob die Flügel wie ein Gürtel angelegt werden oder doch mehr nach schräg unten positioniert werden.
- Wenn die Flügel überlappen, können der Klebestreifen auf dem Flügel fixiert werden.
- Wenn der Slip am liegenden Patienten fixiert wird, übernehmen Sie bitte die selbe Vorgehensweise wie im Stehen. Um sicherzustellen, dass der Slip in Position bleibt, legen Sie beim Drehen des Patienten auf die andere Seite eine Hand auf das Produkt im Rücken des Patienten.
- Benutzen Sie den Nässeindikator zum Zentrieren des Slips.

Auslaufschutz

- Prüfen Sie, ob Sie alle Hinweise zur Anwendung berücksichtigt haben.
- Prüfen Sie, ob Sie die richtige Produktgröße verwenden.
- Falls das Produkt ausläuft, sollten Sie erst dann zur nächst höheren Saugstärke wechseln, wenn Sie ausgeschlossen haben, dass es sich um einen Anlegefehler handelt.

Entsorgung

- Entsorgen Sie den Attends Slip Active über den Restmüll.
- Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.

Attends® Slip Active



Die Hautfreundlichkeit von Attends Slip Active ist von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, bestätigt worden.