


Attends® For Men

Level 1 & 2




Anlegehinweise Attends For Men

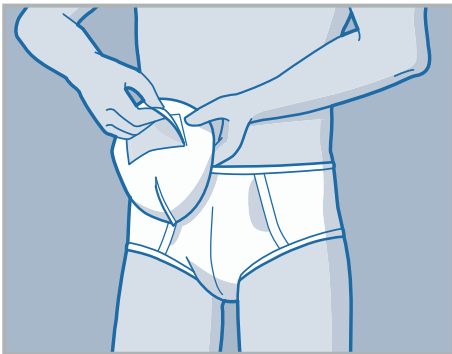

1 Halten Sie die Einlage beim Auffalten so, dass der breitere Teil oben ist (die Pfeile auf dem Abziehstreifen sollen nach oben zeigen). Entfernen Sie den Abziehstreifen.



2 Achten Sie beim Einlegen des Inkontinenzproduktes in Ihre Unterwäsche darauf, dass die „Schiffchenform“ beibehalten wird.

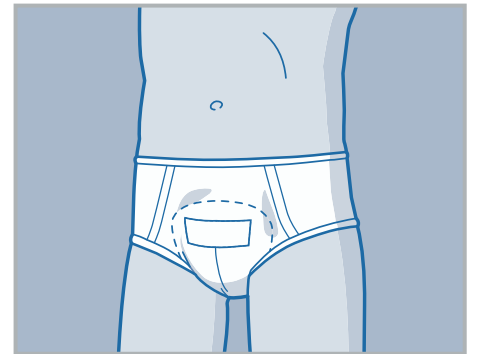

3 Befestigen Sie die Einlage mit dem Klebestreifen in Ihrer eng anliegenden Unterwäsche. Vergewissern Sie sich, dass der Klebestreifen die Unterwäsche und nicht die Haut berührt.

Hinweise und Tipps

Produktauswahl

- Wählen Sie die richtige Saugstärke aus.
- Verwenden Sie die Attends For Men Einlage mit eng anliegender Unterwäsche.
- Bitte keine weiten Unterhosen (Boxershorts) verwenden.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt über den Restmüll.
- Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.



Die Hautverträglichkeit von Attends For Men ist dermatologisch bestätigt durch proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung.

www.attends.de

www.attends.at


www.attends.ch

Attends® For Men

Level 3 & 4




Anlegehinweise Attends For Men

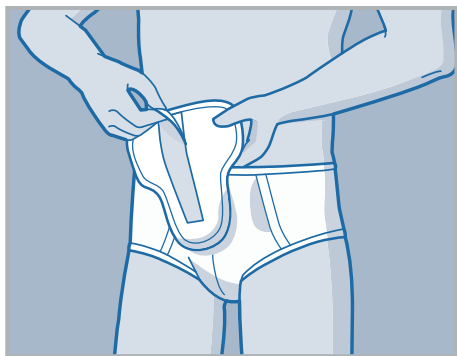

1 Halten Sie die Einlage beim Auffalten so, dass der breitere Teil oben ist (die Pfeile auf dem Abziehstreifen sollen nach oben zeigen). Entfernen Sie den Abziehstreifen.



2 Ziehen Sie die Einlage sorgfältig längs in eine „Schiffchenform“ um sicherzustellen, dass die Innenbündchen aufgerichtet werden und eine Schale bilden. Achten Sie beim Einlegen des Inkontinenzproduktes in Ihre Unterwäsche darauf, dass die „Schiffchenform“ beibehalten wird.

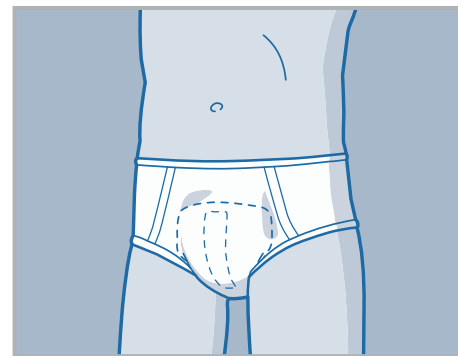

3 Befestigen Sie die Einlage mit dem Klebestreifen in Ihrer eng anliegenden Unterwäsche. Vergewissern Sie sich, dass der Klebestreifen die Unterwäsche und nicht die Haut berührt.

Hinweise und Tipps

Produktauswahl

- Wählen Sie die richtige Saugstärke aus.
- Verwenden Sie die Attends For Men Einlage mit eng anliegender Unterwäsche.
- Bitte keine weiten Unterhosen (Boxershorts) verwenden.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt über den Restmüll.
- Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.



Die Hautverträglichkeit von Attends For Men ist dermatologisch bestätigt durch proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung.

www.attends.de

www.attends.at

www.attends.ch