

Meliseptol® acute

Alkoholische Schnelldesinfektion für kleine Flächen

EIGENSCHAFTEN

- Für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen
- Ohne Amine, quaternäre Ammoniumverbindungen, Aldehyde
- Parfümfrei
- Breites Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid und fungizid
- Umfassend viruzid: behüllte Viren (inkl. HBV, HCV, HIV) und unbehüllte Viren (z.B. Polio-, Adeno-, Noro- und Polyomaviren)
- Einwirkzeit: 1 Minute (Bakterien, Mykobakterien, Hefepilze und Viren)
- Als Tränkflüssigkeit mit den B. Braun Wipes einsetzbar

VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

viruzid in 1 Minute



WIRKSPEKTRUM/EINWIRKZEITEN (EZ)

EINSATZGEBIET	NORM	EZ
Flächendesinfektion gemäß VAH	EN 13727 EN 13624 EN 13697 EN 16615 (4-Felder-Test)	1 Min.*
bakterizid/levurozid	EN 14348 EN 16615	1 Min.
tuberkulozid/mykobakterizid	EN 13624 EN 13697	15 Min. 30 Min.
fungizid	EN 14476	1 Min.
viruzid		

* Der kürzest mögliche Listungswert beim VAH beträgt 5 Min.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Meliseptol® acute aus der Dosierflasche auf ein Einmaltuch gießen und die Flächen vollständig benetzen. Oder die zu behandelnde Fläche bis zur vollständigen Benetzung mithilfe der Sprühflasche einsprühen und das Desinfektionsmittel mit einem Tuch verreiben. Einwirkzeiten siehe Tabelle. Die Flächen dürfen nicht trockengerieben werden. Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden. Alkohol- und säureempfindliche Materialien (z. B. Acrylglas) vorher auf ihre Beständigkeit gegenüber Meliseptol® acute prüfen.

Physikalisch-chemische Daten

Aussehen: klare Flüssigkeit
Geruch: alkoholartig
Dichte: 0,94 g/ml bei 20°C
pH-Wert: 2-3
Flammpunkt: +33,5°C

Hinweis:

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Für professionelle Verwendung.

Meliseptol® acute – Auszug aus den Produktinformationen

100 g Lösung enthalten: Propan-1-ol 39,0 g, Glykolsäure 0,98 g, Hilfsstoffe.
Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung:
Gefahr. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ausbringung max. 50 ml/m².

LIEFERFORM	VE	Art.-Nr.	PZN
250 ml-Sprühflasche	20	180241	16771053
250 ml-Dosierflasche	20	180242	16771047
750 ml-Sprühflasche	12	180243	16771076
1000 ml-Flasche	10	180244	16771082
5 Liter-Kanister	1	180245	16771099