

Meliseptol® pure

Alkoholische Schnelldesinfektion für kleine Flächen

Eigenschaften

- Für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen
- Ohne Amine, quaternäre Ammoniumverbindungen, Aldehyde
- Parfümfrei
- Breites Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid und mykobakterizid
- Begrenzt viruzid PLUS: behüllte Viren plus Adeno-, Noro- und Rotaviren
- Einwirkzeit: ab 1 Minute
- Als Tränkflüssigkeit mit den B. Braun Wipes einsetzbar

VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

Wirkenspektrum/Einwirkzeiten (EZ)

Einsatzgebiet	Norm	EZ
Flächendesinfektion gemäß VAH bakterizid/levurozid	EN 13727 EN 13624 EN 13697 EN 16615 (4-Felder-Test)	1 Min.
tuberkulozid/mykobakterizid	EN 14348	1 Min.
begrenzt viruzid	EN 14476 EN 16777	30 Sek. 1 Min.
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476 EN 16777	30 Sek. 5 Min.

Physikalisch-chemische Daten der Tränklösung:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit
Geruch: alkoholartig
Dichte: 0,93 g/ml bei 20°C
pH-Wert: ca. 7
Flammpunkt: +23°C

Meliseptol® pure – Auszug aus den Produktinformationen:

100 g Lösung enthalten: Ethanol 44,0 g, Hilfsstoffe.
Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Ausbringung max. 50 ml/m².
Hinweis: Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Für professionelle Verwendung.

begrenzt viruzid PLUS



Hinweise zur Anwendung und Dosierung

Meliseptol® pure aus der Dosierflasche auf ein Einmaltuch gießen und die Flächen vollständig benetzen. Oder die zu behandelnde Fläche bis zur vollständigen Benetzung mithilfe der Sprühflasche einsprühen und das Desinfektionsmittel mit einem Tuch verreiben. Einwirkzeiten siehe Tabelle. Die Flächen dürfen nicht trockengerieben werden. Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden. Nicht geeignet für Acrylglas und andere alkoholempfindliche Oberflächen.

Lieferform	VE	Art.-Nr.	PZN
250 ml-Sprühflasche	20	180397	19396733
1000 ml-Handsprühflasche*	10	180398	19396727
1000 ml-Flasche	10	19927	12643246
5 Liter-Kanister	1	19958	13571885

* Sprühkopf bitte zusätzlich bestellen