
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


B. Braun Wipes mini ECO

Kleines nachfüllbares Vliestuchspendersystem

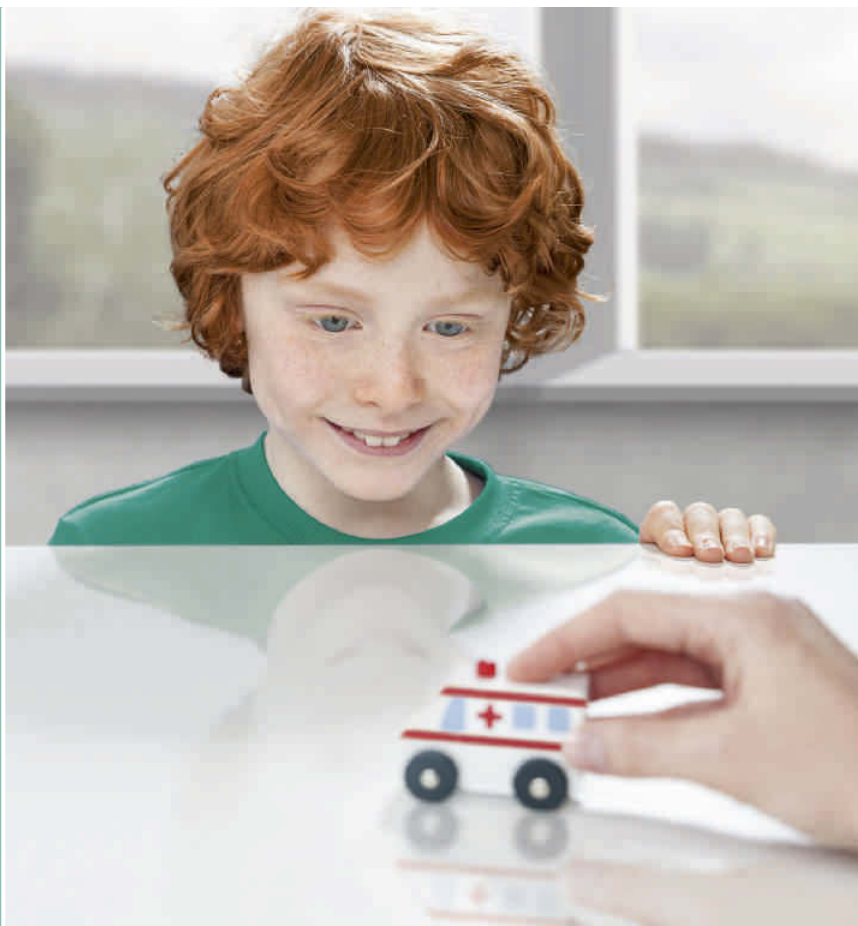

Hygiene



B. Braun Wipes mini ECO

Kleines nachfüllbares Vliestuchspendersystem

Nachfüllbare Tuchspenderdose zum Befüllen mit ca. 0,7 Liter Desinfektionsmittellösung

Tuchrolle mit 60 trockenen Tüchern

Synthetisches Vliesmaterial (100 % PET)

Tuchgröße 15 x 20 cm

Geprüfte B. Braun Desinfektionsmittel: Hexaquart® forte, Hexaquart® plus / lemon fresh, Melsept® SF, Meliseptol® rapid, Meliseptol® Foam pure, Helipur® H plus N

4 Wochen Haltbarkeit der angesetzten Gebrauchslösung mit den B. Braun Wipes mini ECO

Den Tuchrollen liegt ein Aufkleber zum Beschriften des Spenders bei:

B. Braun Wipes mini ECO Салфетки флисовые B. Braun mini ECO Enthält gebrauchsfertige Reinigungs- / Desinfektionslösung		
Produktname: Product name: Nom du Produit: Название дез. средства:	LOT: REF: PZN: 10312255	19725
Konzentration: Concentration: Concentration: Концентрация дез. средства:	Einwirkzeit: Action time: Temps d'action: Время действия:	haltbar bis: Use by: de préf. avant fin: Использовать до:
angesetzt am: Filled on: Date d. rempliss.: Дата розлива:	Name: Name: Nom: Ф.И.О.:	
B BRAUN Nachfüllbarer Desinfektionstuchspender / Refillable Fleece Wipe Dispenser / Distributeur rechargeable de lingettes en non-tissé		

Produkt	Lieferform	Art.-Nr.	PZN
B. Braun Wipes mini ECO	Spenderdose mit blauem Deckel (ohne Vliesrolle)	19182	10312249
	Vliesrolle mit 60 Tüchern	19725	10312255



Hinweise zur Anwendung und Dosierung

1. Handschuhe tragen
2. Vliesrolle einsetzen
3. Circa 0,7 Liter gebrauchsfertige Lösung einfüllen und von der Mitte nach außen über die Vliesrolle gießen; 10 Minuten warten, bis die Vliesrolle vollständig durchtränkt ist
4. Vliestuch durch den Deckel führen; das erste Tuch werfen; Deckel unmittelbar nach der Tuchentnahme wieder verschließen
5. Aufkleber beschriften und aufkleben

Geprüfte B. Braun Desinfektionsmittel

Die in der Tabelle gelisteten B. Braun Produkte sind mit den B. Braun Wipes mini ECO-Vliestüchern geprüft. Die B. Braun Wipes mini ECO-Vliestücher lagern den Desinfektionswirkstoff nicht an, sondern geben ihn an die zu desinfizierende Fläche ab.

B. Braun Produkt	Mindestkonz.	EZ	Haltbarkeit der angesetzten Gebrauchslösung
Hexaquart® forte	0,5 %	60 Min.	4 Wochen
Hexaquart® plus	0,5 %	60 Min.	4 Wochen
Hexaquart® plus lemon fresh	0,5 %	60 Min.	4 Wochen
Melsept® SF	1,0 %	60 Min.	4 Wochen
Meliseptol® rapid	konz.	1 Min.	4 Wochen
Meliseptol® Foam pure	konz.	1 Min.	4 Wochen
Helipur® H plus N	4,0 %	15 Min.	4 Wochen