


B. Braun Wipes – nachfüllbarer Vliestuchspender

Eigenschaften

- nachfüllbarer Vliestuchspender
- zum Befüllen mit ca. 2,5 Liter Desinfektionsmittellösung
- Vliesrolle mit 100 Tüchern à 19 × 36 cm
- bequeme Entnahme der einzeln abreißbaren B. Braun Wipes
- wiederverschließbarer Deckel schützt vor Kontamination und Verdunsten der Lösung
- sparsam im Verbrauch von Tüchern und Anwendungslösung
- saugfähige und fusselfreie Tücher, die den Desinfektionswirkstoff sicher an die zu desinfizierende Fläche abgeben
- mit B. Braun Flächendesinfektionsmitteln geprüft

Hinweise zur Anwendung und Dosierung

1. Handschuhe tragen; Vliestuchrolle einsetzen
2. Circa 2,5 Liter gebrauchsfertige Lösung einfüllen und von der Mitte nach außen über die Vliesrolle gießen; 10 Min. warten, bis die Vliesrolle vollständig durchtränkt ist
3. Vliestuch durch den Deckel führen; das erste Tuch werfen; Deckel immer unmittelbar nach Tuchentnahme wieder verschließen; Aufkleber beschriften und aufkleben

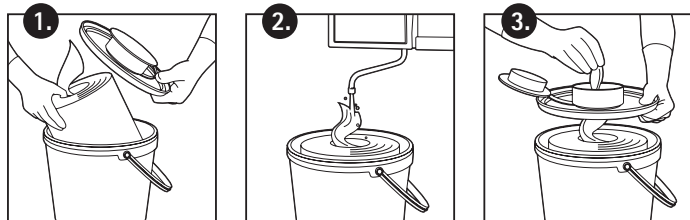

+ praktisch und sparsam



Weitere Hinweise

Wenn alle Vliestücher aufgebraucht sind oder das Haltbarkeitsdatum der gebrauchsfertigen Lösung erreicht ist, kann das Spendersystem neu befüllt werden. Vorher alle Oberflächen des B. Braun Wipes Spendersystems gründlich mit einem in Desinfektionsmittellösung getränkten Tuch reinigen, desinfizieren und trocknen lassen. Grundsätzlich dafür eine frisch zubereitete oder gebrauchsfertige alkoholische Desinfektionsmittellösung verwenden. Einwirkzeit der Desinfektionsmittellösung beachten.

Geprüfte B. Braun Desinfektionsmittel

Die in der Tabelle gelisteten B. Braun Produkte sind mit dem B. Braun Wipes Spendersystem geprüft. B. Braun Wipes Vliestücher lagern den Desinfektionswirkstoff nicht an, sondern geben ihn an die zu desinfizierende Fläche ab.

Das eingefüllte Desinfektions- und/oder Reinigungsmittel muss mit dem B. Braun Wipes Spendersystem sowie den B. Braun Wipes Vliesrollen kompatibel sein. Lassen Sie sich die Kompatibilität vom Hersteller der Desinfektions- und Reinigungsmittel bescheinigen.

B. Braun Produkt	Mindestkonz.	EZ	Haltbarkeit der angesetzten Gebrauchslösung
Hexaquart® forte	0,5 %	60 Min.	4 Wochen
Hexaquart® plus	0,5 %	60 Min.	4 Wochen
Hexaquart® plus lemon fresh	0,5 %	60 Min.	4 Wochen
Melsept® SF	1,0 %	60 Min.	2 Wochen
Meliseptol® rapid	konz.	1 Min.	4 Wochen
Meliseptol® Foam pure	konz.	1 Min.	4 Wochen

Lieferform

REF

PZN

Spendersystem mit blauem Deckel (ohne Vliesrolle)

19162

06067637

Vliesrolle mit 100 Tüchern

19164

06067643