
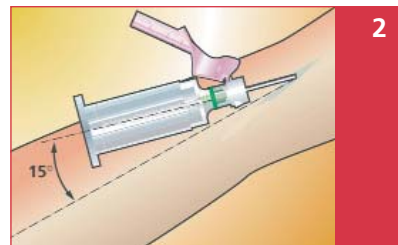



Sichere venöse Blutentnahme mit dem BD Vacutainer® Blutentnahmesystem

Empfohlene Handhabung der BD Eclipse™ Sicherheitskanüle

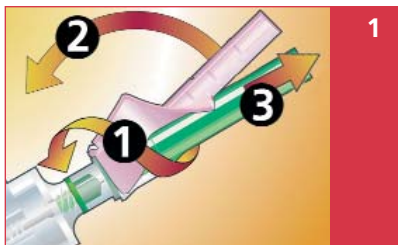



1. Die Kanüle in den Haltern drehen ❶, das lilafarbene Schutzschild nach hinten legen ❷ und die Kanülenkappe entfernen ❸.

2. Die Venenpunktion wie üblich am gesenkten Arm mit Halter und Kanüle durchführen.

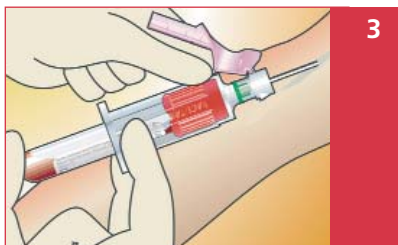



3. Den Halter mit der linken Hand fixieren, Röhrchen in den Halter einführen und Vakuum (durch vollständiges Eindrücken in den Halter) freigeben. Wurde die Vene getroffen, fließt Blut sofort in das Röhrchen.

4. Das gefüllte Röhrchen aus dem Halter nehmen. Gegendrückt mit dem Daumen der rechten Hand gegen die Griffplatte des Halters erleichtert das Herausnehmen des Röhrchens.

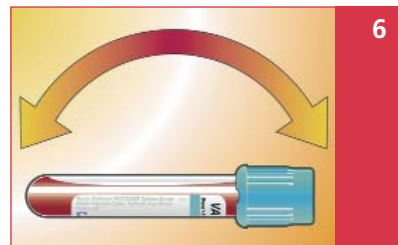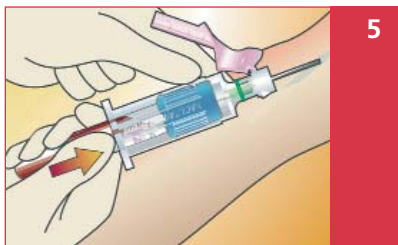

5. Wechsel des Röhrchens für die Entnahme weiterer Proben. Das Ventil verhindert einen Blutaustritt aus der Kanüle.

6. Alle Röhrchen sofort nach der Blutentnahme leicht schwenken. Nicht schütteln!

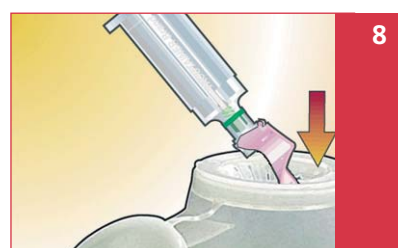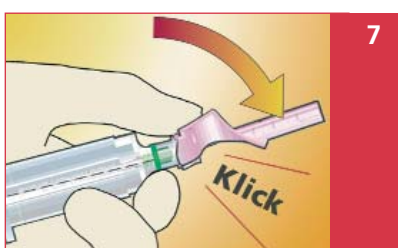

7. Die Kanüle aus der Vene ziehen und das lilafarbene Schutzschild durch Drücken des Daumens oder Zeigefingers auf die Grifffläche aktivieren bis es einrastet.

8. Entsorgung des gesamten Blutentnahmesystems in eine entsprechende Entsorgungsbox.