

BD Neoflon™ Pro Venenverweilkatheter

Handhabung und Tipps für eine erfolgreiche Punktion



Tipps für eine erfolgreiche Punktion

Erfolgreiche Punktion

- Halten Sie während der Punktion und beim Vorschieben des Katheters die Haut straff und stabilisieren Sie das Gefäß
- Verringern Sie den anfänglichen Punktionswinkel und halten Sie Ihren Ellbogen in einer niedrigen Position
- Nach dem ersten Blutrückfluss im Katheter verringern Sie den Winkel und schieben Sie die gesamte Einheit etwas vor

Visueller Blutrückfluss

- Der Blutrückfluss ist entlang des Katheters sichtbar. Der sekundäre Rückfluss wird nun in der Rückflusskammer erkennbar.
- Achten Sie auf Patientenfaktoren wie kleine Venen, den Zustand der Venen, Dehydration, Hypovolämie, Hypotonie, Polyzythämie etc., die gegebenenfalls den Blutrückfluss beeinträchtigen können.

Leichtes Einführen in das Gefäß

- Verringern Sie den Punktionswinkel nach dem ersten Blutrückfluss und schieben Sie die gesamte Einheit etwas vor; schieben Sie erst dann den Katheter von der Kanüle
- Vermeiden Sie es, die Kanüle herauszuziehen, während Sie den Katheter vorschieben
- Halten Sie die Haut weiterhin gestrafft

Sicherheitshinweis

- Setzen Sie niemals die Kanüle wieder in den Katheter ein, da dies den Katheter beschädigen könnte



BD Neoflon™ Pro Venenverweilkatheter 24 Gauge



BD Neoflon™ Pro Venenverweilkatheter 26 Gauge



BD Neoflon™ Pro Venovenverweilkatheter

Handhabung

Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Komponenten während des gesamten Verfahrens zugänglich sind
- Bereiten Sie die Punktionsstelle entsprechend der Vorgaben Ihrer Einrichtung vor

Venenpunktion

- Stabilisieren Sie das Gefäß und führen Sie die Venenpunktion durch
- Beobachten Sie den Katheter, um den anfänglichen Blutrückfluss festzustellen, der einen erfolgreichen Gefäßeintritt bestätigt; der zweite Blutrückfluss in die Rückflusskammer des Katheters bestätigt einen kontinuierlichen venösen Zugang beim Vorschieben des Katheters

Vorschieben in die Vene

- Nach dem visuell bestätigten Blutrückfluss verringern Sie den Punktionswinkel, sodass der Katheter nun beinahe parallel zur Haut ausgerichtet ist.
- Schieben Sie die Einheit aus Katheter und Kanüle leicht nach vorne, um sicherzustellen, dass sich die Katheterspitze in der Vene befindet
- Stabilisieren Sie Haut und Gefäß und schieben Sie den Katheter von der Kanüle herunter und in das Gefäß. Vermeiden Sie es, die Kanüle während des Kathetervorschubs herauszuziehen

Entfernen der Kanüle

- Entfernen Sie die Staumanschette, falls diese verwendet wurde
- Stabilisieren Sie den Katheter vorsichtig und okkludieren Sie das Gefäß, um den Blutrückfluss zu minimieren
- Entfernen Sie die Kanüle und entsorgen Sie sie sofort in einen durchstich- und leckagesicheren Kanülenabwurfbehälter
- Schließen Sie nun erforderliches Zubehör an

Stabilisierung

- Entfernen Sie die Flügelabdeckung und breiten Sie die Flügel aus
- Fixieren Sie den Katheter am Patienten
- Legen Sie einen sterilen Verband entsprechend des Pflegestandards Ihrer Einrichtung an



Deutschland: BD · Tullastr. 8 – 12 · 69126 Heidelberg · Tel. 06221 305 0
Österreich: BD · Rinnböckstr. 3 · 1030 Wien · Tel. 01 7063660 0
Schweiz: BD · Postfach 2350 · 4002 Basel · Tel. 061 485 22 22

bd.com

BD, das BD Logo und Neoflon sind Marken der Becton, Dickinson and Company oder der BD-Tochtergesellschaften.
© 2019 BD. Alle Rechte vorbehalten. 0000CF04061/DE Ausgabe Mai 2019.

