


BD Sentry™ Sicherheitslanzette

...zur Punktion der Fingerbeere

- **einfach**
- **ergonomisch**
- **sicher**

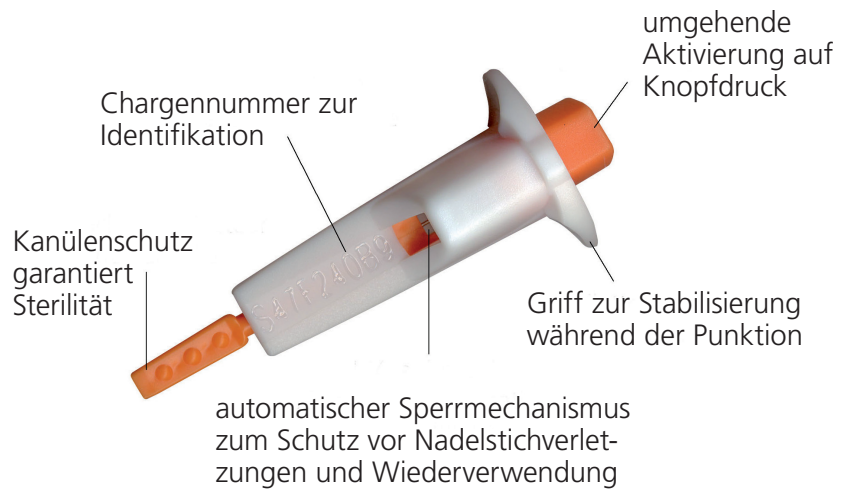


Farbe	Art.-Nr.	Beschreibung	PZN
	369528	1,5mm x 28G (0,36mm)	04948374




BD

Helping all people
live healthy lives


Handhabungshinweise

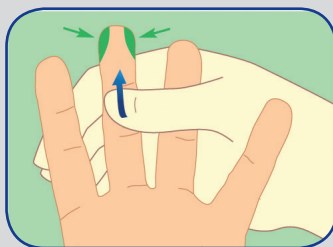

Reinigen Sie die
Punktionsstelle.

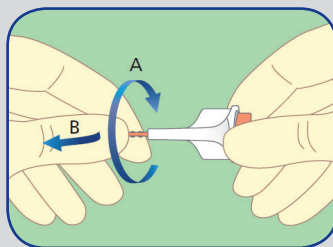

Drehen Sie den Kanü-
lenschutz (A) und ziehen
Sie ihn ab (B).

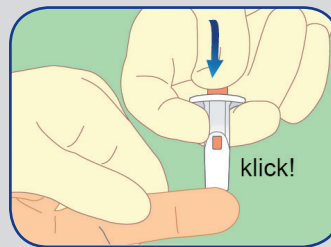

Positionieren Sie die Lan-
zette an der gewünsch-
ten Stelle und drücken
Sie auf den Auslöser.
Nach erfolgreicher Punktion
hören Sie ein Klicken. Die
Nadel zieht sich automa-
tisch ins Gehäuse zurück.



Entsorgen Sie die Lan-
zette in einem Kanülen-
abwurfbehälter entspre-
chend den Vorschriften
Ihrer Einrichtung.