

# HARTMANN



## Bacillo® 30 Sensitive Tissues

Materialschonende Reinigungs- und Desinfektionstücher  
für sensible Oberflächen



CE 0482

### Anwendungsgebiete

Die mit Bacillo® 30 Sensitive Foam getränkten gebrauchsfertigen Desinfektionstücher Bacillo® 30 Sensitive Tissues aus dem Flowpack, benetzen die Flächen hervorragend und wirken schnell, sogar auf empfindlichen Oberflächen.

### Wirksamkeit

bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS

\* Das weltweit führende Inspektions-, Verifizierungs-, Prüf- und Zertifizierungsunternehmen

\*\* sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

### Produkteigenschaften

- Schnell wirksam
- Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- ECARF-zertifiziert: professionelles Allergiker und Asthmatiker freundliches Flächen-desinfektionsmittel
- SGS Institut Fresenius\* zertifiziert: Flächen-Desinfektionsmittel mit sehr guter Hautverträglichkeit
- Besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Materialien wie: Polycarbonat (PC), Acrylglass (PMMA) und Polysulfon
- Ohne Handschuhe anwendbar\*\*
- Gute Reinigungseigenschaften




### In dieser Variante mit

- 100 % plastikfreie Tücher
- Frei von Mikroplastik



| Wirksamkeit                               | Prüfmethode                          | Belastung             | Einwirkzeit |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Bakterien / Pilze</b>                  |                                      |                       |             |
| Bakterizidie / Levurozidie                | VAH / EN 16615 / EN 13727 / EN 13624 | hoch                  | 1 Min.      |
| Tuberkulozidie / Mykobakterizidie         | EN 14348                             | hoch                  | 3 Min.      |
| <b>Viren</b>                              |                                      |                       |             |
| Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV) | DVV / RKI / EN 16777                 | hoch                  | 1 Min.      |
| Begrenzt viruzid PLUS                     | EN 14476                             | hoch                  | 30 Min.     |
| Norovirus                                 | EN 14476                             | hoch                  | 2 Min.      |
| Rotavirus                                 | EN 14476                             | gering                | 1 Min.      |
| <b>Lebensmittel / Industrie</b>           |                                      |                       |             |
| Bakterizidie / Levurozidie                | EN 13697                             | gering / hoch (20 °C) | 1 Min.      |

# Bacillol® 30 Sensitive Tissues

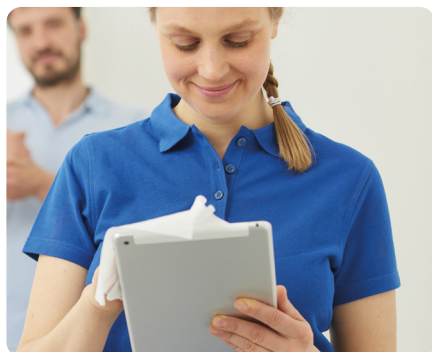

## Anwendung

Oberflächen mit den Bacillol® 30 Sensitive Tissues sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung achten, damit der optimale Desinfektionserfolg gewährleistet ist. Aufgrund ihrer Zusammensetzung können die Bacillol® 30 Sensitive Tissues auch ohne den Gebrauch von Handschuhen eingesetzt werden, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen. Nicht zur Hautreinigung verwenden. Nach Gebrauch Tissue der Abfallentsorgung zuführen. Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tücherverpackung direkt nach Gebrauch wieder verschließen.

## Haltbarkeit nach Anbruch

In geöffnetem und wieder fest verschlossenem Flowpack: 3 Monate.

## Zusammensetzung

Wirkstoffe der Tränklösung:  
Ethanol 140 mg/g; Propan-2-ol 100 mg/g; Propan-1-ol 60 mg/g, Amine, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-, Reaktionsprodukte mit Chloressigsäure (CAS-Nr. 139734-65-9) 2 mg/g

## Listung

VAH, IHO-Desinfektionsmittelliste

## Chemisch-physikalische Daten

Die Angaben beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit Bacillol® 30 Sensitive Foam:  
Flammpunkt (DIN EN ISO 3679) 30 °C  
Dichte (20 °C) ca. 0,95 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert (20 °C): ca. 8

## Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: [science-center@hartmann.info](mailto:science-center@hartmann.info)



**Wir forschen für  
den Infektionsschutz**  
[hartmann-science-center.com](http://hartmann-science-center.com)

| Produktname                                  | Packungsinhalt                 | Artikelnummer | PZN      | Versand-Einh.<br>Packungen |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----------------------------|
| <b>Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues</b>  | 120 Tücher<br>Größe 17 x 20 cm | 981 943       | 18851738 | 6                          |
| <b>Bacillol® 30 Sensitive Tissues</b>        | 80 Tücher<br>Größe 18 x 20 cm  | 981 693       | 16401468 | 6                          |
|                                              | 24 Tücher<br>Größe 18 x 20 cm  | 981 866       | 16401480 | 12                         |
| <b>Bacillol® 30 Sensitive Tissues in XXL</b> | 40 Tücher<br>Größe 25 x 38 cm  | 981 865       | 16401474 | 6                          |
| <b>Flowpack Wandhalter</b>                   | 1 Wandhalter                   | 981 205       | 09397045 | 1                          |
| <b>Flowpack-Halter flex</b>                  | 1 Halter                       | 981 899       | -        | 10                         |

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

*Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 Heidenheim  
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0  
Fax +49 (0) 7321-36-36  
[info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg  
Ein Unternehmen der HARTMANN GRUPPE