




BCM700 Zentrales Überwachungssystem Kurzanleitung

Die Auflösung muss 1920 x 1080 oder höher sein

1. BCM700 Programminstallation

(1) Wenn die Installation durch Ausführen der Installationsdatei abgeschlossen ist, wird eine Verknüpfung für den BCM700 auf dem Desktop erstellt

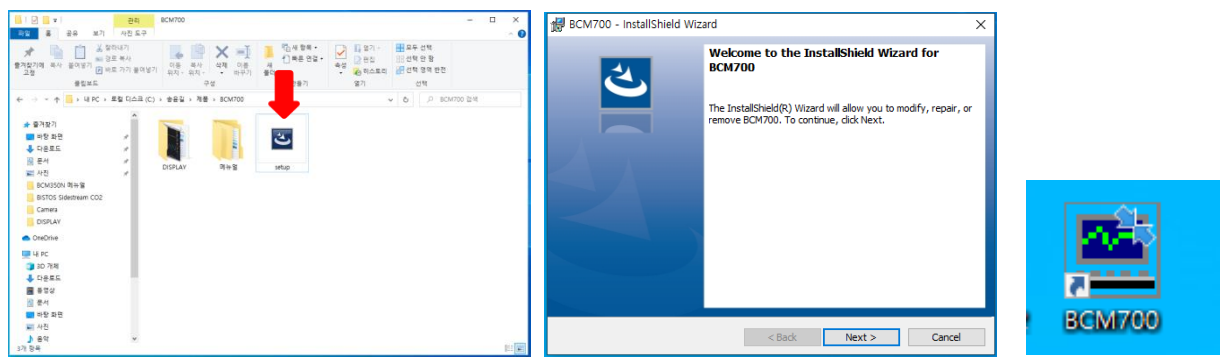


(2) Wenn Sie mit einem Doppelklick auf das Symbol das BCM700-Programm starten, wird folgender Bildschirm angezeigt.




2. CMS-Einstellung

(1) Bitte klicken Sie auf das Symbol mit dem Pfeil unten links auf dem Bildschirm.

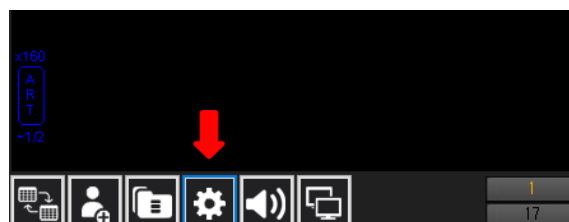


(2) Bitte klicken Sie im Setup-Menü auf "Kommunikation".

Bitte wählen Sie die Bettnummer, geben Sie die IP des Gerätes ein und klicken Sie auf "Speichern".

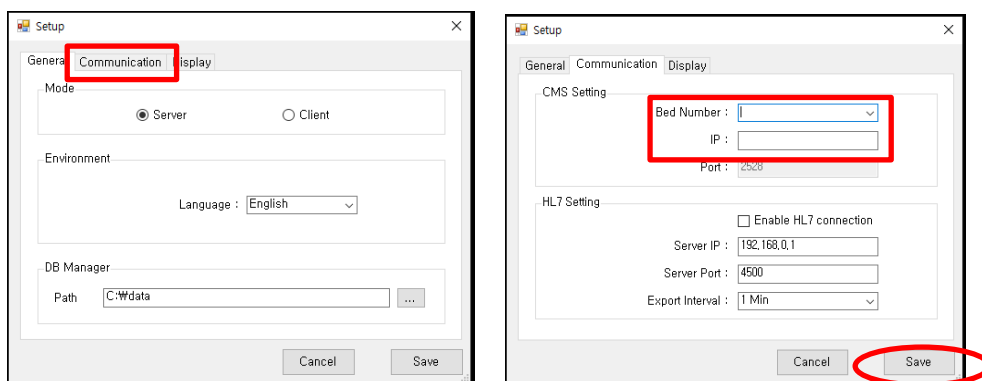


(3) Klicken Sie bitte auf "OK" und führen Sie das Programm erneut aus.

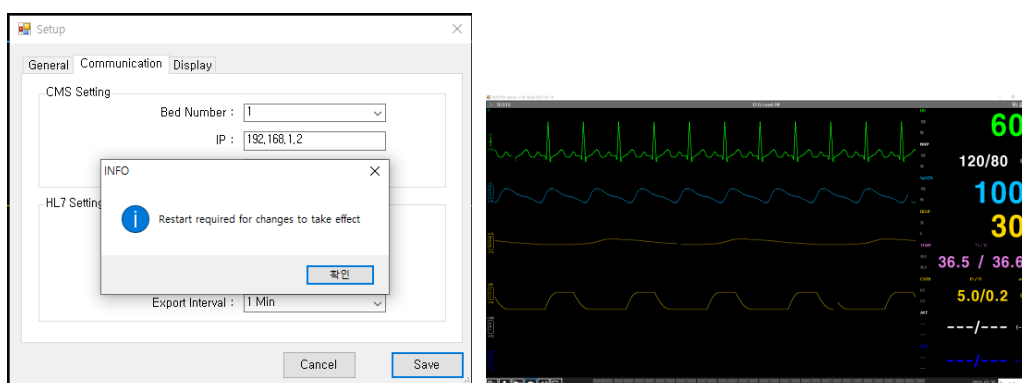

3. Patientenregistrierung

(1) Bitte klicken Sie auf das Symbol mit dem Pfeil unten links auf dem Bildschirm.

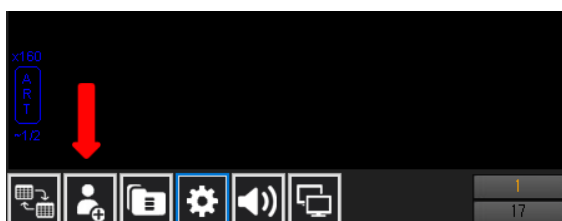

Bitte klicken Sie auf "Neu", geben Sie Patienteninformationen ein und klicken Sie auf "Erstellen".

The left screenshot shows the 'Patient Registration' window with search filters and a table. The 'New' button at the bottom is circled in red. The right screenshot shows the same window with the 'Patient Info' dialog box open, where the 'Create' button is circled in red.

(2) Wenn Sie auf "Suchen" klicken, können Sie die Liste der angemeldeten Patienten überprüfen.

The screenshot shows the 'Patient Registration' window with a list of patients. A red box highlights the first three rows of the table:

Study ID	Surname	Name	Gender	Birthday	Reg. Date
1234	P1	TEST1	Male	2021/02/02	2021/02/02
S202102200000	P1	TEST1	Male	2021/02/02	2021/02/02
S202102200000	P1	TEST1	Male	2021/02/02	2021/02/02

4. Patientenzuweisung


(1) Bitte klicken Sie auf das Symbol mit dem Pfeil oben rechts auf dem Bildschirm.



(2) Bitte klicken Sie auf "Suchen", wählen Sie den zu überwachenden Patienten aus und klicken Sie auf "Aufnehmen".

The left screenshot shows the 'Patient Registration' window with the 'Find' button circled in red. The right screenshot shows the same window with the 'Admit' button circled in red.

Wenn Sie auf "Ja" klicken, wird der ausgewählte Patientename oben links angezeigt.

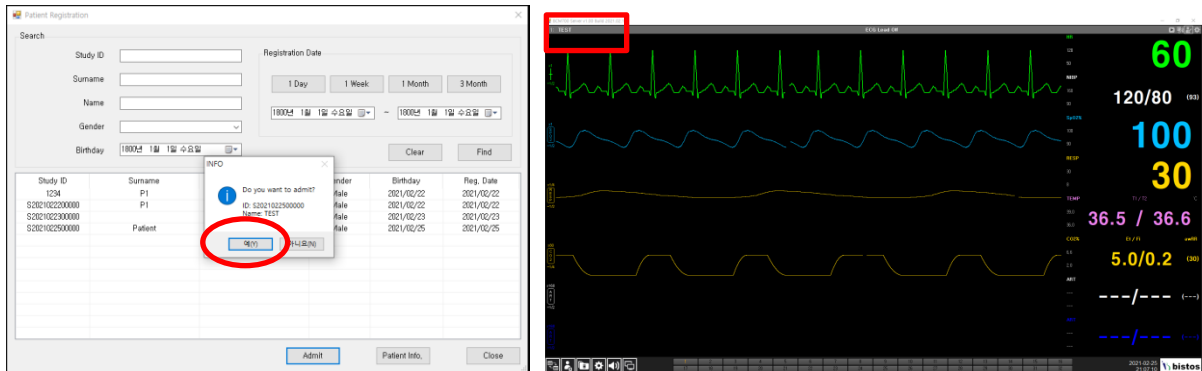

(3) Wenn Sie den Patienten wechseln möchten, können Sie dies über den Prozess der Patientenzuweisung tun.

5. Menü Betteneinstellung

Sie ändern die Einstellung für jedes Bett.

Bitte klicken Sie auf das Symbol mit dem Pfeil oben rechts auf dem Bildschirm.



(1) Sie können Wellenform, Verstärkung, Geschwindigkeit und Parameter in der Anzeigeeinstellung ändern.




Wellenform: AN/AUS

Geschwindigkeit : 1/8, 1/4, 1/2, 1

Parameter : AN/AUS

(2) Sie können die manuelle und automatische Messung der NIBP im Programm verwenden.

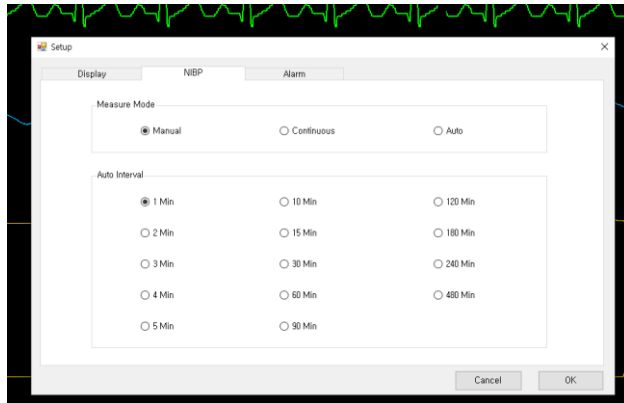

Sie können die Intervallzeiteinstellung verwenden, wenn Sie die automatische Messung nutzen. " 1Min, 2Min, ~, 480Min"

(3) Wenn Sie auf das Symbol mit dem Pfeil klicken, können Sie die manuelle und automatische NIBP-Messung verwenden


Bitte beachten Sie (2) in Abschnitt 5 für die manuelle/automatische Einstellung.




6. Einstellungen der Bildschirmansicht

(1) Einzel-/Mehrfachansicht

Sie können die Einzel- und die Mehrfachansicht anzeigen, indem Sie auf das durch einen Pfeil gekennzeichnete Symbol klicken.

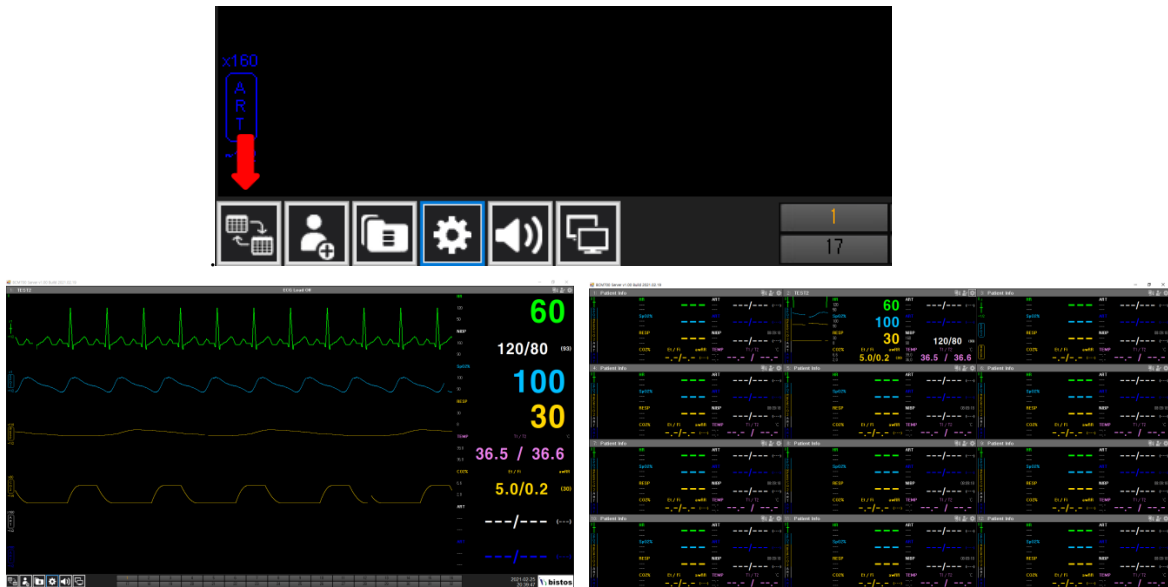


Sie können Betten hinzufügen oder löschen, indem Sie auf die Bettnummer am unteren Rand des Bildschirms klicken. Die hinzugefügte Bettnummer wird hervorgehoben.

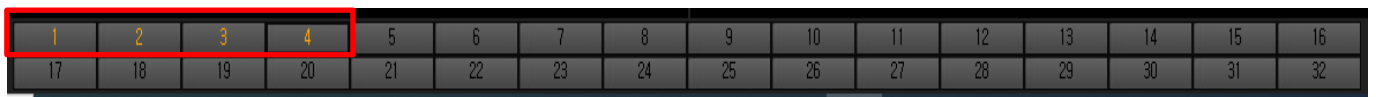

(2) DUAL-Bildschirmansicht

Wenn Sie auf das mit dem Pfeil gekennzeichnete Symbol klicken, wird der Dual-Bildschirm angezeigt. Sie können den Dual-Bildschirm schließen, indem Sie auf "Beenden" klicken.

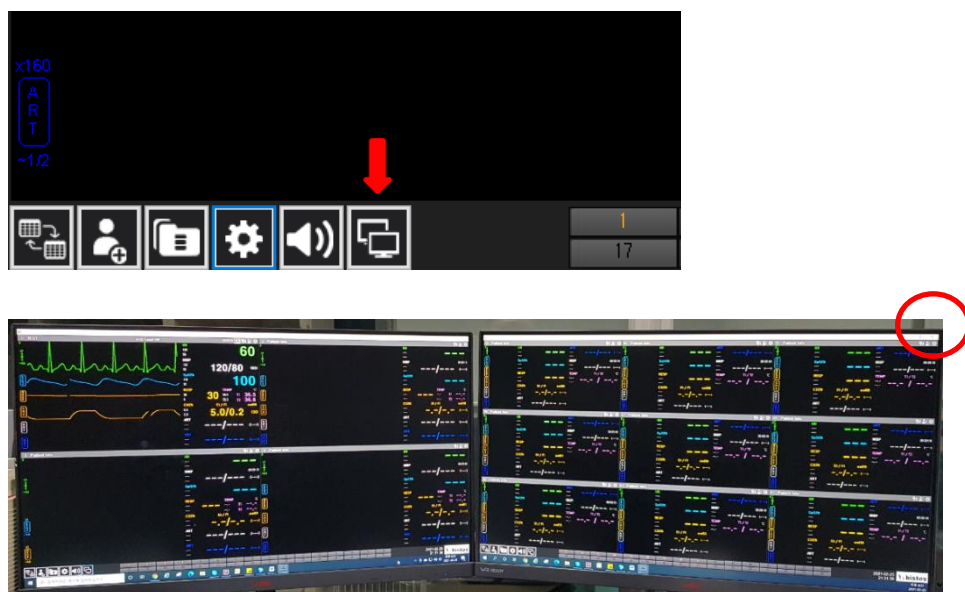

7 Aktenverwaltung

Klicken Sie auf das mit dem Pfeil gekennzeichnete Symbol, klicken Sie dann auf "Suchen" und es erscheint eine Patientenliste.

Sie können das Ergebnis des Patiententests überprüfen, indem Sie auf "Überprüfung" klicken

Sie können Daten ausdrucken, indem Sie auf "Drucken" klicken.



Kontaktinformationen

Hersteller	Bistos Co.,LTD
	116~122 3th Factory, Jungang inthespia 3cha, Jungwon-Gu, Sungnam-si, Gyeonggi-do
Kontakt	031-750-0340
Fax	031-750-0344
Homepage	www.bistos.co.kr
E-Mail	bistos@bistos.co.kr