

CoaguChek® Pro II

PRO II



INR- und %Quick-Messung
für PROFis

CoaguChek® Pro II

INR- und %Quick-Messung für PROFIS



Abrechnung:*

EBM	GOÄ
32026	353
4,70 €	8,04 €*

Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten

Im Rahmen der Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten haben Sie jederzeit die Möglichkeit der Bestimmung des Gerinnungsstatus. Dies erhöht die Transparenz der gerinnungshemmenden Therapie.

INR-Bestimmung im Praxislabor ist abrechenbar

Die Bestimmung des INR -/%Quick-Wertes im Praxislabor ist abrechenbar mit der Gebührenordnungsposition 32026 – Bestimmung der Thromboplastinzeit für Systeme mit trägergebundenen Reagenzien mit 4,70 EUR!1

Voraussetzung: Die Bestimmung ist in der Praxis des Vertragsarztes zu erbringen, der die Untersuchung veranlasst hat.

Bitte beachten Sie:

Zur Abrechnung über die KV Nordrhein muss die Abrechnungsziffer mit einem „A“ gekennzeichnet werden: 32026A.

Bei Erbringung in Laborgemeinschaften ist die GOP 32026 nicht berechnungsfähig.

Mehr Informationen zur Abrechnung der INR -/%Quick-Bestimmung finden Sie auch unter www.coaguchek.info.



- ✓ Ergebnis in weniger als 1 Minute
- ✓ Geringes Probenvolumen (8 µl) aus Kapillarblut
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Heparinentstörte Teststreifen2
- ✓ Unbeeinflusst von erhöhten Fibrinogenkonzentrationen
- ✓ und niedrigen Hämatokritwerten2

* ohne Gewähr

** Faktor 1,15

Unser PRO für Ihre Patienten

Mehr Komfort bei der Bestimmung von INR und %Quick



„Viele unserer Gerinnungs-Patienten haben schlechte Venen. Für sie ist die venöse Blutentnahme häufig unangenehm und mit Schmerzen verbunden. Außerdem bedeutet es für meine Mitarbeiterin oft zusätzlichen Stress, eine geeignete Vene zu finden.“

Kennen Sie das auch?

Die venöse Blutentnahme zur Ermittlung der Gerinnungswerte ist bei der Bestimmung des INR-/%Quick-Wertes über das Labor unerlässlich. Die ggf. wiederholte Venenpunktion kann für Ihre Patienten sehr unangenehm und für Ihr Praxispersonal belastend sein.

Mehr Komfort mit dem CoaguChek® Pro II System

Weniger Schmerz

- Blutentnahme einfach und schmerzarm aus der Fingerbeere (8 µl)
- Komfort-Gewinn für Ihre Patienten

Nur ein Besuch

- Therapiekontrolle und Dosisanpassung zum selben Zeitpunkt möglich



1 Einschub des Teststreifens schaltet das Gerät automatisch ein.



2 Nach der Aufwärmphase: Mit der Stechhilfe Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus einen Tropfen Blut aus der Fingerbeere gewinnen.



3 Tropfen innerhalb von 15 sec auf den Teststreifen auftragen.



4 Schon in weniger als 1 Minute: Aktueller INR-/%Quick-Wert ablesbar.

Unser PRO an Qualität

25 Jahre Erfahrung in der ambulanten INR-/Quick-Bestimmung



„Ich treffe stets individuelle Therapie-Entscheidungen, auf die meine Patienten vertrauen. Eine zuverlässige und richtige Messung des Gerinnungswertes ist daher für mich sehr wichtig. Die Bestimmung in der Praxis sollte genauso zuverlässig sein wie die im Labor.“

Kennen Sie das auch?

Als behandelnder Arzt möchten Sie die Sicherheit haben, dass Sie sich auf die im Praxislabor erhobenen Messwerte verlassen können.

Zuverlässige Qualität mit dem CoaguChek® Pro II System

- Vergleichbarkeit mit der Labor-messung (siehe Abb. 1)
- Sicherheit durch interne Qualitätskontrolle, Kontrolle der Teststreifen vor jeder Messung
- Hohe Präzision und Richtigkeit: ISI von 1,0
- Unempfindliche, heparinentstörte Teststreifen (unempfindlich gegenüber LMWH bis zu 3 U/ml)²
- Unbeeinflusst von erhöhten Fibrinogenkonzentrationen (bis zu 800 mg/dL) und niedrigen Hämatokritwerten (zwischen 15-55 %)²
- Seit 25 Jahren etablierte Qualität zur INR-/Quick-Bestimmung am Point of Care
- Bewährt – über 10.000 CoaguChek® Geräte in deutschen Arztpraxen

Passing-Bablok-Regression (N = 256)

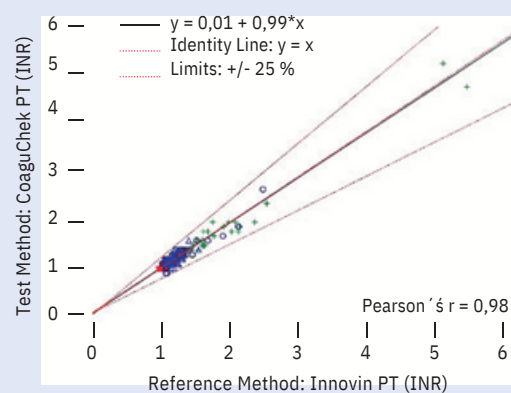


Abb. 1: Methodenvergleich von CoaguChek® PT gegenüber Thromboplastinreagenz Innovin PT3



Unser PRO für Sie

Vereinfachte Praxisorganisation



„Unsere Praxis ist sehr gut frequentiert. Montags wird das zur Belastung – dann bestellen wir die Patienten immer zur INR-Bestimmung ein und arbeiten wie am Fließband. Jeder Patient muss am nächsten Tag noch einmal angerufen und über das Laborergebnis informiert werden.“

Kennen Sie das auch?

Die INR-/%Quick-Bestimmung über ein Labor erfordert eine Blutentnahme aus der Vene. Jeder Patient wird nach Vorlage des Laborergebnisses noch einmal angerufen und über seinen aktuellen Gerinnungswert informiert. Häufig muss ein weiterer Termin zur Nachbesprechung mit dem Patienten vereinbart werden. Für Sie und das Praxisteam kann das einen hohen Zeitaufwand bedeuten.

Vereinfachte Praxisorganisation mit dem CoaguChek® Pro II System

Gewinnen Sie Zeit durch die Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe

- Schnelle Blutentnahme aus der Fingerbeere (8 µl)
- Vorliegen des Ergebnisses in weniger als 1 Minute
- Möglichkeit der sofortigen Therapieanpassung im Bedarfsfall
- Entfall der wiederholten Kontaktaufnahme und Wiedereinbestellung des Patienten

Außerdem:

Effizientere INR-/%Quick-Bestimmung bei Hausbesuchen und in Pflegeheimen durch die Möglichkeit der unmittelbaren Therapieentscheidung



Quellen:

- 1 Kassenärztliche Bundesvereinigung Berlin, Stand 2015/4, erstellt am 16.10.2015
- . Packungsbeilage CoaguChek® PT Test 2016-01, V 1.0
- 2 Roche CoaguChek® Pro II Design Validation Study, data on file, 2005
- .
- 3
- .

COAGUCHEK ist eine Marke von Roche.

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

© 2016 Roche Diagnostics.
Alle Rechte vorbehalten.
www.coaguChek.de
www.roche.de
07944748990 b 1116

CoaguChek®
