

Instrumente | Dosiertabelle

Liter Lösung	Konzentrat in Prozent						
	0,5%	1 %	1,5%	2 %	3 %	4 %	5 %
1 Liter	5ml	10 ml	15ml	20ml	30 ml	40ml	50 ml
2 Liter	10ml	20ml	30ml	40ml	60ml	80ml	100 ml
3 Liter	15ml	30ml	45ml	60ml	90ml	120 ml	150 ml
4 Liter	20ml	40ml	60ml	80ml	120 ml	160 ml	200 ml
5 Liter	25ml	50ml	75ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml
6 Liter	30ml	60ml	90ml	120 ml	180 ml	240 ml	300 ml
7 Liter	35ml	70ml	105 ml	140 ml	210 ml	280 ml	350 ml
8 Liter	40ml	80ml	120 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml
9 Liter	45ml	90ml	135 ml	180 ml	270 ml	360 ml	450 ml
10 Liter	50ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml
15 Liter	75ml	150 ml	225 ml	300 ml	450 ml	600 ml	750 ml
20 Liter	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	600 ml	800 ml	1000 ml
30 Liter	150 ml	300 ml	450 ml	600 ml	900 ml	1200 ml	1500 ml



**Wir forschen für
den Infektionsschutz**
bode-science-center.de

Zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Instrumenten-Reinigungs- oder Desinfektionsmittel-Lösung. Konzentrat und Wasser ergeben zusammen die Lösungsmenge (Beispiel: 2 %ige Lösung auf 10 l Wasser = 9,8 Liter Wasser + 200 ml Konzentrat). Lösung nur mit kaltem Wasser ansetzen. Standzeit entsprechend Herstellerangaben.

Fläche | Dosiertabelle

Liter Lösung	Konzentrat in Prozent									
	0,25 %	0,5%	0,75 %	1 %	1,5%	2%	2,5%	3 %	4 %	10%
1 Liter	2,5 ml	5ml	7,5 ml	10ml	15ml	20ml	25ml	30ml	40 ml	100 ml
2 Liter	5ml	10ml	15ml	20ml	30ml	40ml	50ml	60ml	80ml	200 ml
3 Liter	7,5 ml	15ml	22,5 ml	30ml	45ml	60ml	75ml	90ml	120 ml	300 ml
4 Liter	10ml	20ml	30ml	40ml	60ml	80ml	100 ml	120 ml	160 ml	400 ml
5 Liter	12,5 ml	25ml	37,5 ml	50ml	75ml	100ml	125 ml	150 ml	200 ml	500 ml
6 Liter	15ml	30ml	45ml	60ml	90ml	120ml	150 ml	180 ml	240 ml	600 ml
7 Liter	17,5 ml	35ml	52,5 ml	70ml	105ml	140ml	175 ml	210 ml	280 ml	700 ml
8 Liter	20ml	40ml	60ml	80ml	120ml	160ml	200 ml	240 ml	320 ml	800 ml
9 Liter	22,5 ml	45ml	67,5 ml	90ml	135ml	180ml	225 ml	270 ml	360 ml	900 ml
10 Liter	25ml	50ml	75ml	100 ml	150ml	200ml	250 ml	300 ml	400 ml	1000 ml
15 Liter	37,5 ml	75ml	112,5 ml	150 ml	225ml	300ml	375 ml	450 ml	600 ml	1500 ml
20 Liter	50ml	100 ml	150 ml	200 ml	300ml	400ml	500 ml	600 ml	800 ml	2000 ml
30 Liter	75ml	150 ml	225 ml	300 ml	450ml	600ml	750 ml	900 ml	1200 ml	3000 ml



**Wir forschen für
den Infektionsschutz**
bode-science-center.de

(01.16) 084 3298

Zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Flächen-Desinfektionsmittel-Lösung. Konzentrat und Wasser ergeben zusammen die Lösungsmenge (Beispiel: 0,5 %ige Lösung auf 8 l Wasser = 40 ml + 7,96 Liter Wasser). Lösung nur mit kaltem Wasser ansetzen. Keinen Reiniger ohne Hersteller-Freigabe zugeben. Verschmutzte Gebrauchslösung nicht mehr verwenden.