



Desinfektionstücher zur Flächendesinfektion - Refills

Anwendungsgebiete:

Dr. Becher Desinfektionstücher sind mit einem flüssigen Desinfektionsmittel getränkte Tücher, die direkt auf alkoholbeständigen Oberflächen mit und ohne Lebensmittelkontakt eingesetzt werden können. Für alle alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenstände, wie z.B. Maschinen oder Küchenwerkzeuge geeignet. Schnelle und rückstandslose Desinfektion – auch zwischen den Arbeitsgängen.

pH-Wert s n a

Produkteigenschaften:

- gebrauchsfertig - sichere Anwendung ohne Vernebelung
- 100% biologisch-abbaubar mit optimaler Wirkstoffabgabe
- bakterizid, levoruzid, begrenzt viruzid PLUS (MRSA, Salmonellen und Listerien, Pilze inkl. Hefen und Schimmelpilze, Viren (Adeno-, Noro und Rotaviren, BVDV und Vaccinia Virus, Corona, Grippeviren)
- aldehyd- und QAV-frei
- für alle alkoholbeständigen Oberflächen
- Tuchgröße: 290 x 300 mm, mit Abreissperforation
- VAH-gelistet

Hinweis:

Produkt an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit testen. BAuA: Reg. Nr. N-86671

Nicht auf alkoholempfindlichen Oberflächen, wie z.B. Acrylglas anwenden. Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 28 Tage. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Anwendung:

Die zu desinfizierenden Flächen oder Gegenstände zunächst reinigen. Eimerdeckel abnehmen; Folienpack an der Oberseite aufschneiden. Den mittigen Anfang der Tuchrolle durch die Entnahmeöffnung des Deckels ziehen. Eimerdeckel wieder fest verschließen. Einwirkzeiten siehe Tabelle auf der Rückseite.

Nach jeder Tuchentnahme Verschluss sofort wieder schließen, um Austrocknen zu verhindern.

Artikel:



Inhalt 2 Refills mit 70 Tüchern



EAN VKE 4000602004556



Artikelnr. 1455000



Gewicht VKE 2x1,2kg



Palette VKE 210

Verpackung:



Inhalt



EAN VSE



Lagen / Palette 7



Gewicht VSE



Palette VSE 105