



pH-Wert

s	n	a
---	---	---

Schnelldesinfektion

Anwendungsgebiete:

- Arbeitsflächen, Geräte und Maschinen
- Kontaktflächen, Handlauf, Türklinken, WC-Brillen

Alkoholische Sprühdesinfektion für Oberflächen mit und ohne Lebensmittelkontakt. Gebrauchsfertige Lösung, sofort verwendbar, trocknet schnell und rückstandsfrei ab. Frei von Phenolen, QAV/kationischen Tensiden und Parfüm. Für die Lebensmittelindustrie und die Verwendung in Küchen entwickelt. Geprüft und zertifiziert nach den Richtlinien der VAH/DGHM.

Produkteigenschaften:

- geeignet für Lebensmittelbereiche
- ab 15 Sek. Einwirkzeit
- kein Nachwischen und Nachspülen
- für Arbeitsflächen, Geräte und Maschinen sowie Kontaktflächen wie Handlauf, Türklinken, WC-Brillen
- empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure

Anwendung:

Flächen oder Gegenstände vor der Desinfektion zunächst reinigen. Dr. Becher Schnelldesinfektion auf die vollständig getrockneten Flächen und Gegenstände aus mindestens 30 cm Abstand bis zur vollen Benetzung aufsprühen. Während der gewünschten Einwirkzeit die Flächen feucht halten und anschließend vollkommen abtrocknen lassen. Nicht nachspülen oder nachwischen. Trocknet vollständig ab.

Hinweis:

Nicht auf alkoholempfindlichen Materialien, wie z.B. Acrylglas, anwenden. Im Zweifel Materialverträglichkeit an unauf-fälliger Stelle testen und trocken bewerten. Aufrecht transportieren und lagern. Flasche ist recyclebar.

Artikel:

	Inhalt	1l
	EAN VKE	4000602004518
	Artikelnr.	1451000
	Gewicht VKE	1,03kg
	Palette VKE	320

Verpackung:

	Inhalt	10
	EAN VSE	4000602094519
	Lagen / Palette	4
	Gewicht VSE	10,3kg
	Palette VSE	32