



DESIFOR-forte AF neu

Flächendesinfektion • begrenzt viruzid PLUS • Medizinprodukt



Einsatzbereich

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen. Als Biozidprodukt: Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Als Medizinprodukt: Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten. Für den professionellen Bereich.

Anwendung

Fläche mit DESIFOR-forte AF neu - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Anwendungsbeispiel für 1 Liter einer 1%igen Lösung: 990 ml Wasser vorlegen und 10 ml Produkt zugeben.

Technische Informationen

Karton mit 9 Dosierfl. à 1 Liter Art.-Nr. 20491
Kanister à 5 Liter (Typ "KH", hoch) Art.-Nr. 20492
Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 20493

Wirkstoffe

100 g enthalten
10,8 g Didecyltrimethylammoniumchlorid;
6,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008
(CLP): Gefahr; GHS05, GHS07, GHS09

BAuA Reg.-Nr. N-84407

CHZN5718



Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 0421

Anwendungsgebiet/ Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid, levurozid (Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen)	0,5 % 15 Min.	EN 13697, Hohe Belastung
Bakterizid, levurozid (Humanmedizinischer Bereich)	0,5 % 15 Min.	EN 13727, EN 13624, Hohe Belastung; EN 16615, Hohe Belastung mit Mechanik
Tuberkulozidie (M. terrae)	0,5 % 60 Min.	EN 14348, Niedrige Belastung
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	0,5 % 15 Min.	DVV/RK-Leitlinie
Begrenzt viruzid PLUS	2,0 % 30 Min.	EN 14476, Niedrige Belastung
Noroviren	1,5 % 15 Min.	EN 14476, Hohe Belastung
Rotaviren	0,5 % 15 Min.	EN 14476, Niedrige Belastung
Polyomaviren (SV 40)	1,0 % 15 Min.	EN 14476, Hohe Belastung

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro-, Adenoviren)
- Frei von Aldehyden
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder Test)
- IHO-gelistet
- VAH-gelistet
- HACCP-konform

Hinweise

Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre. Sicherheitsdatenblatt beachten.

pH conc

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE