

DESIFOR-ONE

multi wipes



Flächendesinfektionstücher • begrenzt viruzid PLUS • Medizinprodukt

Einsatzbereich

Zur rückstandsfreien Desinfektion empfindlicher Oberflächen im medizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen (z.B. Acrylglas, Kunstleder, Displays, Tastaturen.) Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendung

Zu desinfizierende, saubere Fläche mit dem getränktem Tuch gründlich wischen und abtrocknen lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit beachten. Reichweite pro Tuch ist abhängig von der Oberflächenstruktur, ca. 0,5 m².

Technische Informationen

Karton mit 6 Softpacks à 100 Tücher Art.-Nr. 20490

Wirkstoffe

Ein Softpack enthält 100 gebrauchsfertig getränkte Tücher. 100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 17,4 g Propan-2-ol, 12,6 g Ethanol (94 % w/w).

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Achtung; GHS02, GHS07

BAuA Reg.-Nr.: N-70789

BAuA Reg.-Nr.: N-70790



Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0820

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid und levurozid	konz. 2 Min.	VAH-Methode
Bakterizid	konz. 5 Sek.	EN 13727 hohe Belastung
Levurozid	konz. 1 Min.	EN 13624 hohe Belastung
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 15 Sek.	DVV/RKI-Leitlinie
Polyoma SV 40	konz. 15 Sek.	DVV/RKI-Leitlinie
Rotavirus	konz. 15 Sek.	in Anlehnung an EN 14476 ohne Belastung
Norovirus (MNV)	konz. 30 Sek.	EN 14476 niedrige Belastung
Begrenzt viruzid PLUS	konz. 15 Min.	EN 14476 hohe Belastung
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 5 Min.	in Anlehnung an EN 14348 hohe Belastung

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Roto-, Noro-, und Adenoviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Gebrauchsfertige Tücher (EN 16615, 4-Felder-Test)
- Tuchgröße 20 x 20 cm, Tuchqualität 50 g/m²
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 28 Tage
- IHO-gelistet
- VAH-gelistet
- HACCP-konform

Hinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitsdatenblatt beachten.

pH conc

0	2	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE