



DESIFOR-QUICK wipes

Flächendesinfektionstücher • begrenzt viruzid

Einsatzbereich

Zur rückstandsfreien Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im medizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendung

Zu desinfizierende, saubere Fläche mit dem getränkten Tuch gründlich wischen und abtrocknen lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit beachten. Reichweite pro Tuch ist abhängig von der Oberflächenstruktur, ca. 0,5 m².

Technische Informationen

Karton mit 12 Softpacks à 80 Tücher Art.-Nr. 20610

Wirkstoffe

100 g enthalten 63,1 g 2-Propanol; 2,9 g Ethanol.
Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Restmengen bestimmungsgemäß entsorgen.
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): GHS02, GHS07

BAuA Reg.-Nr. N-91510
CHZN6745

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Humanmedizinischer Bereich, bakterizid und levurozid	konz. 5 Min.	EN 13727, EN 13624, EN 16615 hohe und niedrige Belastung
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen, bakterizid und levurozid	konz. 1 Min. konz. 1 Min.	EN 1276, EN 1650, EN 13697 hohe und niedrige Belastung EN 1276, EN 1650, EN 16615 hohe und niedrige Belastung
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek.	EN 14348 hohe und niedrige Belastung
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 15 Sek.	DVV/RKHeitlinie
Rotaviren	konz. 30 Sek.	EN 14476 ohne Belastung
Noroviren (MNV)	konz. 30 Sek.	EN 14476 niedrige Belastung

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaft
- Gebrauchsfertige Tücher (EN 16615, 4-Felder-Test)
- Tuchgröße 20 x 20 cm, Tuchqualität 50 g/ m²
- **Tücher biologisch abbaubar**
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 28 Tage
- HACCP-konform

Hinweis

Flüssigkeiten und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitsdatenblatt beachten.

pH conc

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0922

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE