



#### Technische Informationen

Karton mit 20 Fl. à 500 ml  
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 20593  
Art.-Nr. 20594

#### Wirkstoffe

100 g enthalten 0,113 g 2-Phenoxyethanol;  
0,125 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chlorid;  
0,113 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamin

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008  
(CLP): keine

BAuA Reg.-Nr. N-86838

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Passendes Zubehör finden Sie auf unserer Website:



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0122

# DESIFOR- PLEXIFEE

## Flächendesinfektion • begrenzt viruzid PLUS

### Einsatzbereich

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im humanmedizinischen Bereich und im öffentlichen Bereich und Lebensmittelbereich. Einsetzbar auch auf Acrylglas.

### Anwendung

Fläche mit DESIFOR-PLEXIFEE wischen bzw. flächendeckend benetzen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

| Anwendungsgebiet/Wirksamkeit                                                            | Konzentration/Einwirkzeit | Anmerkung                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Bakterizid, levurozid (Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen) | konz. 5 Min.              | EN 1276, EN 1650, EN 13697 Niedrige Belastung                  |
| Bakterizid, levurozid (Humanmedizinischer Bereich)                                      | konz. 5 Min.              | VAH, EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 16615 Niedrige Belastung |
| Tuberkulozid (M. terrae)                                                                | konz. 30 Min.             | EN 14348 Hohe Belastung                                        |
| Mykobakterizid (M. avium + M. terrae)                                                   | konz. 30 Min.             | EN 14348 Hohe Belastung                                        |
| Begrenzt viruzid                                                                        | konz. 1 Min.              | EN 14476 Niedrige Belastung                                    |
| Begrenzt viruzid                                                                        | konz. 60 Min.             | EN 16777 Hohe Belastung                                        |
| Begrenzt viruzid PLUS                                                                   | konz. 60 Min.             | EN 14476 Niedrige Belastung                                    |

### Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Noro- u. Adenoviren)
- DEKRA-zertifizierte Materialverträglichkeit für Acrylglas
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)
- VAH-gelistet
- IHO-gelistet
- HACCP-konform

### Hinweise

Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre. Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre. Sicherheitsdatenblatt beachten.

pH conc 

|   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|----|----|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|----|----|

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taunusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE