



DESIFOR-QUICK



Flächendesinfektion • begrenzt viruzid

Einsatzbereich

Zur rückstandsfreien Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

Anwendung

Zu desinfizierende, saubere Fläche vollständig benetzen und abtrocknen lassen. Einwirkzeit beachten.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid, levurozid (Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen)	konz. 1 Min.	EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 16615 Hohe Belastung
Bakterizid, levurozid (Humanmedizinischer Bereich)	konz. 5 Min.	VAH; EN 13727, EN 13624, EN 16615 Hohe Belastung
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek.	EN 14348 Hohe Belastung
Mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	konz. 1 Min.	EN 14348 Hohe Belastung
Begrenzt viruzid	konz. 15 Sek.	EN 14476 Niedrige Belastung
Begrenzt viruzid	konz. 1 Min.	EN 16777 Hohe Belastung
Noroviren	konz. 30 Sek.	EN 14476 Niedrige Belastung
Rotaviren	konz. 30 Sek.	EN 14476 Ohne Belastung

Technische Informationen

Karton mit 10 Spenderfl. EURO
à 500 ml

Art.-Nr. DRS00177

Karton mit 6 Fl. à 500 ml,
2 Sprühaufsätze

Art.-Nr. 00521

Karton mit 2 Fl. à 1 Liter

Art.-Nr. 20522

inkl. 2 Sprühaufsätze

Kanister à 5 Liter

Art.-Nr. 20451

Wirkstoffe

100 g enthalten 63,1 g 2-Propanol; 2,9 g Ethanol

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008
(CLP): Gefahr; GHS02, GHS07

BAuA Reg.-Nr. N-58211, N-58212

CHZN5689

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen
lesen.

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder-Test)
- VAH-gelistet
- HACCP-konform

Hinweis

Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Flächen wie z. B. Acrylglas/Plexiglas.
Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre. Haltbarkeit nach Anbruch 3 Jahre.
Sicherheitsdatenblatt beachten.

Passendes Zubehör finden Sie auf unserer Website:



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen
Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. ⓘ 1121

pH conc

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE