



DESIFOR-SD

Flächendesinfektion • Kalk- und Fettlöser

Einsatzbereich

Zur Desinfektion säurebeständiger Flächen im humanmedizinischen Bereich und Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen (Wellness, Schwimmbad, Sanitärbereich).
Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendung

Unverdünntes DESIFOR-SD flächendeckend auftragen. Auf vollständige Benetzung achten. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Technische Informationen

Karton mit 6 Fl.
(mit Sprühaufsatz) à 500 ml
Karton mit 6 Fl. à 500 ml
Karton mit 12 Fl. à 1 Liter
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 20465
Art.-Nr. 20460
Art.-Nr. 20467
Art.-Nr. 20468

Wirkstoffe

100 g enthalten 0,96g L-Milchsäure, 4,7g Ethanol.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): keine

BAuA Reg.-Nr. N-86675

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/ Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid u. levurozid	100 % 5 Min.	VAH, EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650, EN 16615, hohe und niedrige Belastung
Begrenzt viruzid MVA	100 % 5 Min.	EN 14476, hohe und niedrige Belastung
Polyomaviren (SV 40)	100 % 5 Min.	EN 14476, hohe und niedrige Belastung

Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 12 Monate
- Kennzeichnungsfrei (nach GHS)
- VAH-gelistet
- HACCP-konform

Hinweis

Fugen vorwässern. Materialverträglichkeit vorab an unauffälliger Stelle prüfen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 1020

pH conc

0	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE