



DESIFOR-ONE wipes

DESIFOR-ONE WIPES-SYSTEM: DESIFOR-ONE WIPES Feuchttuchspender und DESIFOR-ONE WIPES Vliestücher

Einsatzbereich

Zur Verwendung bei kompatiblen DR.SCHNELL Desinfektionsprodukten auf nicht-porösen Oberflächen mit mechanischer Einwirkung in Krankenhäusern, in medizinischen Einrichtungen in Schulen, Kindergärten und Heimen sowie in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendung



Handschuhe anziehen. Den Feuchttuchspender vor der Wiederbefüllung auf sichtbare Verschmutzung hin überprüfen und gegebenenfalls säubern.



Tücherrolle mit Handschuhen aus der Verpackung entnehmen. Der Folienbeutel befindet sich in der Mitte der Tuchrolle. Bitte diesen herausnehmen und alle Bestandteile (Deckel, Etikett und Folienbeutel) auf die Arbeitsfläche legen.



Folienbeutel in den Feuchttuchspender einsetzen und über den Rand legen.



Tücherrolle hineinstellen und erstes Tuch herausziehen.



2,5 l Desinfektionsmittel-Tränklösung einfüllen:
Tücherrolle in gewünschter Anwendungskonzentration befüllen.



Erstes Tuch durch die Deckelöffnung führen und den Feuchttuchspender mit dem Deckel verschließen. Nach Einfüllen der Lösung 30 – 60 Min. warten, sodass alle Tücher optimal durchtränkt sind.



Nach dem Befüllvorgang das neue Sicherheitsetikett entsprechend beschriften und aufkleben. Die getränkten Tücher können 28 Tage verwendet werden.



Nach Gebrauch Folienbeutel entnehmen, ggf. Flüssigkeit entsorgen, Beutel und Deckel verwerfen.

Kompatibilität mit DR.SCHNELL Desinfektionsprodukt, Standzeit, Anwendungskonzentration und Einwirkzeit bitte entsprechendem Produktblatt entnehmen.

Produkteigenschaften

- Tuchrolle aus hochwertigen Vliestüchern
- Folienbeutel zur Vermeidung von Kontamination
- Einmaldeckel und Sicherheitsetikett zur Beschriftung
- Keine Aufbereitung des Feuchttuchspenders und Deckel erforderlich
- Stabiler Feuchttuchspender für 2,5 Liter Desinfektionsmittel-Tränklösung

Technische Informationen

DESIFOR-ONE Wipes Feuchttuchspender Art.-Nr. 80029
DESIFOR-ONE Wipes Vliestücher
6 Rollen á 90 Tücher Art.-Nr. 00556

Ggf. Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP) aufbringen z.B. bei Einfüllen eines gekennzeichneten Ready-to-use Produktes.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. © 0416

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE