

Kundeninformation

zur VAH Mitteilung September 2014:

“Zur Verwendung von Tuchspendersystemen in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko”

VAH: „Die Desinfektionsmittelkommission beim VAH empfiehlt, Tuchspendersysteme, die wiederaufbereitet werden müssen – mit Ausnahme von alkoholischen Mitteln – nicht in Bereichen mit besonderen Infektionsrisiken einzusetzen. Das gleiche gilt auch, wenn nur deren Verschlussvorrichtungen (Deckel) wiederaufzubereiten sind.“ *

Zu diesen Bereichen zählen z.B.:

- Intensivtherapie
- Hämatonkologie
- Neonatologie
- Verbrennungsstationen



Auf der nächsten Seite finden Sie einen Überblick unserer Tuchspendersysteme für den Einsatz in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko.

* Quelle: Hygiene & Medizin 2014; 39-9 S. 92-93

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Überblick zum Einsatz unserer Tuchspendersysteme unter Berücksichtigung des Infektionsrisiko:

Gebrauchsfertige Tuchspendersysteme - mit vorgetränkten Tüchern (Ready-to-use-Systeme)

	Produkt	Bereiche ohne oder mit möglichem Infektionsrisiko	Bereiche mit besonderem Infektionsrisiko
	DESCOCEPT AF WIPES alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion	✓ Vor der Wiederbefüllung Deckel desinfizieren.	✓ Vor der Wiederbefüllung Deckel desinfizieren.
	CLEANISEPT WIPES alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion	✓ Vor der Wiederbefüllung Deckel desinfizieren.	✓ KEINE Nachfüllpackungen verwenden
	CLEANISEPT WIPES  alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion	✓	✓

Befüllbare Tuchspendersysteme - mit trockenen Vliesrollen

	Produkt	Bereiche ohne oder mit möglichem Infektionsrisiko	Bereiche mit besonderem Infektionsrisiko
	 DESCO WIPES / ECO WIPES getränkt mit DESCOCEPT PUR alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel	✓ Vor der Wiederbefüllung Behälter und Deckel reinigen und desinfizieren.	✓ Vor der Wiederbefüllung Behälter und Deckel reinigen und desinfizieren.
	 DESCO WIPES / ECO WIPES getränkt mit DESCOCEPT AF alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel	✓ Vor der Wiederbefüllung Behälter und Deckel reinigen und desinfizieren.	✓ Vor der Wiederbefüllung Behälter und Deckel reinigen und desinfizieren.
	 DESCO WIPES / ECO WIPES getränkt mit ULTRASOL ACTIVE Pulverkonzentrat zur Flächendesinfektion	✓ Standzeit 8 Std. Vor der Wiederbefüllung Behälter und Deckel reinigen und desinfizieren.	✓ Standzeit 8 Std. Keine Wiederbefüllung/Aufbereitung Neue Komponenten verwenden.
	 DESCO WIPES / ECO WIPES getränkt mit BIGUANID FLÄCHE N flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung	✓ Vor der Wiederbefüllung Behälter und Deckel reinigen und desinfizieren.	✓ Keine Wiederbefüllung/Aufbereitung Neue Komponenten verwenden.
	 DESCO WIPES / ECO WIPES getränkt mit OPTISAL N flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung	✓ Vor der Wiederbefüllung Behälter und Deckel reinigen und desinfizieren.	✓ Keine Wiederbefüllung/Aufbereitung Neue Komponenten verwenden.



Dr. Schumacher

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld

Tel. +49 5664 9496-0
Fax +49 5664 8444

www.schumacher-online.com

