

neodisher® MediKlar special

Nachspülmittel zur maschinellen Aufbereitung
von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten
Flüssigkonzentrat



Hauptanwendungsbereiche:

Nachspülung von Medizinprodukten wie chirurgischen Instrumenten inkl. Augeninstrumenten, Anästhesieutensilien, Instrumentencontainern, Implantaten sowie Babyflaschen in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.

Klarspülung von Bettgestellen in Großraumdekontaminationsanlagen, die gemäß Herstellerangaben maschinell aufbereitet werden können.

Eigenschaften:

neodisher MediKlar special

- unterstützt die Trocknung durch seine sehr guten Benetzungseigenschaften, auch auf schwer benetzbaren Kunststoffoberflächen
- verkürzt die Trocknungszeit deutlich
- neutralisiert verschleppte Alkalireste
- reduziert die Fleckenbildung bei Einsatz von enthärtetem Wasser in der Schlusspülung

Zubehörteile von Anästhesieutensilien aus Polysulfon (PSU) sowie aus Polyphenylensulfon (PPSU) wie z. B. Konnektoren von Larynxmasken, Ventile, Adaptoren und Teile von Instrumenten-Containerdeckeln können bei Kontakt mit Nachspülmitteln herstellungsbedingt Spannungsrisse bilden. Sie sind jeweils auf Eignung vorzuprüfen.

Anwendung und Dosierung:

neodisher MediKlar special wird in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Großraumdekontaminationsanlagen eingesetzt. Die Dosiermenge ist u.a. vom Anwendungsbereich, dem Spülgut und der Wasserqualität abhängig. Folgende Parameter sind bei der Anwendung von neodisher MediKlar special einzuhalten:

- Zur Nachspülung von chirurgischen Instrumenten, Anästhesieutensilien, Instrumentencontainern, Implantaten und Babyflaschen:
0,2 – 0,4 ml/l
- Zur Nachspülung von Bettgestellen:
0,2 – 0,8 ml/l

Zur Vermeidung von Wasserflecken wird die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung empfohlen.

Maschinen und Dosiersysteme müssen für den Einsatz von neodisher MediKlar special geeignet sein.

Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI-Richtlinie und der Medizinprodukte-Betreiberverordnung mit geeigneten Verfahren durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Instrumentenherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664, die Aufbereitungsempfehlungen der Hersteller der Bettgestelle sowie die Empfehlungen des Arbeitskreises Bettgestell- und Wagendekontaminationsanlagen (AK-BWA) in der aktuellen Ausgabe der AK-BWA-Broschüre „Maschinelle Dekontamination“.

Die Bedienungsanweisungen der Maschinenhersteller sind zu beachten.

Nur für gewerbliche Anwendungen.

Technische Daten:

Dichte (20 °C): 1,05 g/cm³

pH-Bereich (gemessen in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,2 - 0,8 ml/l: 4,0 - 3,5

Viskosität (Konzentrat, 20 °C): < 50 mPa s



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

neodisher® MediKlar special

Nachspülmittel zur maschinellen Aufbereitung
von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten
Flüssigkonzentrat



Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG- Detergenzienverordnung 648/2004:
< 5 % Phosphonate,
15 - 30 % nichtionische Tenside,
außerdem Konservierungsmittel (Methylchloroisoithiazolinone/Methylisothiazolinone)

CE- Kennzeichnung:

neodisher MediKlar special erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, Anhang I über Medizinprodukte.

Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten.
Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

neodisher MediKlar special ist kein Gefahrstoff gemäß Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG.
Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar.

MB 4073/2-1
Stand 01/2012



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.