

# INCIDIN® WIPES – DRY WIPES SYSTEM

## Incidin® Premium Wipes / Incidin® Basic Wipes / Incidin® Wipes Dispenser

Zur professionellen Reinigung und Desinfektion von Flächen aller Art

Das Incidin® Dry Wipes System besteht aus dem universell einsetzbaren Vliestuchspender sowie den beiden Vliestuchqualitäten Incidin® Premium Wipes und Incidin® Basic Wipes.

Incidin® Wipes sind in Kombination mit den Ecolab Flächendesinfektionsmitteln (z.B. Incidin® Plus) für eine möglichst einfache und anwenderfreundliche Handhabung der Oberflächendesinfektion konzipiert.

- ▲ Incidin® Wipes Dispenser
  - Wiederverschließbar und absolut dicht
  - Beständig gegenüber Ecolab Desinfektionsmitteln
  - Deckelverschluss austauschbar und in 4 Farben erhältlich
- ▲ Incidin® Premium Wipes
  - Besonders hochwertige Vliestücher fusselfrei und problemlos zu entnehmen.
  - 99 Tücher / Rolle, 20x38 cm, 60 g/m²
- ▲ Incidin® Basic Wipes
  - Hochwertige Vliestücher mit gutem Reinigungsverhalten durch Lochstruktur
  - 99 Tücher / Rolle, 20x38 cm, 40 g/m²




# Incidin® Wipes – Dry Wipes System

Zur professionellen Reinigung und Desinfektion von Flächen aller Art

## Incidin® Wipes – auf die Fläche, fertig – los!

| Unsere Leistung                                                                                                                                                                                                                                        | Ihr Nutzen                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Labor analytisch / mikrobiologisch abgetestet und abgestimmt auf Incidin® Plus, Incidin® Extra N, Incidin® Rapid, Incidin® Liquid und Incidin® Foam.                                                                                                | Das Optimum in punkto Sicherheit und Anwendung in Kombination mit den bewährten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln.                                                                                                                                                 |
| Einfachste Befüllung mittels der bewährten Ecolab Dosiertechnik (DG1/DG3) oder manuell angesetzter Anwendungslösung möglich. Der Vliestuchspender ist besonders hochwertig, spülmaschinenfest und beständig gegenüber den Ecolab Desinfektionsmitteln. | Das Incidin® Wipes System fügt sich perfekt in bestehende Systeme zur Flächendesinfektion mit Incidin® Plus, Incidin® Extra N, Incidin® Rapid, Incidin® Liquid und Incidin® Foam sowie die marktführende Dosiertechnik DG1/DG3 Geräte ein.                          |
| Die Deckelverschlüsse sind in den Farben grün (Standard) gelb, blau und rot (alle optional) erhältlich. Darüber hinaus können die Verschlüsse separat getauscht werden.                                                                                | Mittels Farbkodierung kann eindeutig sowohl zwischen den unterschiedlichen Desinfektionsmitteln als auch Anwendungsbereichen getrennt werden. Bei abgebrochenem Verschluss muss nicht der ganze Deckel oder Eimer ersetzt werden, sondern lediglich der Verschluss. |
| Produktlösungen mit Incidin® Plus, Incidin® Extra N und Incidin® Rapid können in den bewährten Konzentrationen angewendet werden. Incidin® Liquid und Incidin® Foam sind stets pur zur Befüllung zu verwenden.                                         | Mit dem Einsatz der Incidin® Wipes steht ein anwenderfreundliches und flexibles System aus bewährten Produkten in neuer Applikationsform zur Verfügung.                                                                                                             |

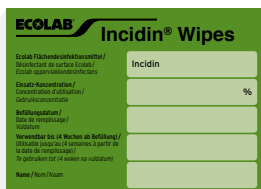

Für jede Wieder-/Befüllung mit den Vliestuchrollen sind zusätzlich Original Sicherheitsetiketten für die entsprechende Kennzeichnung (Produkt, Befülldatum, etc.) des Vliestuchspenders in der Verpackung enthalten.

Produkte



Anwendung



Service



Sicherheit



UNSERE HYGIENELEISTUNGEN SCHÜTZEN LEBEN ...

### WORLDWIDE HEADQUARTERS

370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102  
www.ecolab.com

### REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH  
Reisholzer Werftstr. 38-42  
40589 Düsseldorf  
Phone +49 (0) 211 98 93-0  
Fax +49 (0) 211 98 93-174  
www.ecolabhealthcare.de

### REGIONAL OFFICE

Ecolab Schweiz GmbH  
Kriegackerstr. 91  
CH-4132 Muttenz  
Phone +41 (0) 614 66 94-66  
Fax +41 (0) 614 66 94-55  
www.ecolab-suisse.ch

## ANWENDUNGSHINWEISE & EMPFEHLUNGEN




Handschuhe anziehen & Deckel abnehmen. Vliestuchspender vor der Wiederbefüllung mit Desinfektionslösung auswaschen und ggfls. säubern.



Die Vliestuchrolle mit Handschuhen aus der Verpackung entnehmen und aus der Mitte der Rolle ein erstes Tuch aus der Rolle ziehen.




Die Rolle Incidin® Premium / Incidin® Basic Wipes mittig in den Vliestuchspender einsetzen.

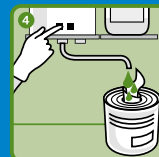

Incidin Flächendesinfektionsmittellösung einfüllen: Incidin® Plus, Incidin® Extra N und Incidin® Rapid in gewünschter Anwendungskonzentration befüllen, Incidin® Liquid und Incidin® Foam pur befüllen. Bei Incidin® Premium Wipes mind. 2,5 L Lösung verwenden, bei Incidin® Basic Wipes mind. 2,2 L Lösung verwenden.



Erstes Tuch durch die Deckelöffnung führen und den Eimer mit dem Deckel verschliessen. Nach Einfüllen der Lösung 30 - 60 Min. warten, sodass alle Tücher optimal durchtränkt sind.

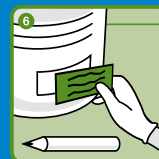

Die getränkten Tücher können 28 Tage verwendet werden. Nach dem Befüllvorgang das neue Sicherheitsetikett entsprechend beschriften und aufkleben.

## BESTELLINFORMATIONEN

| Produkt                  | Verpackungseinheit          | Artikelnummer |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| Incidin® Wipes Dispenser | 1 Stück im Karton           | 100 10 283    |
| Incidin® Premium Wipes   | 6 Rollen á 99 Tücher/Karton | 100 10 279    |
| Incidin® Basic Wipes     | 6 Rollen á 99 Tücher/Karton | 100 10 278    |

Neben den Ecolab Flächendesinfektionsmitteln können Incidin® Wipes auch mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden. Bitte beachten Sie die Anwendungsempfehlungen des jeweiligen Herstellers.

**ECOLAB®**