



Sirafan Speed

SCHNELLWIRKENDES, GEBRAUCHSFERTIGES FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL OHNE NACHSPÜLEN


Sirafan Speed ist ein schnell wirkendes Flächendesinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien und bestimmte Viren – ohne Nachspülen. Die ausgewogene synergistische Formulierung verschiedener Wirkstoffe, gewährleistet eine hohe Desinfektionssicherheit auf allen alkoholbeständigen Oberflächen.

Sirafan Speed wirkt bakterizid, levurizid, und begrenzt viruzid (Noroviren, Adenoviren und Grippeviren (H1N1, H5N1)).

- **Sauber** Parfümfrei und damit auch geeignet für den Einsatz in Lebensmittel verarbeitenden Bereichen.
- **Sicher** Vermeidung von Kreuzkontamination und Erhöhung der Lebensmittelsicherheit durch breites Wirkungsspektrum.
- **Effizient** Schnelle Desinfektionswirkung ohne Nachspülen.



ANWENDUNGSWEISE

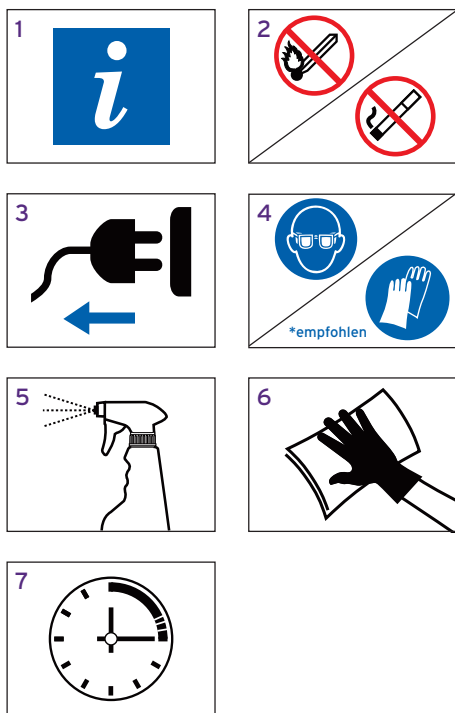

*Gem. BGV A1 ist bei Reinigungsarbeiten das Tragen von Schutzhandschuhen zu empfehlen.

1. Anwendungshinweise auf Produktetikett, Sicherheitsdatenblatt und Reinigungsplan beachten.
2. Entflammbares Produkt, nicht in Feuerflammen oder auf heiße Gegenstände oder Oberflächen sprühen.
3. Soweit elektrische Geräte betrieben werden, ist auf Explosionsschutz oder spannungslosen Zustand der Geräte zu achten.
4. Bei der Produktanwendung stets geeignete Schutzausrüstung tragen.
5. Grobschmutz entfernen. Produkt unverdünnt auf Flächen oder Gegenstände aus ca. 30 cm Entfernung aufsprühen und auf ausreichende Benetzung achten. Anschließend mit einem sauberen Tuch nachwischen oder Produkt unverdünnt auf ein Einmaltuch geben Oberflächen abwischen und trocknen lassen. Bei schwer zugängliche Stellen, Sirafan Speed ausreichend aufsprühen und trocknen lassen.
6. Mit einem trockenen Einmaltuch wischen.
7. Einwirkzeit beachten:
 - Bakterizid, EN 1276: 30 Sek.
 - Levurozid, EN 1650: 30 Sek.
 - Levurozid, EN 13697: 30 Sek.
 - Adenoviren und Murine Noroviren: 10 Min.
 - Grippeviren (H1N1, H5N1): 5 Min.
 Trocknen lassen.
 Ein Nachspülen mit Wasser ist nicht notwendig.
 Eventuelle verbleibende Produktrückstände sind aus toxikologischer Sicht unbedenklich.

ANMERKUNGEN / INFORMATION

Produkt nicht auf alkoholempfindliche Flächen wie z. B. Plexiglas anwenden. Bei Kunststoff ist eine Verträglichkeitsprüfung vorzunehmen.

Nur für den professionellen Gebrauch.

100 g Flüssigkeit enthält: 35 g 2-propanol, 25 g 1-propanol.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalgebinde beachten.

pH WERT (100 %)

6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	----	----	----

LAGERBEDINGUNGEN

Nur im Originalgebinde zwischen 0 und 25 °C lagern.

VERKAUFSEINHEIT

6 x 750 ml Flasche	9033070
2 x 5 L Kanister	9042730

