

Wichtige Hinweise

> Warten Sie nach Ihrem letzten Glas Alkohol 20 Minuten, bevor Sie Ihren Alkoholpegel testen. Wenn Sie die Messung vorher durchführen, liegen die Messwerte unter dem tatsächlichen Alkoholpegel. Für zusätzliche Sicherheit führen Sie 30 Minuten nach dem ersten Test noch einen zweiten Test durch.

> Pusten Sie nie direkt in das Gerät, nachdem Sie Alkohol getrunken haben, das Gerät könnte durch den Restalkohol in Ihrem Mund beschädigt werden.

> Die Mundstücke sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und sind nach jeder Messung auszutauschen.

> Atmen Sie so lange in das Gerät, wie das akustische Signal zu hören ist, atmen Sie

tief

ein, bevor Sie in das Gerät pusten.

> Bei Temperaturunterschieden zwischen zwei Orten warten Sie einige Minuten, bevor Sie das Gerät benutzen.

> Verwenden Sie Alkali-Batterien für eine optimale Nutzung.

> Bei Verwendung des Adapters, der an den Zigarettenanzünder angeschlossen wird, wird die Spannungsversorgung über Batterie unterbrochen.

> Das Gerät kann nur mit diesen beiden Stromquellen verwendet werden. Es gibt keine Funktion, die die Batterien wieder auflädt.

> Der Zähler zeigt beim Einschalten des Geräts die Anzahl der bereits durchgeführten Tests an.

> Bewahren Sie das Gerät nie an einem Ort mit korrosiven Gasen auf.

> Lagern Sie das Gerät nie in der prallen Sonne.

> Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.

> Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

> Entnehmen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch aus dem Gerät. Bei der erneuten Inbetriebnahme nach einem längeren Zeitraum sind die ersten drei Messergebnisse nicht zu berücksichtigen.

PRODUKTGARANTIE 1 JAHR

(Garantiebedingungen siehe www.objectif-prevention.fr)



Elektronischer Ethylo test
mit elektrochemischer Zelle

ENTSPERRTES MODELL

2 Optionen zur Anzeige der Ergebnisse:
von 0 bis 1 mg/l Atemluft oder von 0 bis 2 ‰

Inhalt des Koffers

- 1 elektronischer Ethylo test „ETHYLEC+“.
- 10 Mundstücke (zum einmaligen Gebrauch) mit Rückschlagventil.
- 1 9V Alkaline-Batterie.
- 1 Klinkenadapter 12 V DC für Zigarettenanzünder.
- 1 Aufbewahrungstasche mit Trageriemen.

Présentation du produit

ETHYLEC+ ist mit einem Atemdrucksensor ausgestattet, der an eine elektrochemische Zelle gekoppelt ist.

SELBSTTEST

SENSIBILISIERUNG UND VERANTWORTUNG

Zu Ihrer Sicherheit: Fahren Sie nicht, wenn Sie Alkohol getrunken haben

Technische Eigenschaften


- Proeuropäische ELEKTROCHEMISCHE Zelle
- Vorwärmzeit: 15 Sekunden
- Atemdauer: 7 bis 8 Sekunden
- Atemleistung: 10 l/min
- Genauigkeit: +/- 0,025 mg/l bei 0,20 mg/l
- Anzeige von Messwerten:
 - 0,00 bis 1 mg/l)
 - 0,00 bis 2 ‰), oberhalb dieses Messwerts Anzeige „HI“
- Akustische Warnschwelle 0,50 ‰
- Lagerung und Benutzung des Produkts : von 0 °C bis 50 °C

- Testzähler mit Alarm bei erforderlicher Rekalibrierung
- Empfohlene Kalibrierung: nach 12 bis 14 Monaten
- Erkennung von Druck und Atemunterbrechung
- Abmessungen: 115 x 60 x 23 mm
- Gewicht: 105 g ohne Batterie
- Testdauer: unter 60 Sekunden
- Anzeige: 3 Ziffern auf LCD-Display
- Spannungsversorgung: 9V Batterie oder 12V Adapter
- Anzeige bei niedriger Batterieladung


Produktbeschreibung



Bedienungsanleitung

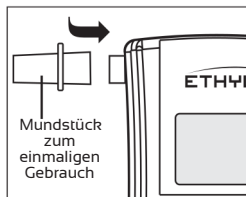


Stecken Sie das Mundstück auf den Sensor (Achtung, das Mundstück muss nach jedem Gebrauch gewechselt werden).

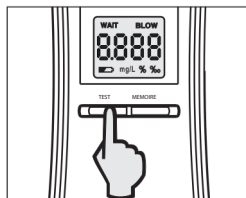


Taste „TEST“ drücken und gedrückt halten. Loslassen, sobald das Gerät aufleuchtet.

Nach dem Rücklaufzähler erscheint das Wort „BLOW“ (pusten) und der Buchstabe „i“ ist in Laufschrift zu sehen. Atmen Sie ein und pusten Sie in das Mundstück, bis das akustische Signal nicht länger zu hören ist (etwa 6-8 Sekunden).

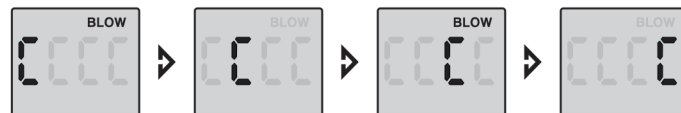

Das Wort „WAIT“ (warten) erscheint und die Ziffer „0“ ist in Laufschrift zu sehen, während das Gerät Ihren Alkoholpegel berechnet.

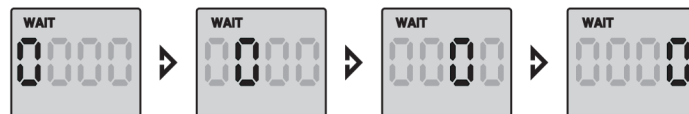

Ihr Testergebnis wird auf dem Display angezeigt. Bei einem Wert von mehr als 1 mg/l oder 2 ‰ zeigt das Gerät „HI“ an




Das Gerät kann „Err“ (Fehler) anzeigen, wenn die Atmung nicht korrekt war.

Speichermodus



Das Wort „WAIT“ (warten) erscheint auf dem Display und der Rückwärtszähler läuft von 15 bis 0.

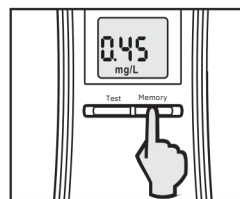

Nachdem der Test abgeschlossen ist, zeigt das Gerät Ihr Testergebnis 20 Sekunden lang an. Während dieser Zeit können Sie die Taste „MEMOIRE“ (Speicher) drücken, um Ihre vorherigen Ergebnisse zu prüfen. Die Taste „SPEICHER“ steht nur während dieser 20 Sekunden zur Verfügung. Nach dem letzten Test 30 Sekunden warten, um einen neuen Test durchzuführen.