



FD 300,
FD 312
Flächen-Desinfektion
Surface disinfection



ID 212, ID 212 forte, ID 213
Instrumenten-Desinfektion
Instrument disinfection
ID 215



Orotal® plus,
Orotal® plus pH 7
Sauganlagen-
Desinfektion
Suction system
disinfection



MD 555 cleaner,
MD 555 cleaner organic
Spezialreiniger für Sauganlagen
Special suction cleaner

Gebrauchslösung Quantity of solution required	1 %		2 %		5 %	
	ml	Verschusskappe No. of cap fills	ml	Verschusskappe No. of cap fills	ml	Verschusskappe No. of cap fills
1 Liter/litre	–	–	20	1	–	–
2 Liter/litres	20	1	40	2	100	5
3 Liter/litres	–	–	60	3	–	–
4 Liter/litres	40	2	80	4	200	10
5 Liter/litres	–	–	100	5	–	–
6 Liter/litres	60	3	120	6	300	15
7 Liter/litres	–	–	140	7	–	–
8 Liter/litres	80	4	160	8	400	20
9 Liter/litres	–	–	180	9	–	–
10 Liter/litres	100	5	200	10	500	25

¹⁾Verschussintegrierter Dosierer 20 ml. Dosierer innen bis zur ringförmigen Markierung befüllen.

²⁾Caps should be filled to the 20 ml line marked inside.



FD 300,
FD 312
Désinfection des surfaces
Disinfezione di superfici



ID 212, ID 212 forte, ID 213
Désinfection des instruments
Disinfezione di strumenti
ID 215

Nettoyant enzymatique des instruments
Pulente enzimatico per strumenti



Orotal® plus,
Orotal® plus pH 7
Désinfection des
systèmes d'aspiration
Disinfezione
per impianti di
aspirazione



MD 555 cleaner,
MD 555 cleaner organic
Nettoyant spécial pour des
systèmes d'aspiration
Pulente speciale per impianti di
aspirazione

Solution prête à l'emploi Soluzione pronta all'uso	1 %		2 %		5 %	
	ml	Bouchon 1) tappo chiusur ²⁾	ml	Bouchon 1) tappo chiusur ²⁾	ml	Bouchon 1) tappo chiusur ²⁾
1 litre/litro	–	–	20	1	–	–
2 litres/litri	20	1	40	2	100	5
3 litres/litri	–	–	60	3	–	–
4 litres/litri	40	2	80	4	200	10
5 litres/litri	–	–	100	5	–	–
6 litres/litri	60	3	120	6	300	15
7 litres/litri	–	–	140	7	–	–
8 litres/litri	80	4	160	8	400	20
9 litres/litri	–	–	180	9	–	–
10 litres/litri	100	5	200	10	500	25

¹⁾Doseur de 20 ml intégré dans le bouchon. Remplir le doseur jusqu'au repère circulaire.

²⁾Tappo di chiusura con dosatore da 20 ml. Riempire il tappo dosatore sino al contrassegno.