



TOWEL WARMER

MANUALE D'USO



USER'S MANUAL



MANUEL D'INSTRUCTIONS



GEBRAUCHSANLEITUNG



Geehrte Kunden,

*Wir bedanken uns, dass Sie sich für unser Modell **TOWEL WARMER** entschieden haben, und hoffen, dass Sie lange Freude damit haben werden.*

*Der **TOWEL WARMER** ist ein professioneller Tuchwärmer.*

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Bedienungsanleitung darf in irgendeiner Form ohne ausdrückliche Genehmigung der Firma XANITALIA srl vervielfältigt werden. Eine Änderung der Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Benachrichtigung erfolgen. Bei der Erstellung und Untersuchung der in dieser Bedienungsanleitung umfassten Unterlagen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Dennoch übernimmt XANITALIA srl keine Haftung für den Gebrauch des Geräts. Dasselbe gilt für alle an der Ausarbeitung und Abfassung dieser Bedienungsanleitung beteiligten Gesellschaften.

Herausgeber: XANITALIA srl, via Divisione Acqui, 53 - 61122 Pesaro - ITALIA

DE

Konformitätserklärung

*Der Hersteller: XANITALIA srl
Anschrift: Via Divisione Acqui, 53
61122 Pesaro*

*erklärt, dass das Produkt:
Mod. TOWEL WARMER*

*mit den folgenden Richtlinien und Vorschriften
in Übereinstimmung ist:*

*Richtlinie 2014/35/EU
EN 60335-1
EN 60335-2-23
EN 62233*

*Richtlinie 2014/30/EU
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3*

*Richtlinie 2011/65/EU
EN 50581*

*April 2016
Franco Signoretti
Geschäftsführer, XANITALIA srl*

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte vor Gebrauch des Modells TOWEL WARMER.

Vor Verwendung des Produkts aufmerksam diese Anweisungen lesen. Der Hersteller ist für Schäden an Personen oder Gegenständen, die durch die Nichtberücksichtigung der Hinweise und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, nicht haftbar.

In dieser Bedienungsanleitung sind die Inbetriebnahme, der Gebrauch und die richtige Wartung das Produkt betreffend erläutert. Um lange Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des elektrischen und mechanischen Teile zu gewährleisten, sind alle Anweisungen hierin zu befolgen. Die Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren.

Das Produkt darf nicht für andere als die in der Bedienungsanleitung vorgeschriebenen Funktion verwendet werden.

Nach Entfernen der Verpackung das Gerät auf seine Unversehrtheit kontrollieren. Bei Zweifeln sofort einen Fachmann zu Rate ziehen. Die Verpackung außer Reichweite für Kinder oder Behinderte bringen.

Falls das Produkt stürzt oder starke Schläge erhalten hat, ist es umgehend vom Hersteller oder dem Kundendienst eines Vertragshändlers prüfen zu lassen. Der Gebrauch aller Elektrogeräte bedarf der Beachtung einiger wesentlicher Regeln:

- es darf nicht mit nassen oder feuchten Händen berührt werden;*
- es darf nicht barfuß berührt werden;*
- es darf nicht von Kindern oder Unfähigen verwendet werden. Das Produkt darf nur dann an das Stromnetz/Netzdose geschlossen werden, wenn:*
 - die Werte des entsprechenden Stromnetzes mit denen auf dem Geräteschild übereinstimmen;*
 - die Belastbarkeit der Anlage/Dose ihrer maximalen Leistung angepaßt ist. Wenden Sie sich umgehend an einen Fachmann, wenn das nicht der Fall sein sollte.*

Sollte Ihre Steckdose nicht mit dem Gerätestecker kompatibel sein, ist die Steckdose durch einen Fachmann auszubauen und durch eine geeignete zu ersetzen.

Keine beschädigten oder abgenutzten Kabel verwenden. Sollte das Speisekabel beschädigt werden, muss es vom Hersteller, einem Kundendienstzentrum oder einem Fachmann mit gleicher Qualifikation ersetzt werden, um Gefahren vorzubeugen.

Generell ist die Verwendung von Adaptern, Multipeldosen oder Verlängerungen nicht empfehlenswert. Sollte ihr Gebrauch aber dennoch erforderlich sein, dürfen nur einfache oder multiple Adapter und Verlängerungen verwendet werden, die den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen. Es ist dabei darauf zu achten, dass die Grenzwerte für den Strom nicht überschritten werden, die an den einfachen Adaptern und Verlängerungen, und jene für die maximale Leistung am Multipeladapter gekennzeichnet sind.

Das Gerät nicht unnütz eingeschaltet lassen: bei Nichtverwendung, Schalter ausstellen.

Vor der Durchführung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten Netzstecker des Gerätes ziehen.

Bei Störungen und/oder Schäden Geräteschalter ausschalten und sich umgehend an den Hersteller oder einen Kundendienst des Vertragshändlers zwecks Reparatur oder Gebrauch von Originalersatzteilen wenden.

Falls entschieden wird, das Gerät zu eliminieren, Schalter ausschalten und Netzstecker ziehen. Das Gerät ist an einem für Kinder und Unfähige unzugängigem Ort unterzubringen.

Die Stromanlage, mit der das Gerät verbunden ist, muss den geltenden Richtlinien für elektrische Anlagen in privaten Gebäuden entsprechen.

Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher Fähigkeiten unter Aufsicht verwendet werden oder wenn sie Anweisungen hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren kennen.

Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, außer diese sind über 8 Jahre alt und beaufsichtigt.

Das Gerät und das dazugehörige Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.

Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

Achtung!

Das Gerät ist gemäß den geltenden Bestimmungen ausgeführt.

Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den Richtlinien 2014/35/EU und mit der Funkentstörung entsprechenden 2014/30/EU.

Für den Anschluss bedarf das Gerät einer Steckdose mit Erdungsanlage.

Das Gerät vor Witterungseinflüssen geschützt aufbewahren.

Das Gerät kann nur für die Heizung Handtücher verwendet werden.

Das Gerät, oder Teile davon, nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen (siehe unter Kapitel "Reinigen").

Das Gerät nicht in einer Umgebung verwenden, wo entzündbare Stoffe oder Dämpfe wie Alkohol, Insektenschutzmittel, Benzin usw. sind.

Bedienung

Schließen Sie das Gerät über das Netzkabel an eine 220/230V-Steckdose an.

Rollen Sie die feuchten, gegebenenfalls auch ausgewrungenen Tücher zusammen.

Nehmen Sie den Korb heraus, und legen Sie die zusammengerollten Tücher hinein.

Setzen Sie den befüllten Korb wieder ein; achten Sie dabei darauf, dass die Tücher nicht die Innenwände des Gerätes berühren.

Schließen Sie das Gerät, und vergewissern Sie sich, dass die Wanne zum Auffangen des Wassers richtig eingelegt ist.

Schalten Sie das nun Gerät ein.

Benutzen Sie zum Herausnehmen des Korbes bitte einen Handschuh.

ACHTUNG: berühren Sie das Korbgitter nicht mit den Händen.

Technische Daten

<i>Modell</i>	<i>TOWEL WARMER</i>
<i>Speisespannung</i>	<i>220 - 240 V 50/60 Hz</i>
<i>Elektrische Leistung</i>	<i>178 W</i>
<i>Kapazität</i>	<i>11 litres</i>
<i>Gewicht</i>	<i>6 Kg</i>
<i>Abmessungen</i>	<i>mm 410X320X260 h</i>

DE

Reinigung

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Gerätes immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.

Reinigen Sie das Gehäuse bitte auf keinen Fall mit Lösungsmitteln, aggressiven Reinigungsmitteln oder anderen Flüssigkeiten.

Entleeren Sie die Auffangwanne und trocknen Sie sie danach gut ab.

Reinigen Sie das Geräteinnere auf dieselbe Weise.

Benutzen Sie zum Abwischen des Gehäuses und Entfernen von Verunreinigungen ein weiches Tuch.

Entsorgung



EU 2012/19/EU

(DE) Dieses Produkt entspricht der Richtlinie

EU 2012/19/EU.

Das am Gerät angebrachte Symbol des durchgestrichenen Abfallkorbs bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebenszeit vom Hausmüll getrennt zu entsorgen ist, und einer Müllsammelstelle für Elektround Elektronik-Altgeräte zugeführt, oder bei Kauf eines neuen gleichartigen Geräts dem Händler zurückgegeben werden muss. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu den entsprechenden Sammelstellen gebracht wird. Die korrekte getrennte Sammlung des Geräts für seine anschließende Zuführung zum Recycling, zur Behandlung und zur umweltgerechten Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwertung der Werkstoffe des Produkts. Die unbefugte Beseitigung des Produktes von seiten des Benutzers wird mit Verwaltungsstrafen gemäß dem italienischem GvD Nr. 152/2006 (Art. 255 und ff. GvD 152/2006) geahndet. Für genauere Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme wenden Sie sich bitte an den örtlichen Müllsammeldienst oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

