



Einfach anwendbar

- Leicht und transportabel im handlichen Behälter ohne jegliche Verdunstung
- Ready to use - Ohne Vorbereitung gebrauchsfertig
- Zielen, sprühen – fertig!

Effektiv in der Wirkung

- Wirkstoff Norfluran
- Konstante Abgabetemperatur von -54°C bis -58°C
- Kurze Behandlungsdauer bei den meisten Hautläsionen
- Anzahl der Verwendungen (abhängig von der Größe des zu behandelnden Areals): ca. 40-60 Behandlungen
- Der patentierte Sprühkopf garantiert eine kontrollierte und zielgenaue Abgabe

Wirtschaftlich

- Kostengünstig, keine Investition über den Verkaufspreis hinaus erforderlich
- 3 Jahre Haltbarkeit bei Raumtemperatur garantiert

Der Hersteller von **Hydrozid®** ist BIBAWO Medical A/S ein dänisches Familienunternehmen für Medizinprodukte mit Sitz im Medicon Valley, nördlich von Kopenhagen. **Hydrozid®** war zuvor im Besitz einer Schwesterfirma von BIBAWO Medicals, einem Pharmaunternehmen mit den Schwerpunkten ZNS, Kardiovaskulär und Dermatologie.



Exklusiv-Vertriebspartner Deutschland



makro-med GmbH
© m a k r o - m e d g m b h

HYDR ZID®




Einfache,
sichere und
effektive
Kryochirurgie in
einer Kombination
aus klassischer
Kryochirurgie
und moderner
Aerosol-Technologie



INDIKATIONEN

**Zervikale
Kontaktblutung**

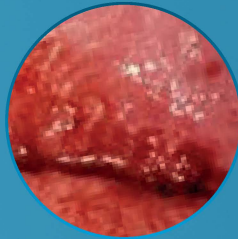


**Seborrhoische
Keratose**



Lentigo



**Molluscum
contagiosum**

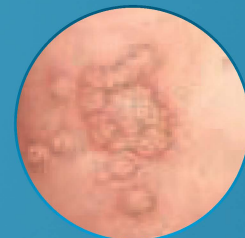

Verruca vulgaris

Hydrozid® - Vielseitig - einfach - effektiv - sicher -
anwendbar in folgenden Fachgebieten:

- Dermatologie
- Gynäkologie
- Proktologie
- Veterinärmedizin
- Plastische Chirurgie
- Allgemeinmediziner
- Urologie
- Podologie

Hydrozid® ist einsetzbar ohne zeitaufwendige Vorbereitungen,
wie sie etwa beim Gebrauch von flüssigem Stickstoff
erforderlich sind.

- Es ist keine Anästhesie erforderlich;
- Es erfordert keine Vorkehrungen für eine sichere Handhabung, wie z. B. teure und wartungsintensive Lagereinrichtungen oder eine besondere Belüftung; Hydrozid® sollte aufrecht, unter 50°C und vor Sonnenlicht geschützt gelagert werden.
- Es ist keine Schutzausrüstung, wie Handschuhe oder Schutzbrillen, besonderen Entsorgungsmaßnahmen oder -einrichtungen erforderlich.
- Leere Behälter können im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.

Der Anwender kann sich voll und ganz auf den Patienten und
die Behandlung konzentrieren, anstatt auf die Aufbereitung
und Anwendung der Ausrüstung.

Hydrozid® ist CE-zertifiziert, ist zugelassen durch die CDSCO
und freigegeben durch die FDA. Das bedeutet, das Produkt
erfüllt die hohen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen
der EU und den USA.




Verruca Plana



Akrochordon

**Aktinische Keratose
(Kopf)**

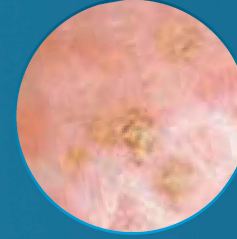


**Aktinische Keratose
(Körper)**



Hydrozid® bietet
eine konstante
Kühltemperatur von
-54°C bis -58°C. Die
empfohlene
Frier-/Auftau-Methode
minimiert Hautschädigungen
während der Behandlung.

Hydrozid® Spray besteht
aus einem leichten,
transportablen Behälter,
der Verdunstung
verhindert und eine
einfache Handhabung
garantiert.

Condyloma

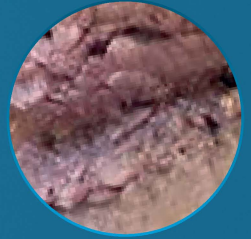

**Gingivale
Melanin-
Pigmentierung**



Verruca Plantaris