

ERLEBEN SIE DEN **OXY** EFFEKT IN **XL**

Incidin™ OxyFoam & OxyWipe

Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H_2O_2 ™

PRAXISNAH NACH
EN 16615
GETESTET

Die innovativen Produkte Incidin™ OxyFoam & Incidin OxyWipe bieten den einzigartigen Vorteil einer patentierten Wasserstoffperoxid-Formulierung mit breitem Wirkspektrum.

Sie wirken gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren und hinterlassen aufgrund ihrer schnellen Verdunstungsrate keine aktiven Rückstände. Die Wirksamkeit von OxyWipe wurde anhand der vom Tuch abgegebenen Tränklösung getestet.

Incidin™ OxyFoam & OxyWipe bieten:

- ▲ Hi-speed H_2O_2 ™
- ▲ Hohe Anwenderfreundlichkeit
- ▲ Exzellente Materialverträglichkeit



Incidin™ OxyFoam & OxyWipe

Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H₂O₂

15
SEK²
Bakterizid
(EN 13727 / 16615)
15
SEK²
Viruzid gegen
behüllte Viren
15
MIN²
Noroviruzid

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
EFFEKTIV	Breites Wirkspektrum und kurze Einwirkzeiten
SICHER!	Exzellente Materialverträglichkeit – Keine aktiven Rückstände – Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff
ANWENDERFREUNDLICH	Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Reinigen & Desinfizieren in einem Schritt

WIRKSAMKEIT	Einwirkzeit OXYFOAM	Einwirkzeit OXYWIPE
Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 (einschl. EN 16615), hohe Belastung		
Bakterizid, levurozid	5 Min.	15 Min.
Fungizid	15 Min.	15 Min.
Tuberkulozid, mykobakterizid	15 Min.	60 Min.
Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004*	15 Sek.	30 Sek.
Rotavirus*	30 Sek.	30 Sek.
Adenovirus*	1 Min.	15 Min.
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	30 Sek.	30 Sek.
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)		
EN 13727 (bakterizid)	15 Sek.	1 Min.
EN 13624 (levurozid)	1 Min.	15 Min.
EN 13624 (fungizid)	5 Min.	15 Min.
EN 14348 (tuberkulozid, mykobakterizid)	5 Min.	30 Min.
EN 14476 (begrenzt viruzid PLUS)	15 Min.	60 Min.
EN 14476 (Adenovirus)	30 Sek.	1 Min.
EN 14476 (Norovirus)	15 Min.	60 Min.
EURO-Normen 4-Felder-Test (hohe Belastung)		
EN 16615 (bakterizid)	15 Sek.	5 Min.
EN 16615 (levurozid)	15 Sek.	1 Min.
EN 16615 (fungizid)	5 Min.	5 Min.
EN 16615 (tuberkulozid, mykobakterizid)	15 Min.	60 Min.

* DVV 2015 (Susp. Test)

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR INCIDIN™ OXYFOAM



- 1 Aus einem Abstand von ca. 30 cm auf die Oberfläche sprühen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen



- 1 Auf einen sauberes Tuch sprühen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen

EUROPEAN HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE GMBH

Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44-877-2001
www.ecolab.eu



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de

CE 0297



ANWENDUNGSBEREICH

Incidin™ OxyFoam:
Schaumspray zur
Reinigung und Desinfektion
medizinischer Oberflächen
(einschl. z. B. Sonden) und
medizinischem Inventar.



Incidin™ OxyWipe:
Reinigungs- und Desin-
fektionstücher für medizinische
Oberflächen (einschl. z. B.
Sonden) und Inventar.



Ⓢ BIOZID N-61595
Ⓢ BIOZID N-61592

GEBRAUCHSANWEISUNG

Incidin™ OxyFoam: Anwendungsfertige Lösung. Unverdünn auf Flächen und Gegenstände aus ca. 30 cm Entfernung aufsprühen und auf ausreichende Benetzung achten. Dann mit einem sauberen Tuch nachwischen oder Produkt unverdünnt auf ein Einmaltuch geben und Oberflächen damit abwischen und abtrocknen lassen.

Incidin™ OxyWipe: Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Flächen komplett benetzen und trocknen lassen. Flowpack wieder verschließen. Nicht geeignet zur Schlusssdesinfektion von invasiven Medizinprodukten. Nicht verwenden auf oxidativ-empfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kupfer und Messing.

WIRKSTOFF

100 g enthalten:

Incidin™ OxyFoam: 1,5 g Wasserstoffperoxid

Incidin™ OxyWipe: 1,0 g Wasserstoffperoxid

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft – mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungs- einheit	Artikel- nummer
Incidin™ OxyFoam	6 x 750 ml	30 821 60 PZN 1115 60 47
Incidin™ OxyWipe	6 x 100 Tücher Tuchgröße: 20 x 20 cm	30 823 60 PZN 1115 60 53
Incidin™ OxyWipe XL	6 x 50 Tücher Tuchgröße: 25 x 37 cm	30 920 80 PZN 138 320 09
Wandhalterung für Incidin™ OxyWipe	1 x 6 Stück	100 338 77

LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern.
Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Haltbarkeit nach dem Öffnen:

Incidin™ OxyFoam:
Bis zum aufgedrucktem Verfalldatum

Incidin™ OxyWipe: 3 Monate

Referenzen

1. Exzellente Materialverträglichkeit – Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff.
2. Incidin™ OxyFoam (EN 13727 / EN 16615 / EN 14476)

BIOZID- UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.
NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.