

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DEN DRUCKER



Diese Benutzerinformation muss vor Benutzung des easyTymp zur Kenntnis genommen werden. Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig, um Testergebnisse von Ihrem easyTymp erfolgreich zu drucken.

Folgen Sie den unten aufgeführten Anweisungen, um mit dem drahtlosen Drucker zu drucken.

DRUCKVORGANG

1. Schalten Sie das easyTymp ein, indem Sie die rechte oder die linke Pfeiltaste drücken .
2. Schalten Sie den Drucker ein, indem Sie die **Einschalttaste**  für zwei Sekunden gedrückt halten.
3. Warten Sie (bis zu 30 Sekunden), bis das Druckersymbol  in der rechten oberen Ecke des easyTymp-Bildschirms (neben dem Batteriesymbol) erscheint.
4. Druckergebnisse werden sofort nach Drücken der Schaltfläche **Drucken** gedruckt.

HINWEIS: Für den Fall, dass der Drucker vor der Durchführung eines Tests nicht eingeschaltet war, schalten Sie den Drucker in unmittelbarer Nähe des easyTymp ein. Sobald das Druckersymbol  angezeigt wird, drücken Sie die Schaltfläche **Drucken** zum Drucken der Ergebnisse. Wird die Drucken-Schaltfläche vor Zustandekommen einer Verbindung zwischen easyTymp und Drucker gedrückt, so erscheint der folgende Fehler.

Druckfehler

Prüfen:
Strom
Verbindung
Setup

Wenn diese Fehlermeldung erscheint, fahren Sie wie folgt fort:

1. Stellen Sie sicher, ob der Drucker durch Drücken der **Einschalttaste**  für 2 Sekunden angestellt worden ist.
2. Drücken Sie auf dem easyTymp **Löschen**, um die Fehlermeldung zu entfernen.
3. Wenn das Druckersymbol in der oberen rechten Bildschirmecke angezeigt wird, drücken Sie die Schaltfläche **Drucken**.

FRAGEN

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre MAICO-Vertretung vor Ort.