



HeelWedge®
Fersenentlastungsschuh

**Zur Abheilung von Wunden im Fersenbereich,
bei Fersensporn und nach Fersenverletzungen.**

Der HeelWedge® Fersenentlastungsschuh wird zur gezielten Entlastung des Fersenbereiches eingesetzt. Die durchgehende Sohle schützt die Ferse. Durch den Aufbau und die Konstruktion der Sohle findet eine Druckumverteilung auf den Mittel- und Vorfuß statt.



TAS®
Hallux Valgus Zehenschiene

**Nach Hallux Valgus-, Hammerzehen- und
Schneiderzehen-Operationen.**

Die TAS® Hallux Valgus Zehenschiene kommt nach operativen Eingriffen zum Einsatz. Die operierten / korrigierten Zehen werden durch gezielte Ausrichtung in der gewünschten Position gehalten. Das weiche Material und der Verzicht auf starre Kunststoffelemente sorgen für einen angenehmen Tragekomfort.

Überreicht durch:



Postoperative Versorgung

**Operationen oder Verletzungen am Fuß –
wie kann ich laufen?**



130807



Herausgeber
DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany
Telefon +49 (0) 88 07.92 28-0 | Fax -22
info@darco.de | www.darco.de



DARCO

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

diese Broschüre fasst die wichtigsten Eigenschaften und Anwendungsgebiete von postoperativen Hilfsmitteln zusammen.

Nach Operationen oder Verletzungen am Fuß sowie bei Erkrankungen aufgrund von Fehlstellungen stellt sich die Frage nach dem »richtigen Schuh«.

Höchstes Ziel sind die Ruhigstellung des Fußes nach der Operation, die Förderung des Heilungsverlaufes sowie die Wiederherstellung der Beweglichkeit des Patienten.

DARCO hat seit vielen Jahren sein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von Schuhmodellen gelegt, die genau diese Versorgung umfassen.

Wir können Ihnen helfen, trotz Ihrer Einschränkung besser am alltäglichen Leben teilnehmen zu können – sei es beruflich, privat oder in der Freizeit.

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie über die Anwendungsgebiete und Handhabung der verschiedenen Schuhmodelle informieren.

Ihr behandelnder Arzt, ein Sanitätshaus oder ein Orthopädiefachgeschäft in Ihrer Nähe berät Sie gerne.



OrthoWedge
Vorfußentlastungsschuh



OrthoWedge Light
Vorfußentlastungsschuh



TwinShoe
Ausgleichsschuh



MedSurg™ Pro
Verbandschuh

Der MedSurg™ ist nach wie vor im blauen Original sowie in einer Kindergröße erhältlich.



Nach Eingriffen bei Hallux Valgus-, Hammerzehen- und Krallenzehen-Operationen sowie zur Abheilung von Vorfußwunden.

Der **OrthoWedge Vorfußentlastungsschuh** wurde speziell zur Entlastung und zum Schutz des Vorfußes entwickelt. Seine durchgehende Sohle gewährt dem Patienten beim täglichen Tragen Schutz von der Unterseite, zum Beispiel vor Treppen, Stufen oder Straßenschmutz. Durch die Konstruktion des Entlastungskeils findet eine Druckumverteilung auf den Mittel-, beziehungsweise Rückfuß statt. Der Vorfuß wird somit nicht belastet. Die weite Öffnungsmöglichkeit und die variable Breitereinstellung durch Klettverschlüsse ermöglichen einen bequemen Einstieg in den Schuh.

Als Partnerschuh zu den Entlastungsschuhen **OrthoWedge / Light und HeelWedge®**.

Der **TwinShoe** gewährleistet durch den Ausgleich des Höhenunterschieds ein physiologisch richtiges Gangbild.

Nach Operationen bei Hallux Valgus, Hammerzehen und Krallenzehen sowie zur Mobilisierung bei umfangreichen Verbänden.

Der **MedSurg™ Pro Verbandschuh** ist überall dort zum Standard geworden, wo nach Operationen Stabilität, Stoß- und Druckentlastung notwendig sind. Das luftdurchlässige, dehnbare Nylongewebe des Obermaterials erlaubt das Tragen auch bei sehr umfangreichen Verbänden. Die eingearbeitete Sohlenversteifung verhindert ein Abrollen des Fußes und bietet somit einen optimalen Schutz des operierten Fußes.