


POLAR LIGHT **Gebruiksaanwijzing**

De Polar Light LED lamp voor het bepalen van kleur en tandkontoeren levert 5500 K daglicht voor een optimale daglichtinstelling. Voor de werking zijn twee AA-batterijen nodig.

De Polar Light lamp bestaat uit 6 LED lampjes ①, aan-uitschakelaar ② en een batterijhouder ③.

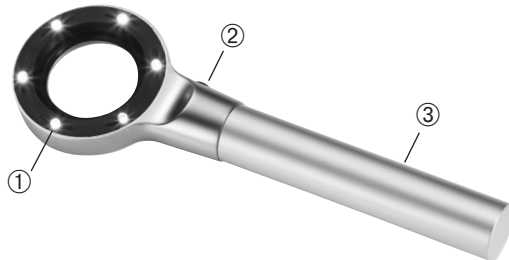

De bediening

Om een optimaal resultaat te bereiken worden de LED's naar onderen, respectievelijk op de te belichten tanden gericht. De aanbevolen afstand ligt tussen de 6 en 10 cm. Is de afstand te gering, dan vormt de lichtkegel van de LED's een zogenaamde blinde punt. Is de afstand daarentegen te groot, dan ontstaat een wederzijdse beïnvloeding door andere lichtbronnen.

In- en uitschakelen van het Polar Light kleurbepalings- en tandkontoerenlicht.

Om in te schakelen drukt u op de knop ②, die automatisch blokkeert. De knop gedurende het gebruik niet ingedrukt houden. Om uit te schakelen drukt u nogmaals op de aan-uitschakelaar ②.

Wisselen van de batterijen.

Om de batterijen van de Polar Light lamp te wisselen draait u het handstuk tegen de klok in, waarbij u de LED-ring vasthoudt. Vervolgens worden de batterijen telkens met de min-pool naar beneden gericht in het handstuk geplaatst. Daarna schroeft u het handstuk klokgewijs weer op de LED-ring.


Reinigingen en desinfecteren van de Polar Light lamp

Hiervoor kunt u het beste een oppervlakte desinfectiemiddel gebruiken, bijv. Pursept®-A Xpress.

POLAR LIGHT **Gebrauchsanweisung**

Polar Light LED Farbnahme- und Zahnkonturenleuchte leistet 5500 K Tageslicht für einen optimalen Tageslichtabgleich. Für den Betrieb sind zwei AA-Batterien nötig.

Polar Light besteht aus 6 LED Lights ①, An- und Ausschalter ② und einem Batteriefach ③.

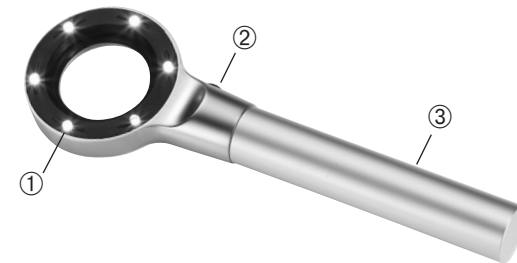

Vorgesehene Handhabung

Für beste Ergebnisse werden die LED's ① nach unten bzw. auf die zu beleuchtenden Zähne gerichtet. Der empfohlene Abstand liegt zwischen mind. 6 cm und max. 10 cm. Ist der Abstand zu gering, bilden die Lichtkegel der LED's einen so genannten blinden Punkt. Ist der Abstand zu groß, so entstehen Interferenzen durch umliegende Lichtquellen.

Ein- und Ausschalten der Polar Light Farbnahme- und Zahnkonturenleuchte

Drücken Sie zum Einschalten den Knopf ②, der automatisch arretiert. Ein Halten des Knopfs während des Gebrauchs ist nicht erforderlich. Zum Ausschalten drücken Sie den Ein-Ausschalter-Knopf ② erneut.

Batteriewechsel

Um die Batterien des Polar Lights auszuwechseln, drehen Sie das Handstück gegen den Uhrzeigersinn, dabei halten Sie den LED-Ring fest. Danach werden die Batterien jeweils mit dem Minuspol nach unten zeigend in das Handstück eingesetzt. Dann schrauben Sie das Handstück im Uhrzeigersinn wieder auf den LED-Ring.

Äußere Reinigung und Desinfektion der Polar Light Lampe

Wischdesinfektion mit geeignetem (Flächen)Desinfektionsmittel, z. B. Pursept®-A Xpress.