




MicroDrop® *mesh*

Gebrauchsanweisung / Instruction manual

Inhalt**SEITE**

Ausstattung	4
Produktbeschreibung	5
Zusammensetzung des MicroDrop® mesh Verneblers	6
Wie funktioniert die Mesh Technologie?	7
Vorteile des MicroDrop® mesh Verneblers	8
Hinweise zur Medikamentenvernebelung	8
(Kontra-)Indikationen / Wichtige Hinweise	9
Garantiebedingungen	13
Verwendung des USB-Kabels	14
Einsetzen der Batterien / Lebensdauer und Wechsel der Batterien	15
Einfüllen des Medikaments	16
Anstecken des Mundstücks oder der Silikon-Masken	18
Anschluss der Silikon-Babymaske (optionales Zubehör)	18
Inhalationsvorgang starten / beenden	19
Reinigung	20
Desinfektion	22
Thermische Desinfektion	23
Verstopfte Mesh-Platte	24
Reinigung des Basisgerätes	25
Austausch des Verneblerkopfes / Wiedereinsatz	25
Technische Daten	26
Symbole	27
Entsorgung	28
Elektromagnetische Verträglichkeit	29
Bestellinformationen	30

Ausstattung

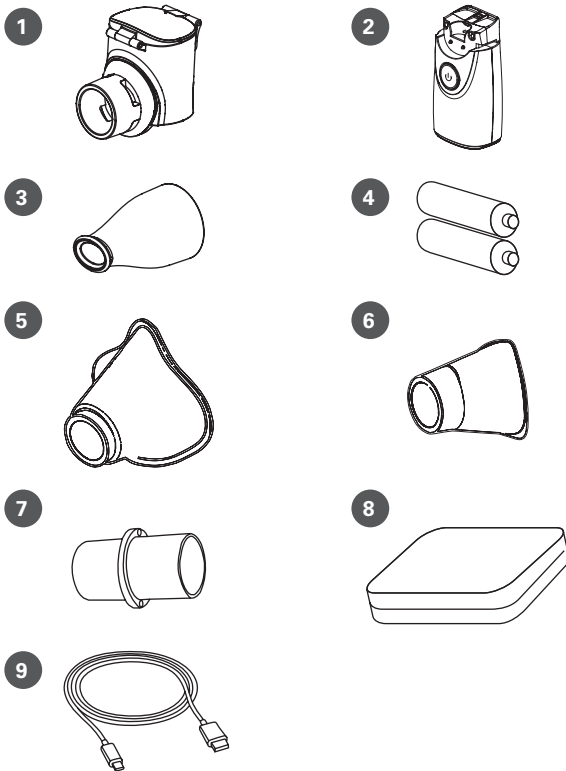

MicroDrop® mesh

Professionelles Inhalationsgerät für die unteren Atemwege

Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem Kauf und danken Ihnen für Ihr Vertrauen.


Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Vorstellungen unserer Kunden gerecht zu werden und moderne Produkte für die Behandlung von Atemwegserkrankungen anzubieten. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf, damit Sie diese auch später noch zu Rate ziehen können. Das Gerät soll entsprechend der Gebrauchsanweisung eingesetzt werden. Es handelt sich um ein Medizinprodukt für die Anwendung zu Hause. Es soll mit vom Arzt verschriebenen oder empfohlenen Arzneimitteln verwendet werden.

Auf der Internet-Seite www.mpvmedical.com können Sie sich über die gesamte Produktpalette von **MPV MEDICAL** informieren.

1. Verneblerkopf
2. Basisgerät
3. Mundstück
4. 2x AA Batterien
5. Silikon-Erwachsenenmaske
6. Silikon-Kindermaske
7. Adapter für Masken
8. Aufbewahrungstasche
9. USB-Kabel

Zusammensetzung

des MicroDrop® mesh Verneblers

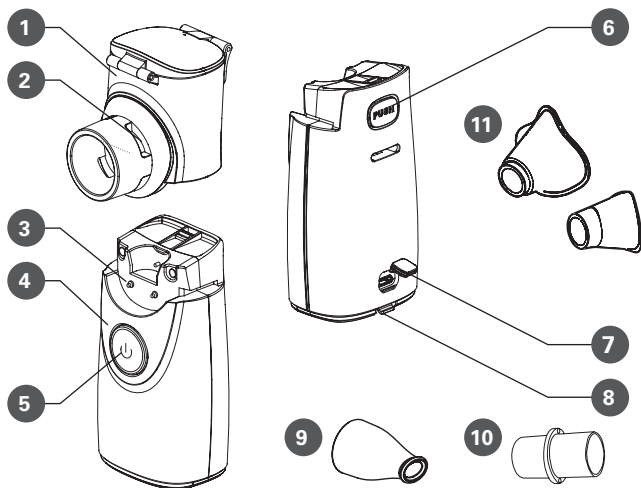


- | | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 Verneblerkopf | 5 AN / AUS Knopf | 9 Mundstück |
| 2 Mesh Platte | 6 Knopf zum Lösen des Verneblerkopfs | 10 Adapter für Silikonmasken |
| 3 Elektroden | 7 USB-Anschluss | 11 Silikonmasken |
| 4 Basisgerät | 8 Batterie Fach | |

Wie funktioniert die Mesh Technologie?

Ein Mesh Vernebler funktioniert anders, als ein herkömmliches Kompressor Inhalationsgerät und ist deswegen besonders leise und leicht.

Im Inneren des Verneblerkopfes befindet sich eine gewölbte Bodenplatte mit präzisionsgebohrten Löchern – ähnlich wie bei einem Sieb. Alle Löcher sind dabei exakt gleich groß.

Nun füllt man das Medikament auf diese Bodenplatte ein. Durch die Oberflächenspannung „schwimmt“ es zunächst auf der Platte. Sobald man das Gerät einschaltet, verursacht ein sogenanntes Piezo-Element Vibrationen, die sich auf die Platte übertragen (ähnlich wie bei der Ultraschalltechnologie). Durch die Vibrationen wird das Medikament durch die Löcher der Bodenplatte gepumpt. Die sehr gleichmäßige Tröpfchengröße des Aerosols wird dabei durch den Durchmesser der Löcher bestimmt.

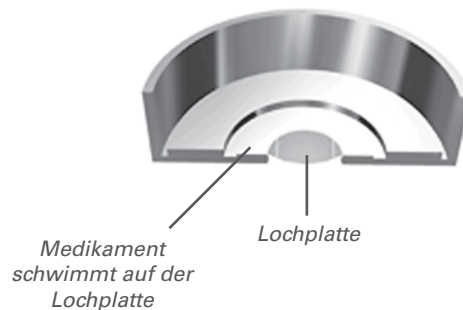

Vorteile des MicroDrop® mesh Verneblers

Der MicroDrop® mesh hat den Vorteil, dass er sehr klein und leise ist und das Inhalat nicht erhitzt wird. Damit ist mobiles und diskretes Inhalieren überall möglich:

- Besonders feine Teilchen: 3,35 µm MMAD (gemäß ISO 27427:2019 Annex D)
- Sehr hoher Anteil feiner Teilchen $RF < 5 \mu m$: 62,15 %
- Einfache Energieversorgung: über handelsübliche AA-Batterien oder USB-Kabel (am Computer, im Auto oder Powerbank)
- leicht zu halten: nur 96 g ohne Batterien
- Restinhalat: 0,01 mg, vollständige Verneblung des gesamten Inhalats möglich, dies spart Medikamente
- Biokompatible Materialien und DEHP/Phthalatfrei
- Leise und diskret; eine nahezu lautlose Vernebelung ist möglich

Hinweise zur Medikamentenvernebelung

Gelegentlich ist es zu beobachten, dass es bei Suspensionen zum Schäumen bzw. Verstopfen der Mesh-Löcher kommen kann. Bitte wenden Sie sich vorab an den Hersteller des Medikaments bzw. Ihren Apotheker um abzuklären, ob das verordnete Medikament für Mesh Vernebler geeignet ist.

(Kontra-) Indikationen

Das vorliegende Gerät dient zur Therapie bei funktionellen und/oder strukturellen Schädigung der unteren Atemwege bei Lungenerkrankungen (z. B. chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Asthma bronchiale, Mukoviszidose, Emphysem, Bronchiektase, Lungenfibrose, Lungenmykose)

Kontraindikationen:

Darf nicht in Beatmungssystem integriert werden. Für die Behandlung von Babys und Kleinkindern, die noch nicht mit dem Mundstück inhalieren können, gibt es spezielle Masken und Babywinkel. Der Vernebler ist nur für Patienten geeignet, die selbständig atmen und bei Bewusstsein sind.

Wichtige Hinweise

⚠ Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch und regelmäßig während der gesamten Lebensdauer des Produkts den Vernebler und die Zubehörteile auf mögliche Schäden. Weisen diese Teile Kabel-Schäden auf, bringen Sie das Gerät sofort zu dem Fachhändler bei dem Sie das Gerät erworben haben.

- In der Gegenwart von Kindern und pflegebedürftigen Personen muss das Gerät unter der strengen Aufsicht eines Erwachsenen, der die Gebrauchsanweisung gelesen hat, eingesetzt werden.
- Einige Einzelteile des Gerätes sind so klein, dass sie von Kindern verschluckt werden können; deshalb das Gerät außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Verwenden Sie das Kabel des Gerätes zu keinem anderen als dem angegebenen Zweck, da die Gefahr der Strangulation besteht. Besonderes Augenmerk muss auf Kinder und Personen mit speziellen Einschränkungen gelegt werden. Üblicherweise sind diese Personen nicht in der Lage, die Gefahr korrekt einzuschätzen.
- Das Gerät darf nicht mit anästhetischer Mischung gebraucht werden, die sich bei Kontakt mit Luft oder Sauerstoff oder Distickstoffmonoxid (Lachgas) entzünden können.
- USB-Kabel immer fernhalten von warmen Oberflächen.
- Halten Sie das USB-Kabel fern von Tieren (z.B. Nagetieren), da sie die Isolierung des USB-Kabels beschädigen können.
- Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an, und verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen (zum Beispiel beim Duschen oder Baden). Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Falls es doch passieren sollte, bringen Sie das Gerät sofort zu Ihrem Fachhändler.
- Verwenden Sie das Gerät nur in einer staubfreien Umgebung, um die Therapie nicht zu beeinflussen.
- Das Gerätegehäuse ist nicht wasserdicht und Flüssigkeiten können in das Gerät eintreten. Reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser.
- Halten Sie das Gerät fern von Wasserspritzern oder anderen Flüssigkeiten.

Gerät keinen extremen Temperaturschwankungen aussetzen.

- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, ins Sonnenlicht oder in zu heißen Räumen auf.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von Personal durchgeführt werden, das autorisiert ist. Andernfalls erlischt die Garantie und der Benutzer kann gefährdet werden.

Keinerlei Änderungen am Gerät ohne vorherige Genehmigung des Herstellers vornehmen.

- Der Hersteller, der Verkäufer und der Importeur haften nur dann für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Apparats, wenn: a) er gemäß der Gebrauchsanleitung genutzt wird und b) die elektrische Anlage des Raumes, in dem er genutzt wird, den Vorschriften und geltenden Gesetzen entspricht.
- Wechselwirkungen: Die verwendeten Materialien, die mit den Arzneimitteln in Kontakt kommen, wurden mit einer großen Bandbreite von Arzneimitteln getestet. Trotzdem ist es wegen der Vielfalt und der ständigen Weiterentwicklung der Arzneimittel nicht möglich, Wechselwirkungen auszuschließen. Wir empfehlen daher, Arzneimittel nach dem Öffnen so schnell wie möglich aufzubrauchen und längeren Kontakt mit dem Vernebler zu vermeiden.
- Der Hersteller sollte zum Berichten von Problemen und/oder unerwarteter Vorfälle beim Gerätebetrieb kontaktiert werden.
- **Wartungshinweise:** Dieses Produkt ist wartungsfrei.

⚠ Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt. Stellen Sie sicher, dass Sie den Angaben dieser Gebrauchsanleitung und den Anweisungen Ihres Arztes folgen, damit Sie dieses Produkt korrekt anwenden.

- Folgen Sie bezüglich Medikation, Dosierung und Anwendungsdauer bitte den Anweisungen Ihres Arztes
- Die Angaben zu den technischen Daten des Gerätes können je nach eingefülltem Medikament leicht variieren.
- Dies tritt besonders bei Medikamenten mit hoher Oberflächenspannung oder Viskosität auf. Die Verneblungsrate kann dann unter Umständen reduziert sein.
- Die Verneblungsrate kann sich ebenso verringern, wenn das Medikament eine niedrige Temperatur aufweist.
- Inhalieren Sie kein Trink- oder Leitungswasser in der Verneblerkammer. Dies kann zu einer Verschlimmerung Ihrer Symptome führen
- Öffnen Sie das Gerät niemals gewaltsam. Dies könnte zu Schäden führen.
- Reinigen Sie den Mesheinsatz nie mit einem Tuch oder einer Nadel. Dies führt zu Schädigungen des Gerätes und zur Reduktion der Therapieeffizienz.
- Lassen Sie keine Medikamentenflüssigkeit auf das Gehäuse tropfen. Falls dies doch geschieht, reinigen Sie es sofort mit einem trockenen Lappen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder setzen es groben Kräften aus. Dies kann zu Schädigungen des Gerätes führen.

Garantiebedingungen


Es wird eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum gewährt und zwar für alle Defekte die durch Design und verwendete Materialien entstanden sind.

- Die Garantie besteht aus kostenloser Reparatur oder Austausch der defekten Teile mittels Originalersatzteile.
- Die Garantie erstreckt sich nicht auf das mit dem Gerät gelieferte Zubehör oder die Teile, die normalem Verschleiß unterliegen.
- Das Gerät darf nur beim autorisierten Händler oder im MPV MEDICAL Service-Center repariert werden.
- Das Gerät muss innerhalb von 8 Tagen nach Auftreten des Defekts zur Reparatur eingesandt werden.
- Kosten für den Transport des Geräts gehen zu Lasten des Kunden.
- Reparaturen, die nicht unter die Garantiebedingungen fallen, gehen zu Lasten des Kunden.
- Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch missbräuchliche Verwendung, falsche Benutzung, absichtliche Beschädigung, Fallen lassen des Geräts, höherer Gewalt oder beim Transport entstanden sind.
- Die Garantie schließt keine Ersatzleistungen für jegliche Personen- oder Sachschäden ein, weder direkt oder indirekt, die aus einer Nichtfunktion des Geräts entstanden sind.
- Die Garantie ist ab dem Kaufdatum auf dem Kaufbeleg (Kassenbeleg oder Rechnung) gültig.

Verwendung des USB-Kabels

Die Geräteeinheit verfügt über Batterien oder ein USB-Kabel als Energieversorgung.

⚠ Bitte beachten Sie, dass das USB-Kabel mit Micro-USB-Anschluss auf eine Spannung von 5V ausgelegt ist.

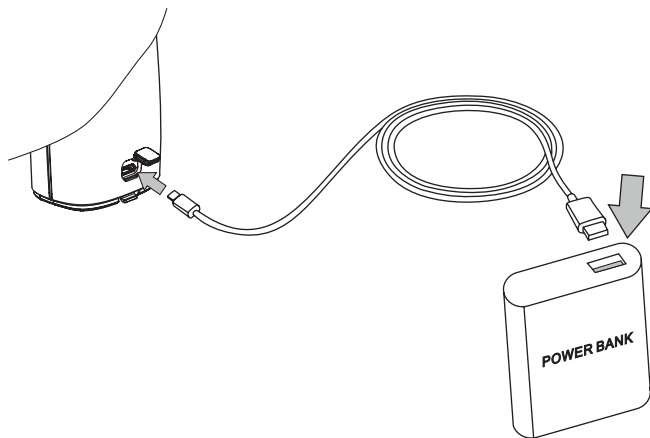


Verbinden Sie das Kabel mit dem Basisgerät, wie in der Abbildung zu sehen. Den USB Stecker verbinden Sie entweder mit einer handelsüblichen Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten) oder per entsprechendem Adapter mit dem Stromnetz im Auto oder Haus. Bitte achten Sie dabei auf die korrekten Anschlüsse und Spannungsvorgaben des jeweiligen Netzes.

Einsetzen der Batterien

⚠ Bitte beachten Sie, dass Sie keine wieder aufladbaren Batterien in diesem Gerät verwenden sondern Standard AA-Alkaline-Batterien!

1. Öffnen Sie das Batteriefach
2. Setzen Sie die 2x AA Batterien ein und achten Sie dabei bitte auf die korrekte Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach

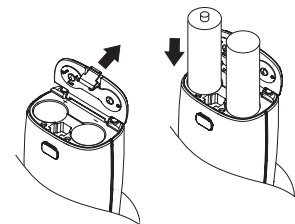

Lebensdauer und Wechsel der Batterien


- Bei der Verwendung von Alkaline Batterien kann der **MicroDrop® mesh** für ca. 3 Tage benutzt werden (bei einer Anwendungsdauer von ca. 30 min. am Tag)
- Wenn das Licht des AN/AUS Schalters schnell blinkt, sind die Batterien bald leer. Ersetzen Sie die Batterien dann durch zwei neue.

Bitte beachten:

- Setzen Sie die Batterien niemals mit falscher Polarität ein (+ und -).
- Ersetzen Sie leere Batterien unverzüglich durch neue.
- Wenn Sie das Gerät länger als 3 Monate nicht benutzen möchten, entnehmen Sie die Batterien. Ansonsten können die Batterien auslaufen und das Gerät schädigen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien für den Betrieb des Gerätes. Verwenden Sie keine alten oder halb leeren Batterien.


Einfüllen des Medikaments

- ⚠ **Vor jedem Gebrauch den Verneblerkopf und die Zubehörteile, wie im Abschnitt „Reinigung und Desinfektion“ beschrieben, aufbereiten.**
- ⚠ **Es wird empfohlen, dass der Verneblerkopf und die Zubehörteile immer von der gleichen Person verwendet werden, um Ansteckungsrisiken zu vermeiden.**

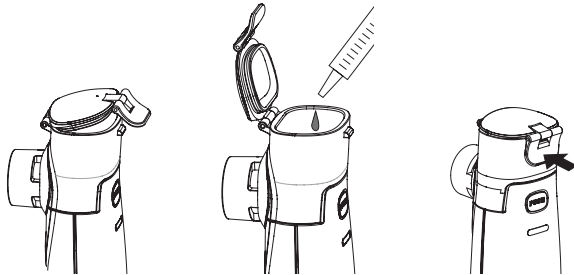

1. Öffnen Sie den Verneblerkopf
2. Befüllen Sie die Verneblerkammer mit der Inhalationslösung (max 8 ml). Bei Überfüllung läuft Lösung während der Inhalation aus.
3. Schließen Sie den Verneblerkopf fest zu.

Alternativ können Sie die Verneblerkammer auch befüllen, wenn der Verneblerkopf vom Basisgerät abmontiert ist. Nehmen Sie dazu den Verneblerkopf wie unten beschrieben vom Basisgerät ab und befüllen die Kammer. Verschließen Sie die Verneblerkammer fest und stecken Sie den Verneblerkopf anschließend wieder auf das Basisgerät.

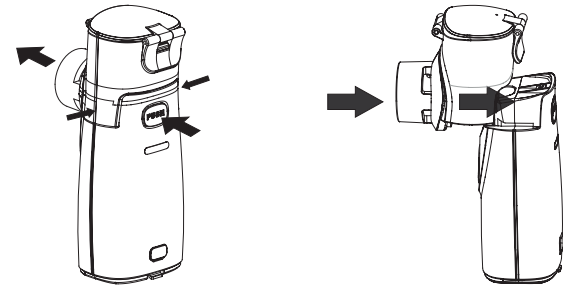


1. Halten Sie den Knopf für den Verneblerkopf gedrückt und ziehen Sie ihn nach vorne vom Basisgerät ab.
2. Verbinden Sie den Verneblerkopf mit dem Basisgerät, indem Sie ihn von vorne aufstecken. Ein „Klick-Geräusch“ bestätigt den korrekten Sitz.


Anstecken des Mundstücks oder der

Silikon-Masken

- ⚠ Die Inhalation mit Mundstück ist die effektivste Variante. Eine Maskeninhalation wird nur bei Personen empfohlen, die nicht mit dem Mundstück inhalieren können (Kinder unter 5 Jahren oder ältere, bzw. körperlich eingeschränkte Personen).

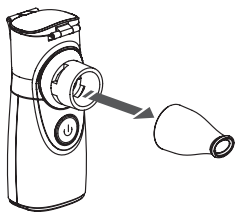

Anstecken des Mundstücks

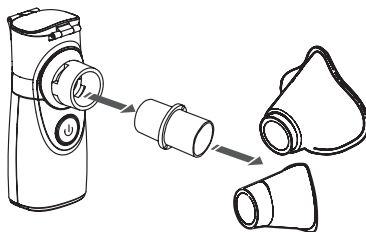

Anstecken der Maske

Anschluss der Silikon-Babymaske (optionales Zubehör)



Um die Babymaske an den Vernebler anzuschließen, stecken Sie bitte die kurze Seite des Baby-Winkels (optionales Zubehör) auf den Stutzen des Verneblerkopfes auf. Anschließend stecken Sie die Maske auf die lange Seite des Winkelstücks.



Inhalationsvorgang starten

Halten Sie das Basisgerät in der Hand und **drücken Sie auf den AN/AUS Knopf**.

Das Hintergrundlicht des AN/AUS Knopfes blinkt langsam (ca. 4 Sek. Intervall) während der Inhalation

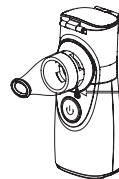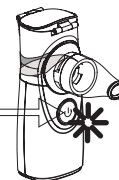

Falls sich zu viel Kondensat oder Speichel auf der Außenseite des Verneblerkopfes ansammelt, kann die Verneblung stoppen. Schalten Sie das Gerät bitte aus und wieder ein. Falls das Gerät dann nicht vernebelt, schalten Sie wieder aus und entfernen Sie die Feuchtigkeit durch Schütteln des Verneblerkopfes oder mit einem fusselfreien Tuch. Dann Schalten Sie wieder ein.

- Falls das verwendete Medikament eine hohe Oberflächenaktivität aufweist, kann es aus dem Mesheinsatz herausströmen. Der **MicroDrop® mesh** weist dann unter Umständen eine verringerte Verneblungsrate auf.
- Ein zischendes Geräusch während der Inhalation ist normal und stellt kein Problem dar.

Inhalationsvorgang beenden

Halten Sie das Basisgerät in der Hand und **drücken Sie auf den AN/AUS Knopf, bis er nicht mehr blinkt**. Wenn Sie einen externen Akku verwenden, entfernen Sie das USB-Kabel vom Basisgerät (siehe Seite 14).

Reinigung


Nach jeder Inhalationsanwendung bitte **sofort** den Verneblerkopf abnehmen, Deckel öffnen und mit klarem Wasser gründlich durchspülen. Eintrocknete Medikamenten- oder Salzreste verstopfen den Mesheinsatz und beschädigen somit das Gerät (Reinigungstipp S. 24).

- ⚠ **Schalten Sie das Gerät vor Beginn der Reinigung aus und entfernen Sie das USB-Kabel.**
- ⚠ **Reinigen Sie alle verwendeten Teile des Gerätes nach jeder Inhalation wie unten beschrieben.**
- ⚠ **Es wird empfohlen, dass jeder Benutzer seinen eigenen Vernebler und sein eigenes Zubehör verwendet, um Kreuzinfektionen zu vermeiden.**

A Entfernen Sie alle Teile vom Basisgerät




Maske

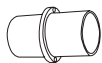

Adapter




Mundstück

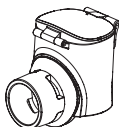


Verneblerkopf

B Öffnen Sie die Verneblerkammer und entfernen Sie eventuelle Medikamentenreste

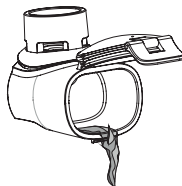

C Waschen Sie den Verneblerkopf, Mundstück, Adapter und Maske gründlich in einer Schale mit warmen Wasser aus.

- Spülen Sie den Mesheinsatz vorsichtig aus. Medikamente mit hoher Viskosität können ansonsten nach der Inhalation auf dem Mesheinsatz haften bleiben.
- Berühren Sie den Mesh-einsatz nicht direkt, dadurch kann er beschädigt werden und ist unbrauchbar.

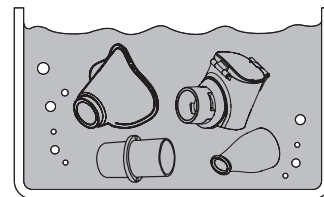


D Nehmen Sie die Teile nach ca. 5 min. heraus. Schalten Sie den Mesh ein, um die Restfeuchtigkeit zu vernebeln und das mesh „durchzupusten“.

E Direkt nach der Reinigung trocknen Sie die Teile mit einem neuen, fusselfreien Tuch.

Lassen Sie alle Teile direkt nach der Reinigung auf einem trockenen, fusselfreien Tuch trocknen.


Tipp: Verwenden Sie ein Moltontuch. Normale Baumwolltücher oder Küchenkrepp können durch Staub oder Fusseln den Mesheinsatz nachhaltig schädigen.

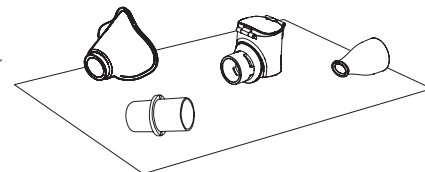

Manuelle Desinfektion

- ⚠ **Schalten Sie das Gerät vor Beginn der Desinfektion aus und entfernen Sie das USB-Kabel.**
- ⚠ **Desinfizieren Sie alle verwendeten Teile des Gerätes 1x täglich wie unten beschrieben.**

1. Bitte legen Sie den Verneblerkopf für drei Minuten in 75%tige Ethanol Lösung ein. Anschließend lassen Sie ihn in einer sauberen Umgebung und auf einem fusselfreien Tuch komplett trocknen.
2. Das Mundstück und die Masken wischen Sie bitte mit einer 75%tigen Ethanol Lösung ab. Nicht einlegen.
3. Anschließend lassen Sie alle Teile in einer sauberen Umgebung und auf einem fusselfreien Tuch komplett trocknen.

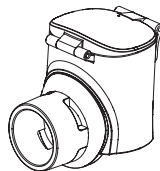

Thermische Desinfektion


Folgende Zubehöerteile können thermisch desinfiziert werden:

Verneblerkopf (1), Mundstück (9), Adapter für Silikonmasken (10), Silikonmasken (11) – (siehe S. 6)

Version A

(Dampfsterilisation im Topf)

1. Reinigen Sie den Verneblerkopf und das verwendete Zubehör gründlich, wie im Abschnitt „Reinigung“ beschrieben.
2. Befüllen Sie einen Topf mit ausreichend kalkarmen Wasser und legen Sie den Verneblerkopf und das Zubehör in ein passendes Sieb.
3. Setzen Sie das Einhängesieb/ den Dauergareinsatz in den Topf ein und überprüfen, dass das Wasser nicht bis zum Sieb reicht! Der Verneblerkopf darf nicht mit Wasser in Kontakt kommen.
4. Schliessen Sie den Topf mit einem Deckel.
5. Erhitzen Sie das Wasser im Topf bis es kocht und lassen die Verneblerteile dann 15 min. im Dampf desinfizieren.
6. Warten Sie, bis der Verneblerkopf und das Mundstück abgekühlt sind und entnehmen Sie dann aus dem Sieb. Trocknen Sie sie und bewahren Sie sie in der Tragetasche oder an einem trockenen und staubfreien Ort auf.

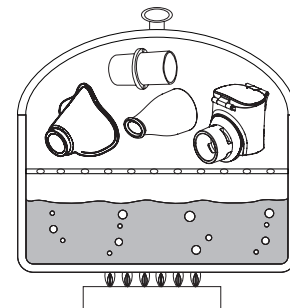

Version B

(Babyflaschen Desinfektor - keine Mikrowellengeräte)

Alternativ können die auf S. 23 genannten Verneblerteile mit einem handelsüblichen thermischen Desinfektionsgerät für Babyflaschen (Vaporisator) desinfiziert werden. Wählen Sie dafür ein Gerät mit einer Laufzeit von mindestens 6 Minuten. Bitte befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des Vaporisators.

Verstopfte Mesh-Platte

Verwendung Sie für diese Reinigungs-option nur kalkfreies Wasser (z.B. destilliertes Wasser).

Lassen Sie den Verneblerkopf ca. 5 min in warmem Wasser einweichen. Danach nehmen Sie ein weiches Wattestäbchen und feuchten es an (nie trocken anwenden!). Reiben Sie nun vorsichtig über die Mesh-Platte (*siehe Foto*). Dadurch lösen sich die Verkrustungen. Spülen Sie den Verneblerkopf anschließend durch und starten eine Probeverneblung mit destilliertem Wasser (*nicht inhalieren! Nur den Vernebler laufen lassen!*)


Sie sollten eine deutliche Verbesserung sehen. Vernebelt der MicroDrop® Mesh noch immer nicht zufriedenstellend, wiederholen Sie den Vorgang. Reinigen Sie mit dem Wattestäbchen abschließend auch noch einmal die Elektroden, damit ein guter Kontakt zwischen Basisgerät und Verneblerkopf besteht.



Reinigung des Basisgerätes


Wischen Sie das Basisgerät mit einem trockenen Tuch oder maximal leicht feuchtem fusselfreien Tuch ab. Halten Sie vor allem die Elektroden sauber und trocken. Bewahren Sie das Gerät nach dem Zusammensetzen an einem trockenen, staubfreien Ort auf.

Elektroden sauber halten

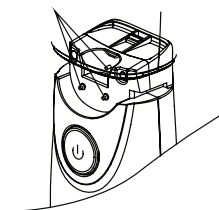

Austausch des Verneblerkopfes

Die Lebensdauer des Verneblerkopfes beträgt ca. 1 Jahr (bei täglicher Benutzung von 30 min.). Falls der Verneblerkopf nicht mehr korrekt vernebelt, kann dieser als Ersatzteil erworben und einfach ausgetauscht werden (**MicroDrop® mesh** Verneblerkopf Year-Set: Artikel-Nr. M51902-00200).

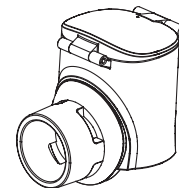

Wiedereinsatz

Der MicroDrop® mesh ist zum Wiedereinsatz bei Patientenwechsel geeignet. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Aufbereitung des MicroDrop mesh wie in den Punkten „Reinigung“ und „Desinfektion / thermische Desinfektion“ beschrieben. Die Teile 1, 3, 5, 6 und 7 müssen vor einem Wiedereinsatz/Patientenwechsel gereinigt und desinfiziert werden. Das Basisgerät (2) kann Wischdesinfiziert werden (bitte achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Gerät eindringt). Alternativ können die Teile 1, 3, 5, 6 und 7 durch neue Teile ersetzt werden.

Technische Daten (Mod. MicroDrop® mesh/ VP-M1)

Anwendungsart	Mesh Vernebelung
Stromquelle	2x AA Alkaline Batterien (3V). Optionales USB-Kabel (Micro USB mit 5V Ausgangsspannung) für Powerbanks
Stromverbrauch	ca. 2W
Betriebsspannung	DC 3V & MicroUSB 5V
Entspricht der:	Richtlinie 93/42/EWG, CE0197
Ultraschallfrequenz	114 kHz
Min. / Max. Füllvolumen	0,2 ml / 8 ml
Abmessungen (H)x(L)x(B)	51 (B) x 124 (H) x 58 (L) mm
Gewicht	96 g ohne Batterien
Lebensdauer Batterie	ca. 90 min mit 2x AA Alkaline Batterien
Lebensdauer Verneblerkammer	ca. 180 Stunden
Material	Mundstück (3) -PC, Masken (5,6) - Silikon, Verneblerkopf (1) – PC
Lebensdauer Maske und Mundstück	ca. 6 Monate - 12 Monate
Lebensdauer Basisgerät und Adapter	ca. 2 Jahre
Aerosoldaten	
MMAD / GSD	3,35 µm* / 1,41
Teilchenspektrum	1 - 5 µm
Verneblungsrate	0,22 ml/min
Massenanteil (0,5 – 5 µm)	62,15 %
Betriebsbedingungen	
Temperatur	min. 10°C; max. 40°C
RH Luftfeuchtigkeit	min. 30 %; max. 85 %
Lagerbedingungen	
Temperatur	min. -20°C; max. 50°C
RH Luftfeuchtigkeit	min. 30 %; max. 85 %
Verschmutzungsgrad	Grad 2
Spannungskategorie	Kategorie 2
Höhenkategorie	≤ 2000m

*gemäß EN 13544-1:2007-A1:2009 Kaskadenimpaktortest

Symbole



Symbol für Vorsicht. Dies ist ein Sicherheitssymbol, mit dem hervorgehoben wird, dass mit den Geräten spezifische Warnungen oder Vorsichtsmaßnahmen verbunden sind, die sonst nicht auf dem Etikett zu finden sind. Das Symbol kann auch bedeuten: Achtung, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.



Hersteller / Herstellungsdatum



Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nach den örtlichen Vorschriften zur getrennten Müllsamm- lung und bei einer Sammelstelle entsorgt werden muss und nicht im Hausmüll zu entsorgen ist, nachdem es seine Nutzungsdauer erreicht hat.



Gerät der Klasse II



Gerät Typ BF



Symbol für „Gebrauchsanweisung muss gelesen werden“; Gibt an, dass der Benutzer die Gebrauchsanweisung lesen muss.

SN

Seriennummer des Herstellers



Schalter EIN /AUS



In Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN-ISO 10993-1 „Biologische Beurteilung von Medizin- produkten“ und mit der europäischen Richtlinie 93/42/EG „Medizinprodukte“ Phthalate frei. In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

IPX2

IPX2 Schutzklasse: IPX“ Schützt gegen fallendes Tropf- wasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist.

Entsorgung

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EG zeigt das auf dem Gerät angebrachte Symbol an, dass das zu entsorgende Gerät als Abfall eingestuft wird und somit der „Mülltrennung unterliegt“.

Der Verbraucher muss genannten Abfall den von den Kommunalverwaltungen eingerichteten Sammelstellen zuführen (bzw. zuführen lassen) oder beim Kauf eines neuen gleichartigen Geräts dem Händler übergeben.

Die Mülltrennung sowie die weiteren Schritte der Verarbeitung, der Wiederverwertung und der Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten mit Recyclingmaterial und wirken Schädigungen von Umwelt und Gesundheit, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden könnten, entgegen.

Die vorschriftswidrige Entsorgung des Produkts durch einen Verbraucher kann die Verhängung von in den Umsetzungsgesetzen zur Richtlinie 2012/19/EG vorgesehenen Verwaltungsstrafen von Seiten des Mitgliedsstaats, in welchem das Produkt entsorgt wurde, nach sich ziehen.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Der **MicroDrop® mesh** Inhalator ist für die Verwendung unter den unten genannten Bedingungen konzipiert – diese sollten daher unbedingt beachtet und eingehalten werden.

Emissions-Test	Klassifizierung	Elektromagnetisches Umfeld
RF Emission CISPR 11	Gruppe 1	Der MicroDrop® mesh Inhalator verwendet RF Spannung ausschließlich für interne Funktionen. Deshalb sind die RF Spannungen sehr gering und verursachen dadurch sehr unwahrscheinlich Schäden an anderen umliegenden elektronischen Geräten.
RF Emission CISPR 11	Klasse B	Der MicroDrop® mesh Inhalator ist für die Anwendung in allen Einrichtungen geeignet, inklusive Haushalte, die direkt an die niedrige öffentlich Stromversorgung angeschlossen sind.
Oberwellenaussendung IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spannungsschwankungen / Flicker IEC 61000-3-3	erfüllt	

Bestellinformationen

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
MicroDrop® mesh	13928212	M51902-00
MicroDrop® mesh Verneblerkopf –Year-Set	13928229	M51902-00200
MicroDrop® mesh Mundstück	13928235	M51902-00300
Silikon-Erwachsenenmaske	13965087	M51902-00600
Silikon-Kindermaske	14052383	M51902-00900
Adapter AD22/AD22 für Masken	14052414	M51902-01000
MicroDrop® Baby-Set	00022875	M53600-07
MicroDrop® mesh USB-Kabel	13965093	M51902-00700
MicroDrop® mesh Tasche	13928241	M51902-00400
MicroDrop® mesh Basisgerät	13965070	M51902-00800
MicroDrop® mesh Karton	13928258	M51902-00500
MicroDrop® mesh Gebrauchsanweisung	---	M51902-01100
MicroDrop® mesh Prospekt	---	M90010-37800

MPV MEDICAL



MicroDrop® mesh
Instruction manual

EN

**Hersteller / Manufacturer:**

Vapo Healthcare Co., Ltd.
Southern unit of third floor, building B, No. 99 Yudai West Rd,
High tech district, Kunshan, Suzhou, 215301 Jiangsu Province, P.R.China

**Vertrieb / Distributor:**

MPV MEDICAL GmbH
Parsdorfer Weg 6
85551 Kirchheim
GERMANY
Tel +49 (0)89 7299 700-0
www.mpvmedical.com
info@mpvmedical.com

**EU Representative:**

Share Info GmbH
Heerdter Lohweg 83
40549 Düsseldorf



Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der EU Richtlinie
93 / 42 / EEC und nachfolgenden Änderungen.



Entsorgung über eine Sammelstelle oder durch Zurücksendung
an MPV MEDICAL.

DE 87779314

MPV MEDICAL

Parsdorfer Weg 6
85551 Kirchheim bei München
GERMANY

Tel. +49 (0)89 7299 700-0
Fax +49 (0)89 7299 700-99

www.mpvmedical.com
info@mpvmedical.com

Notified Body:

TÜV Rheinland LGA Products
GmbH, Tillystraße 2, 90431
Nürnberg / GERMANY

