



Pluslife Mini Dock Set

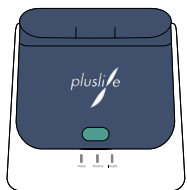


Pluslife Mini Dock




Kartenhalter

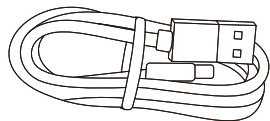

Typ-C-Kabel

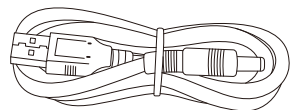


Gleichstromkabel

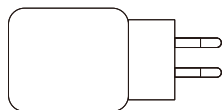


Netzteil

Pluslife SARS-CoV-2 Card Set

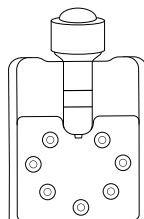

SARS-CoV-2-
Reaktionskarte

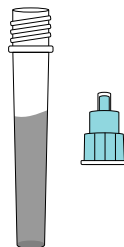

Nukleinsäure
freisetzendes Mittel 01



Abfallbeutel



Einmal-Probentupfer

Anweisungen Pluslife SARS-CoV-2 Card

Sehen Sie sich vor dem Testen das Demo-Video zum Gerät an und lesen Sie die Anweisungen zur Testkarte sorgfältig durch.

Demonstrationsvideo
Scannen Sie den QR-Code, um ein Demo-Video anzusehen.




Bedienungseinschränkungen

1. Drücken Sie während der Amplifikation nicht die Ein-/Aus-Taste, da sonst ein ungültiges Ergebnis auftreten kann.
2. Wenn während eines Tests ein Stromausfall auftritt, schlägt der Test fehl und sollte mit einer neuen Probe wiederholt werden.
3. Die obere Abdeckung des Geräts darf während des Betriebs nicht geöffnet werden, da dies zu einer Beeinträchtigung des Testergebnisses führen kann.
4. Heben Sie das Gerät während des Tests nicht an, um eine Unterbrechung der Datenübertragung des Geräts zu vermeiden.
5. Verwenden Sie nur die Originalanschlüsse oder -kabel zum Testen.
6. Die Tests müssen auf einer ebenen und sauberen Oberfläche durchgeführt werden.


ANWEISUNGEN SARS-CoV-2 NUCLEIC ACID TESTING CARD

01 Vorbereiten der Dock

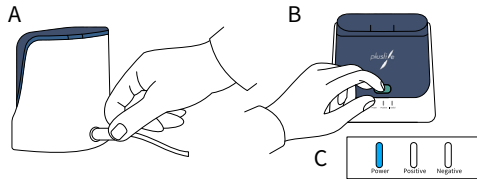


- A. Schließen Sie das Netzteil an.
B. Drücken Sie die Taste, um die Aufwärmphase zu starten (ca. 2 Minuten).
C. Wenn die Betriebsleuchte blau leuchtet, ist die Aufwärmphase abgeschlossen.

02 Probe

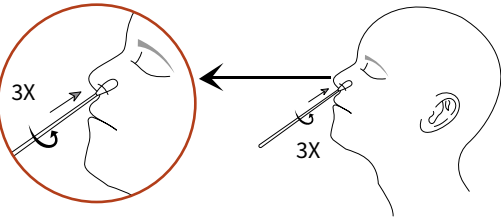


- Nehmen Sie den Probentupfer heraus. Drehen Sie ihn in jedem Nasenloch 3 Mal.
Hinweis: Lassen Sie die Person, die getestet wird, gegebenenfalls überschüssigen Schleim abwischen.

03 Freisetzung von Nukleinsäure

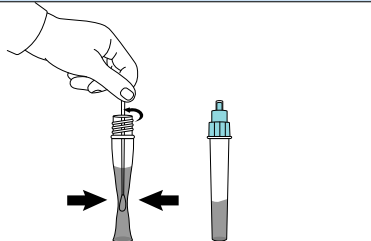


- Drehen Sie den Tupfer im Reaktionsrohr mit Nukleinsäure freisetzendem Mittel 01 10 Mal und drücken Sie gleichzeitig die Tupfer-Spitze zusammen. Entsorgen Sie den Tupfer, und schrauben Sie die Kappe fest zu.

04 In Reaktionskarte geben

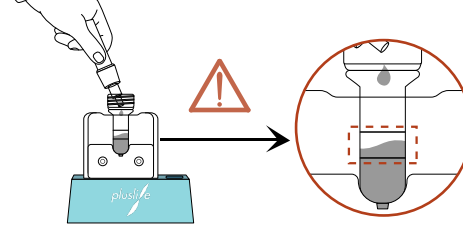


- Drücken Sie das Reaktionsrohr zusammen, um das freisetzende Mittel durch die Tropfkappe in die Karte zu geben. STELLEN SIE SICHER, dass sich die Flüssigkeit zwischen den beiden Füllstandslinien befindet.

05 Kappe richtig verschließen

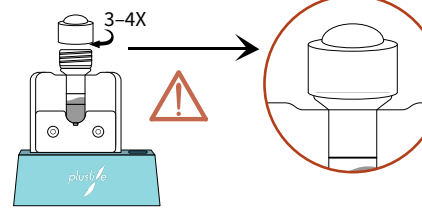


- Schrauben Sie die Reaktionskappe der Karte 3 bis 4 Mal fest zu (BIS SIE SICH NICHT MEHR DREHEN LÄSST).
Wenn der Verschluss nicht luftdicht ist, kann es zu fehlgeschlagenen/ungültigen Ergebnissen kommen.

06 Flüssigkeit in die Reaktionskammer geben

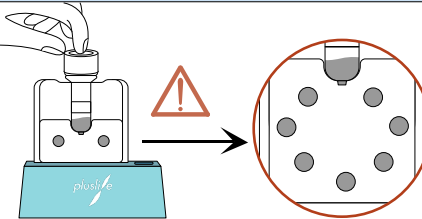


- Drücken Sie fest auf die Luftblase auf der Oberseite der Kartenabdeckung. Warten Sie 10 Sekunden lang, um sicherzustellen, dass ALLE Kammern VOLLSTÄNDIG mit Flüssigkeit gefüllt sind.

07 Mischen

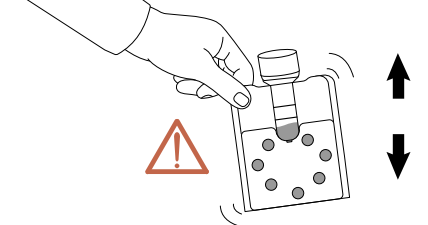


- SCHÜTTELN Sie die Karte schnell 10 Mal.

08 Amplifikation

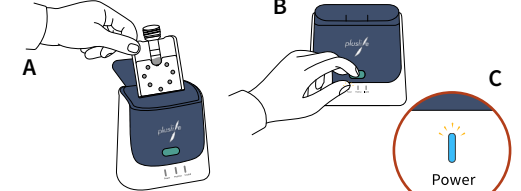

- A. Setzen Sie die Reaktionskarte in die Mini Dock ein und schließen Sie die obere Abdeckung.
B. Drücken Sie die Taste, um die Amplifikation zu starten.
C. Die Betriebsleuchte blinkt während des Amplifikationsvorgangs blau. Lesen Sie die Ergebnisse nach 15 bis 35 Minuten ab.

09 Testergebnisse

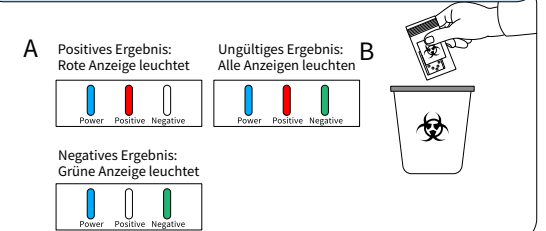

- A. Das Testergebnis wird wie folgt ausgewertet.
B. ENTSORGEN Sie nach dem Test die Reaktionskarte im Abfallbeutel und VERSCHLIESSEN Sie den Beutel SO SCHNELL WIE MÖGLICH.
Um mit dem nächsten Test fortzufahren, gehen Sie direkt zu SCHRITT 02.
Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.