

MoliCare® Premium lady pants

Allgemeine Produktbeschreibung/Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:


Bei MoliCare® Premium lady pants handelt es sich um Einweghosen zur Inkontinenzversorgung für Frauen.

Die Produkte eignen sich für die Versorgung bei unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für die Reinlichkeitserziehung. Die Produkte sind für die Verwendung bei mobilen und eingeschränkt mobilen Frauen sowie bei unruhigen oder dementen Anwendern ausgelegt. Die Produkte sind ausschließlich für den Einmalgebrauch geeignet und sollten regelmäßig je nach Bedarf gewechselt werden.

Die Produkte können sowohl in der häuslichen Pflege als auch in professionellen Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. Sie können dabei von medizinischen Fachkräften und Laien gleichermaßen verwendet werden.

Anwendung/Indikation

MoliCare® Premium lady pants eignen sich für die Versorgung bei, unterschiedlichen Schweregraden der Harn- und Stuhlinkontinenz sowie für die Reinlichkeitserziehung.

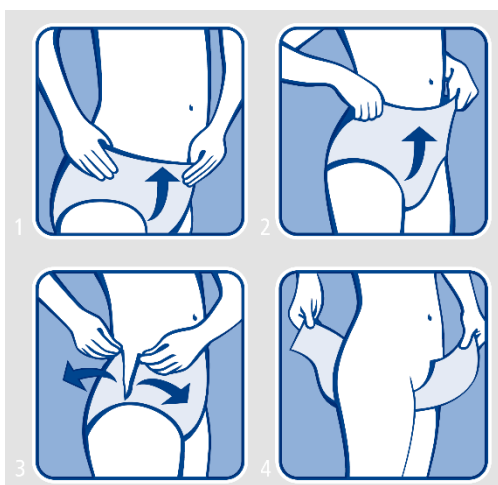

Artikelnummern*

Verpackung		M	L
	Hüft-/Taillenumfang (cm)	80–120	100–150
P8	5 Tropfen / grün	915867	-
	7 Tropfen / blau	915877	-
P7	5 Tropfen / grün	-	915868
	7 Tropfen / blau	-	915870
P1	5 Tropfen / grün	915810	915811
	7 Tropfen / blau	915815	915816

*Möglicherweise ist das volle Sortiment nicht in allen Ländern erhältlich.

MoliCare® Premium lady pants

Produkt zum Einmalgebrauch

Die Wiederverwendung eines für den Einmalgebrauch vorgesehenen Medizinprodukts ist gefährlich. Die Wiederaufbereitung von Produkten, um sie erneut zu verwenden, kann ihre Integrität und Leistung deutlich beeinträchtigen. Weitere Informationen auf Anfrage. Eine Wiederverwendung des Produkts kann zu mikrobiellen Kontaminationen und/oder leichten Hautinfektionen führen.

Produktentsorgung

Um potenzielle Infektions- oder Umweltrisiken zu minimieren, sind Einwegkomponenten von MoliCare® Premium lady pants entsprechend den Entsorgungsverfahren gemäß den jeweiligen vor Ort geltenden Gesetzen, Regeln, Vorschriften und Normen zur Infektionsprävention zu entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Wenn bei Patienten/Anwendern/Dritten in der Europäischen Union und Ländern mit denselben Vorschriften (Verordnung [EU] 2017/745 über Medizinprodukte) während der Verwendung oder infolge der Verwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, muss dies dem Hersteller bzw. seinem Bevollmächtigten und der national zuständigen Behörde gemeldet werden.

Leistungsmerkmale des Produkts

MoliCare® Premium lady pants 5 Tropfen / grün:

Merkmale	Einheit	M	L
Gesamtgewicht:*	[g]	44	51

* ≤ ± 10% Gewichtsabweichung

MoliCare® Premium lady pants 7 Tropfen / blau:

Merkmale	Einheit	M	L
Gesamtgewicht:*	[g]	67	71

* ≤ ± 10% Gewichtsabweichung

Materialeigenschaften

Bestandteil	Material
Hauptteil	Polypropylen-Vlies, hydrophob, atmungsaktiv, weiß mit Druck
Rückseite:	Polyethylen-Folie mit Polypropylen-Vliesschicht, weiß, atmungsaktiv
Saugkern (3-lagig):	1. Lage: Zellstoff* 2. Lage: Zellstoff-* / SAP-Gemisch 3. Lage: Zellstoff*, Curly Fiber *elementarchlorfrei gebleicht
Kleber:	Schmelzkraftkleber
Oberseite:	Polypropylen-Vlies, hydrophil, weiß, mit Aloe Vera behandelt
Bündchen:	Polypropylen-Vlies, hydrophob, weiß
Elastikfäden:	Elastikfäden auf Polyurethan-Basis für Beinabschluss, Hüftbereich, Taille und (nur bei 7 Tropfen) Innenbündchen
Produktinformationen:	Aufdruck auf Innenseite des Taillenbunds (Rückseite)

MoliCare® Premium lady pants

Produktmerkmale

Abmessungen	5 Tropfen		7 Tropfen	
	M	L	M	L
Gesamtlänge:	740	780	730	830
Gesamtbreite:	660	810	660	810
Schrittbreite:	165	165	210	215
Länge Saugkern:	340	370	490	580
Breite Saugkern:	120	120	180	180
Breite Saugkern im Schritt:	90	90	140	140

* ≤ ± 10% Maßabweichung

Kennzeichnung

9-stelliger Chargen-Code

z. B.:  9 001 02 82 2

Jahr 201X Interner Schlüssel Interner Schlüssel Interner Schlüssel Kumulierte Prüzfziffer

Herstellungsdatum

z. B.:  2019 08 07

Jahr Monat Tag

Verfalldatum

z. B.:  2024 08 01

Jahr Monat Tag

Haltbarkeit: 5 Jahre

Medizinprodukt



Trocken aufbewahren



Nicht wiederverwenden



CE-Kennzeichnung



Letzter Überarbeitungsstand: 2019-10-04