



Geringeres Risiko. Bessere Ergebnisse.

Oxivir® Excel Conc

Desinfektionsreiniger auf Basis der patentierten AHP-Technologie
(Accelerated Hydrogen Peroxide).

Oxivir® Desinfektionsreiniger mit AHP-Technologie schreiben die Regeln für Desinfektionsaufgaben neu. Sie bieten ein breites Wirkungsspektrum, realistische Einwirkzeiten und hervorragender Reinigung sowie eine Formulierung mit hervorragendem Anwender-Sicherheitsprofil, exzellenter Oberflächenverträglichkeit und einem nachhaltigen Wirkstoff.


- VAH-gelistet wie MRSA, CRE, VRE und CRPSA ab
- Wirkt gegen Bakterien, Viren und Hefen
- Viruzide Wirkung, einschliesslich gegen unbehüllte Viren wie beispielsweise Norovirus & Poliovirus in nur 30 Sekunden
- Eingehend nach den neuen europäischen Normen getestet
- Levurozide Wirkung gegen Candida albicans
- Leistungsstarke Tensid-Kombination bietet hervorragende Reinigungsleistung einschliesslich Entkalkungswirkung und Wirksamkeit gegen wiederkehrenden Kalkaufbau
- Gutes Anwender-Sicherheitsprofil reduziert Mitarbeiterisiko und -ausfälle
- Keine Gefahrenhinweise bei Verwendung in Verdünnung
- Enthält keine Stoffe, die die Atemwege reizen
- Die AHP-Formulierung ist sanft zu Oberflächen und verlängert die Lebensdauer der Einrichtungen und Geräte
- Dank der CE IIa-Zertifizierung geeignet für die Verwendung auf nicht invasiven Medizinprodukten
- Geeignet für die Anwendung in Hochrisikobereichen, einschliesslich Intensivstationen, OP-Räume, Neugeborenen-Intensivstationen und Patientenzimmer
- VAH-gelistet



Bakterizid



Viruzid

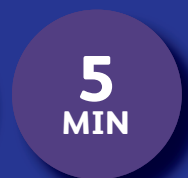

Levurozid



Oberflächenverträglichkeit



EDELSTAHL



GLAS



ACRYL



TEXTILIEN*

*in 2%iger Verdünnung

Oxivir Excel kann auf allen harten Oberflächen angewendet werden, die üblicherweise im Gesundheitswesen angetroffen werden, einschliesslich Edelstahl, Glas, Acryl und PVC. Nicht geeignet für die Verwendung auf Marmor, Kupfer, Messing oder anderen Oberflächen, die empfindlich gegenüber oxidierenden Stoffen sind.

* Einwirkzeit abhängig von der Verdünnung


Oxivir® Excel Conc

Desinfektionsreiniger auf Basis der patentierten AHP-Technologie
(Accelerated Hydrogen Peroxide).


Wirksamkeit	Prüfverfahren	Dosierung und Einwirkzeit	Belastung
Bakterizid	EN13727	0.75% 30 Sek.	Niedrige Belastung
Bakterizid	EN13727	2.0% 30 Sek., 1.5% 5 Min.	Hohe Belastung
Bakterizid, Levurozid	EN13697	Bakterien: 1.25% 5 Min., Hefen: 2.5% 5 Min.	Niedrige Belastung
Bakterizid, Levurozid	EN13697	Bakterien: 1.5% 5 Min., Hefen: 3.5% 5 Min. Medizinische Anschmutzung: Bakterien: 4.0% 5 Min., Hefen: 4.5% 5 Min.	Hohe Belastung
Bakterizid, Levurozid	EN16615	1.0% 1 Min.	Hohe Belastung
Bakterizid, Levurozid	VAH (EN16615)	4.0% 5 Min., 3.0% 15 Min., 2.0% 30 Min., 1.0% 60 Min.	Hohe Belastung
Fungizid	EN13624	7.0% 30 Min., 5.0% 60 Min.	Niedrige Belastung
Sporizid	EN13704 (Clostridium difficile)	10% 15 Min.	Niedrige Belastung
Viruzid (wirksam gegen alle Viren)	EN 14476 (getestet: Adeno-, Polio- und Norovirus)	4.0% 30 Sek., 2.0% 5 Min.	Hohe Belastung
Begrenzt viruzid (wirksam gegen behüllte Viren)	DVV (getestet: Vaccinia-Virus, BVDV)	2.0% 30 Sek.	Hohe Belastung

Anwendung


Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

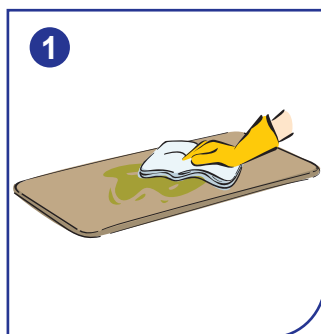


Oberfläche von grobem Schmutz befreien.

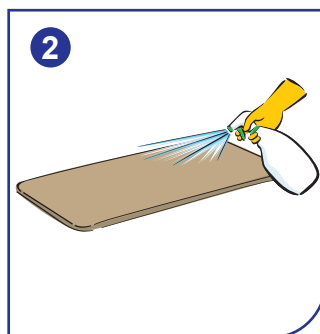

Produkt auf die saubere Oberfläche aufbringen.

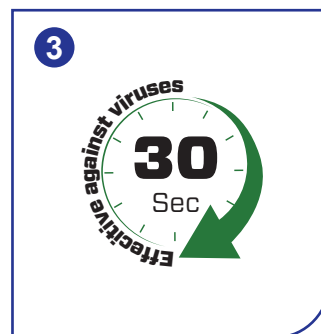

30 Sekunden einwirken lassen, um eine viruzide Wirkung gemäss EN 14476 zu erreichen.

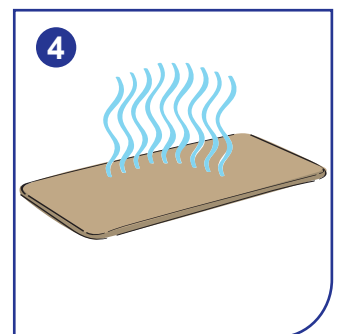

An der Luft trocknen lassen.

Zusammensetzung

Oxivir Excel:
100 g des Produkts enthalten:
Wirkstoffe: 7,2 % Wasserstoffperoxid

Lagerung

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sowie Informationen zur Entsorgung dieses Produkts können dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Lagerung nur im Original-Gebinde. Im geschlossenen Behälter aufbewahren. Extreme Temperaturen vermeiden. Produkt reagiert mit oxidierbaren Substanzen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Oxivir Excel bietet eine überaus wirksame Desinfektion mit einem Sicherheitsprofil, das das Produkt einfach in der Anwendung macht und so die Einhaltung der Vorgaben unterstützt.