




MediSet® PEG Standard



1

Hände waschen und desinfizieren (ggf. Mundschutz verwenden)

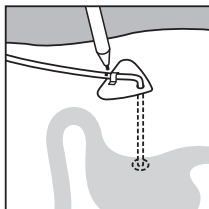


2

Die Sonde am oberen Rand der Halteplatte markieren


3

Zur Reinigung der Sondenaustrittsstelle die Halteplatte vorsichtig zurückziehen

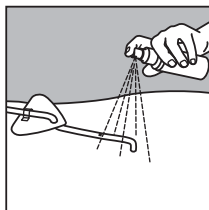

4

Besprühen der Sondenaustrittsstelle und Halteplatte mit farblosem Hautdesinfektionsmittel, dann mit jeweils einer Vlieskompressen reinigen

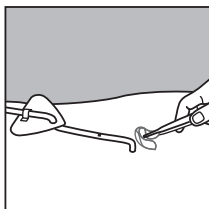




5

Sondenaustrittsstelle nochmals mit Hautdesinfektionsmittel besprühen (Einwirkzeit beachten)


6

Schlitzkomresse zwischen Haut und Halteplatte um die Sonde legen

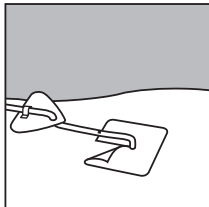


7

Halteplatte bis zur Markierung an der Sonde vorsichtig zurückschieben und mit dem Verschluss der Halteplatte fixieren

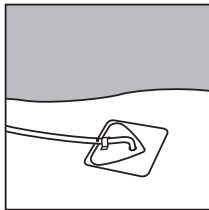


8



Halteplatte mit der dritten Vlieskomresse abdecken und mit Fixiervlies (Omnifix® elastic) fixieren

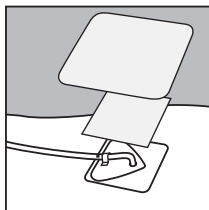


9

Maßnahmen dokumentieren. Hierzu kann das Dokumentationsetikett auf der Faltschachtelrückseite entnommen und in die Durchführungskontrolle der Patientenmappe geklebt werden

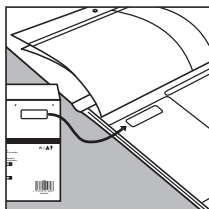

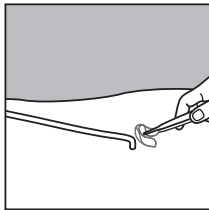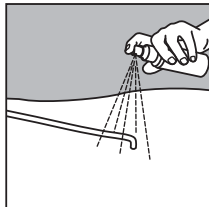

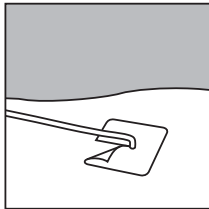

4


Schlitzkomresse um den Katheter legen

Bei geblockten Kathetern:

Katheter in Fixierplatte einlegen


Ohne Fixierplatte:

Schlitzkomresse um den Katheter legen, Katheter wird nur durch äußeren Verband fixiert

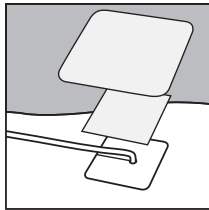

5

Katheter an der Eintrittsstelle mit der dritten Vlieskomresse abdecken und mit Fixiervlies (Omnifix® elastic) fixieren

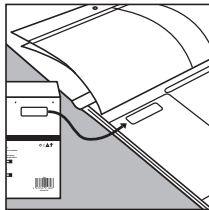

6

Maßnahmen dokumentieren. Hierzu kann das Dokumentationsetikett auf der Faltschachtelrückseite entnommen und in die Durchführungskontrolle der Patientenmappe geklebt werden