

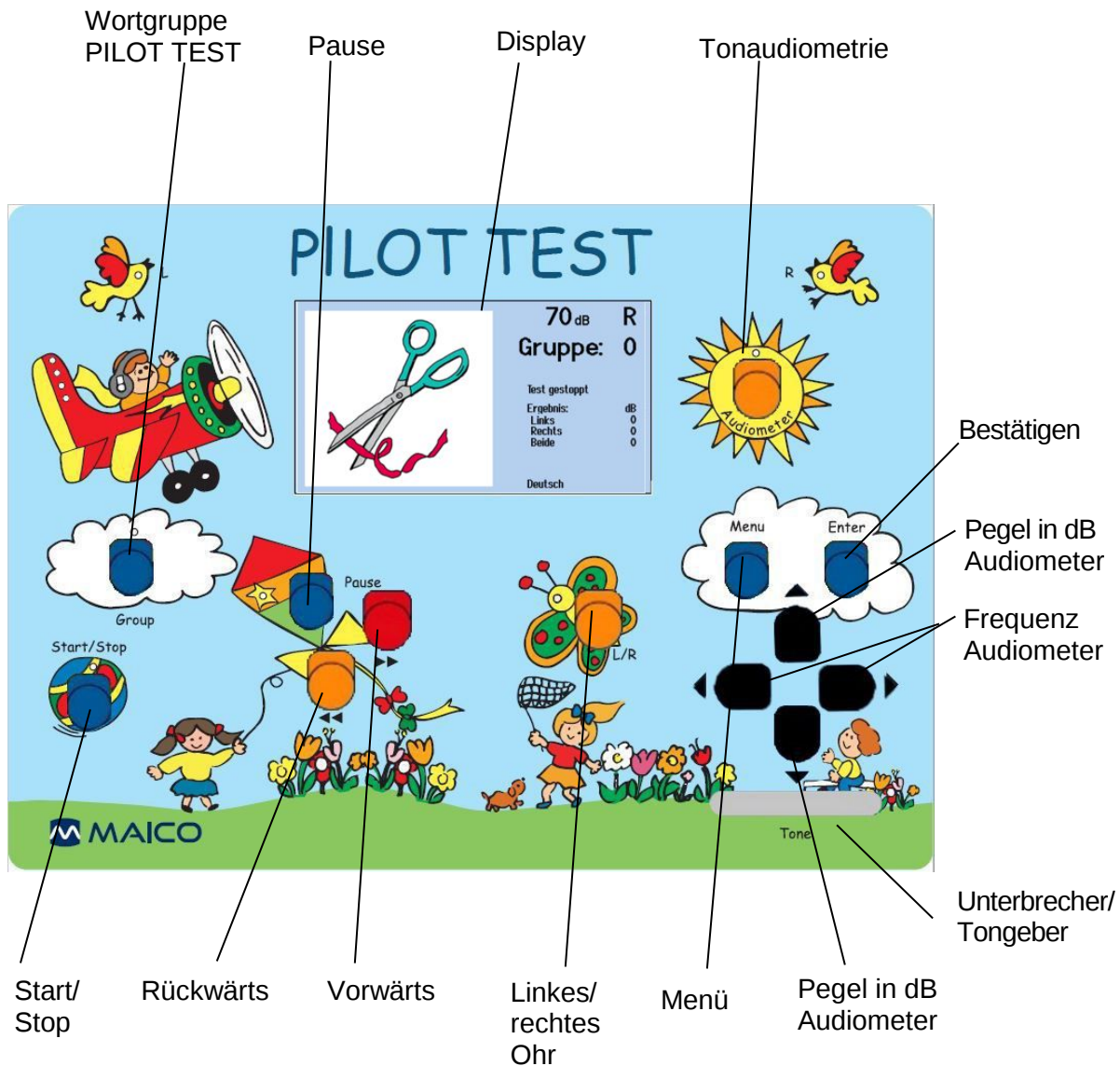
1 ÜBER DIESE KURZANLEITUNG



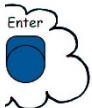
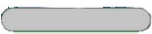
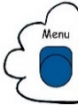
Diese Kurzanleitung ist nicht als Ersatz für das Benutzerhandbuch zu verwenden. Sie sind dazu verpflichtet, vor der Benutzung des Geräts das gesamte Benutzerhandbuch zu lesen!

Einige der folgenden Funktionen können entsprechend den Einstellungen variieren.

2 DISPLAY UND BEDIENFELD



3 KURZBESCHREIBUNG DER FUNKTIONSTASTEN

Group		PILOT TEST: - Auswahl der Wortgruppen - Gruppe 1-4 = PILOT TEST, Gruppe 0 = Training bei 70 dB - Langes Drücken -> Daten-Menü - Löschen der Ergebnisse: ENTER-Taste - Zurück: Jede andere Taste
Pause		PILOT TEST: unterbrechen/fortfahren
Display		PILOT TEST: Bild-Anzeige des Wortes, des Lautstärkepegels in dB, des Ohres R oder L, der Wortgruppe (0-4) Tonaudiometrie: Anzeige des Audiogramms/der Tabelle, des Hörpegels, des Ohres, der Tonart, des Antwortsignals und des Tonmodus
Audio-meter		Tonaudiometrie: - Starten - Langes Drücken -> Daten-Menü - Löschen der Ergebnisse: ENTER-Taste - Zurück: Jede andere Taste
Enter		Tonaudiometrie/PILOT TEST: Speichern der Ergebnisse
Lautstärke		Tonaudiometrie: Auswahl eines lauterer/leiseren Lautstärkepegels
Frequenz		Tonaudiometrie: Auswahl einer höheren/niedrigeren Frequenz
Tone		Tonaudiometrie: Unterbrecher- oder Tongeber (im Benutzermenü einstellbar)
Menu		Benutzermenü
L / R		Tonaudiometrie/PILOT TEST: Auswahl des linken (L) oder rechten (R) Ohres
Vorwärts		PILOT TEST: Nächstes Wort Tonaudiometrie: Pulston an
Rückwärts		PILOT TEST: Letztes Wort wiederholen Tonaudiometrie: Pulston aus
Start / Stop		PILOT TEST: Starten/stoppen